

Uživatelská příručka

VMENU WIN **Verze 4.1**



Uživatelská příručka tvoří základ pro práci a porozumění softwaru VMENU WIN. Doporučujeme číst předložený návod k obsluze důkladně zároveň s používáním programu, aby se od začátku zajistilo jisté a rychlé používání a orientace v programu.

S tímto softwarem dostáváte flexibilní produkt, který můžete optimálně přizpůsobit individuálním potřebám Vašeho volacího zařízení.

VMENU WIN Vám umožňuje zjišťovat, předávat a dokumentovat data o volání jedním softwarem.

Pokud máte dotazy, jsme Vám ochotně k dispozici.


Váš **VAROLUX** –Team

Stručný popis VMENU WIN

Nová verze VMENU byla kompletně přepracovaná a upravená pro Windows. Při vývoji systému jsme kladli velký důraz na snadnou obsluhu a transparentnost informací, abychom Vám umožnili co nejnadhší práci se softwarem.

Plocha VMENU vychází z Microsoft Office což Vám nabízí snadné uání. Všechny informace o voláníh a jejich průbězích jsou k dispozici na LAN.

VMENU WIN se skládá ze tří modulů:

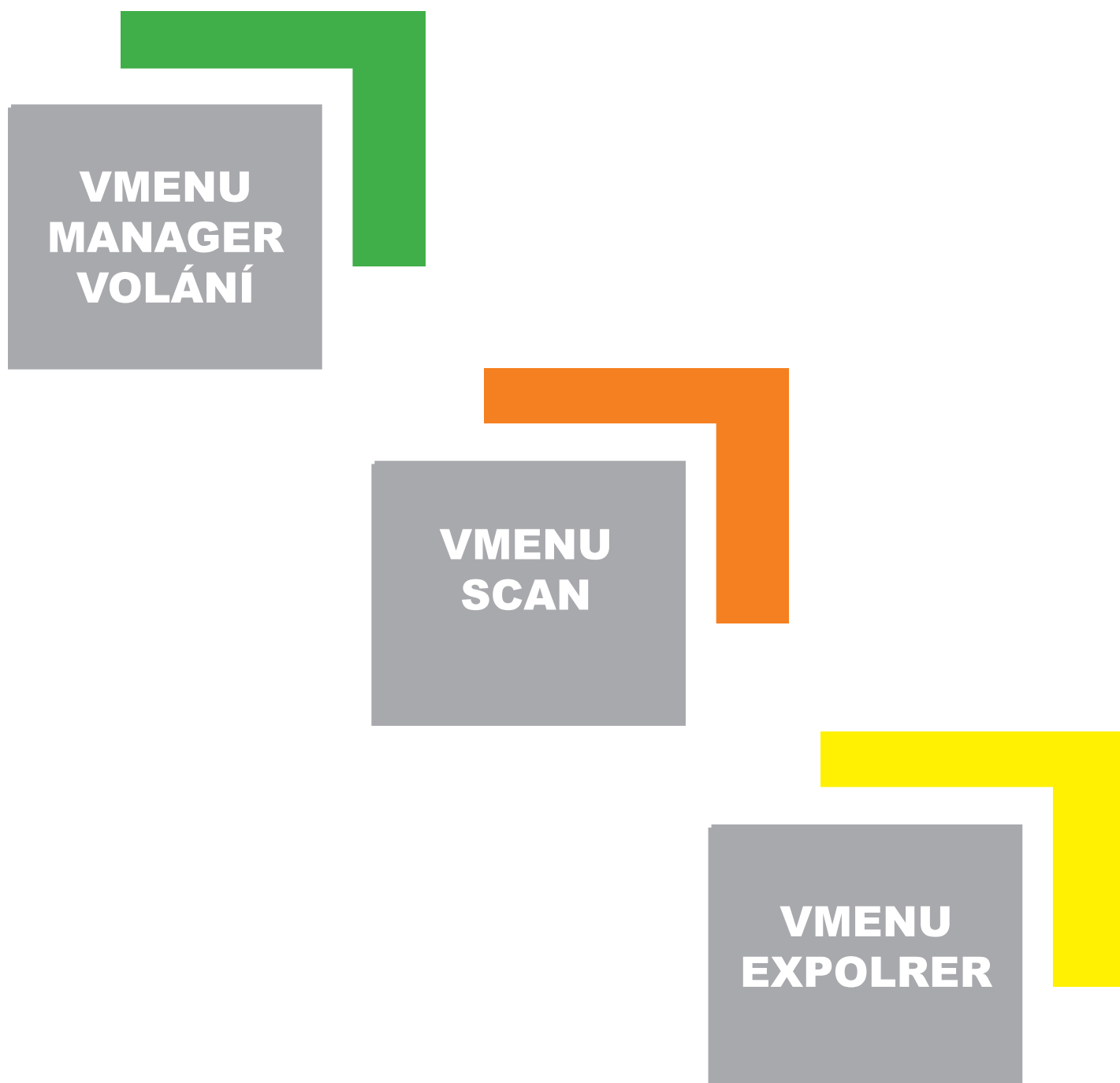

VMENU MANAGER VOLÁNÍ

VMENU Manager volání má následující features

- Schopnost práce v LAN, tj. software pracuje současně na několika počítačích
- Instalace a setup
- Administrace profilů
- Administrace obytné zóny
- Individuální úprava textů pagerů, událostí, textů displejů, pokojů a odstupňování priorit
- Export do Excel, Word, HTML, XML, CSV a textových dat:
- Vyhodnocení volání:
 - Individuální vyhodnocení
 - Volací časy detailně
 - Volací časy a přítomnost
 - Sled volacích časů
- Protokolování nouzových volání
- Vytvoření volacích skupin a volacích profilů
- Zřízení přesměrování volání
- Uložení dat
- Předání dat do dokumentace o péči
- Definice tiskových výstupů (reporty)



VMENU SCAN

Softwarová komponenta VMENU SCAN zaznamenává data a volání ze skupinových ústředen a předává je dál na displeje, pagery nebo do zařízení pro vyhledávání osob (paging).

VMENU SCAN má následující vlastnosti:

- SQL Databanka (MSDE), max. 5 klientů
- Protokolování vyslaných volání (pager / DECT)
- Mechanismus zabezpečení
 - Akustické varovné hlášení při nevyslání události
 - Hlášení při poruše skupinové ústředny
 - Akustické varovné hlášení při poškozených tlačítkách / světlech
 - Akustické varovné hlášení při chybném přiřazení profilů



VMENU EXPLORER

V mnoha pečovatelských zařízeních není volací ústředna SEV04 umístěna společně s PC ošetřujícího personálu. Ke sledování volání a změnám nastavení systému byl vyvinut VMENU EXPLORER.

S tímto softwarem můžete ve Vašem počítači sledovat průběhy volání v zařízení. Pomocí počítačové sítě ve Vašem zařízení může být každé PC spojeno s volací ústřednou SEV04.

The logo for VMENU EXPLORER consists of a grey square with the text 'VMENU EXPLORER' in white, bold, uppercase letters. To the right of the square is a yellow L-shaped graphic element.

**VMENU
EXPLORER**

VMENU EXPLORER má následující vlastnosti:

- Schopnost práce v LAN, tj software pracuje současně na několika počítačích
- Zobrazení aktuálních volání
- Akustické hlášení při vzniku volání
- Zobrazení volání ve formě tabulky
- Nastavení akustických hlášení pro každý druh volání

Upozornění: VMENU EXPLORER je optionální část a není součástí standardní verze

SEZNAM

1. Instalace VMENU WIN	Strana 8
2. Návod k použití VMENU manažera volání	Strana 11
Vmanager volání	Strana 12
1. Zřízení skupinové ústředny a pokoje	Strana 12
2. Zadání pageru	Strana 13
3. Zadání textu pageru	Strana 14
4. Zadání displejů	Strana 15
5. Zadání směny	Strana 16
6. Zadání profilu	Strana 17
7. Nastavení systému	Strana 24
8. Přesměrování volání	Strana 31
Vyhodnocení	Strana 31
9. Historie volání technicky	Strana 32
10. Historie volání	Strana 33
11. Individuální vyhodnocení	Strana 35
12. Protokol nouzových volání	Strana 37
13. Vyhodnocení volání	Strana 38
14. Přítomnosti	Strana 40
15. Detail volacích časů	Strana 42
Správa	Strana 44
16. Správa pokojů	Strana 46
17. Pager	Strana 47
18. Texty pagerů	Strana 49
19. Displej	Strana 50
20. Směny	Strana 51
21. Profily	Strana 52
22. Skupinové ústředny	Strana 53
23. Nastavení systému	Strana 55
24. Údaje zákazníků	Strana 56
25. Volací skupiny	Strana 62
26. Přesměrování volání	Strana 63
27. SQL-Setup	Strana 65
28. Tabulka jazyků	Strana 67
Informace systému	Strana 68
Konfigurace	Strana 69
29. Kontrola konfigurace	Strana 70
30. Uložení konfigurace	Strana 70
31. Vkládat konfiguraci	Strana 72
32. Dokumentace konfigurace	Strana 74
33. Rozhraní	Strana 75
	Strana 78
3. VSCAN Návod k použití	Strana 79
4. VExplorer Návod k použití	Strana 83
Impressum	Strana 85

1. Instalace VMENU WIN


Ukončete všechny programy a vložte CD VMENU do CD jednotky. Setup se spustí automaticky. Ukáže se následující okno: Po instalaci bude spuštěn znovu počítač.



Výběr jazyku

V prvním kroku vyberte jazyk, ve kterém má být prováděna instalace.


K dispozici jsou němčina a angličtina. Pro pokračování instalace po výběru jazyka klikněte na tlačítko **Dále**.

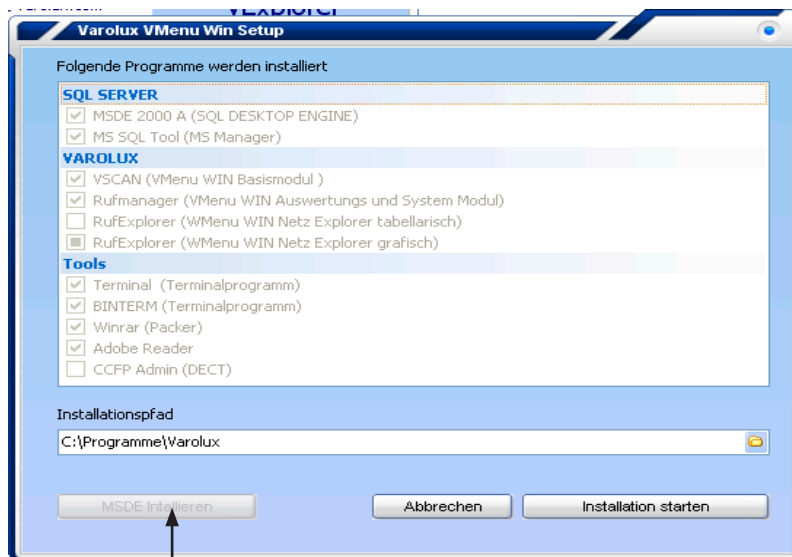

MSDE instalovat

Software zkontroluje, zda už byl instalován na počítači MSDE, bezplatný SQL-server. Když už existuje MSDE, tak se ukáže tlačítko **MSDE instalovat** v deaktivní formě. To znamená, že není možné ho ovládat. Tím je dvojitá instalace MSDE nemožná. Na obrázku vidíte deaktivní formu tlačítka **MSDE instalovat**. Jestli neexistuje žádná MSDE, klikněte pro spuštění instalace na tlačítko **MSDE instalovat**.

Po instalaci MSDE restartujte PC

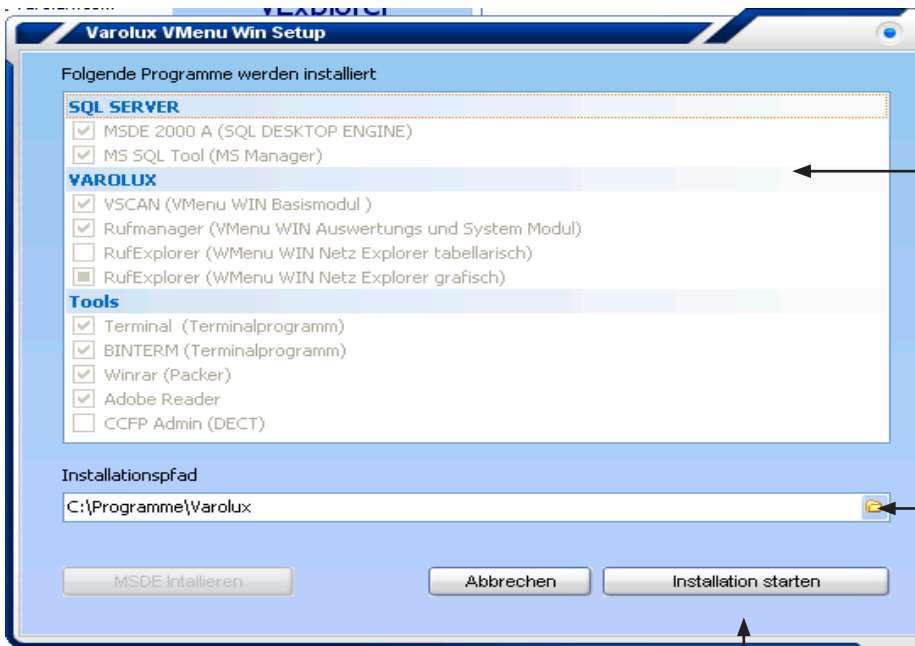


Výběr cesty instalace

Instalaci spustit

Po instalaci MSDE určíte cestu instalace programu. Stiskněte na tlačítko **Instalace spustit**.

Po instalaci ukončíte instalační program a zavřete ho. Na PC by se mělo ukázat spojení k Vmanageru volání, pokud ne, spusťte program výběrem ze seznamu programů. Po prvním startu VManageru volání se ukáže okno pro SQL-Setup.

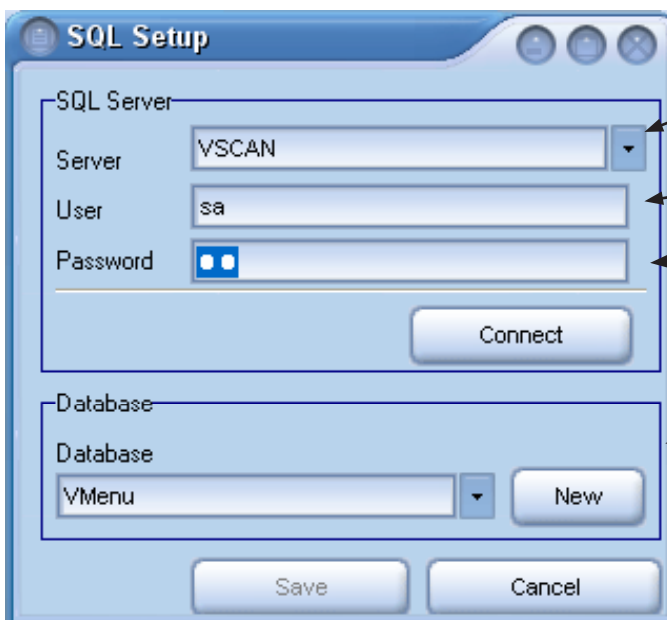

Název instalovaného SQL-Server

Uživatel SQL-Kont

Heslo SQL-uživatele

Název databáze

Údaji serveru, uživatele a kódu už jsou zadány a neměly být měněny.

Když už byl SQL-server instalován, obraťte se na administrátora, abyste dostali potřebná data. Pro nastavení spojení se serverem klikněte na tlačítko **Connect**. Při spojení se tlačítko **Save** ukazuje jako aktivní a může být používáno k uložení nastavení.

Po uložení SQL-nastavení se ukazuje okno pro zadání údajů klientů.



Kundenummer	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Zusatz	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
LKZ / PLZ / Ort	D <input type="text"/> <input type="text"/>
Telefonnummer	<input type="text"/>
Telefax	<input type="text"/>
Produkt Key	{D881D109-80A8-49C7-9F42-}

Verlassen Speichern

Zadejte do všech vstupních datových polí všechny data a potvrďte stisknutím na tlačítko **Uložit**.

Pozor: Pokud vstupní pole nebudou vyplněna, ukáže se výzva k doplnění dokud toto nebude kompletní.

Po uložení se otevře úvodní strana VManageru volání. Ve VManageru volání můžete nastavovat software podle individuálních požadavků zařízení, spravovat a vyhodnocovat volací události.

2. VManager volání Návod k použití

The screenshot shows the VMENU WIN vRufmanager software interface. It is divided into several main sections:

- Rufumleitung (Call Forwarding):** A list of call forwarding rules on the left side.
- Auswertung (Evaluation):** A central panel with buttons for 'Rufhistorie technisch', 'Detail Rufzeiten', 'Rufhistorie', 'Einzeluswertung', 'Notrufprotokoll', 'Auswertung Rufe', and 'Anwesenheiten'.
- Verwaltung (Administration):** A right-side panel with buttons for 'Zimmerverwaltung', 'Systemeinstellungen', 'Pager', 'Kundendaten', 'Pagertexte', 'Rufgruppen', 'Display', 'Rufumleitung', 'Schichten', 'SQL Setup', 'Profile', 'Gruppenzentralen', and 'Sprachtabelle'.
- Systemeinstellungen (System Settings):** A section below the main panels showing application paths and system parameters like Server, Datenbank, Protokoll, and Lizenzstatus.
- Installation:** A section at the bottom left with a list of steps:
 1. Anlegen der Gruppenzentralen und Zimmer
 2. Pager eintragen
 3. Pagertexte eintragen
 4. Display eintragen
 5. Schichten eintragen
 6. Profile eintragen
 7. Systemeinstellungen
- Konfiguration (Configuration):** A section at the bottom right with buttons for 'Konfiguration prüfen', 'Schreibtest', 'Konfiguration sichern', 'Konfiguration laden', and 'Konfiguration dokumentieren'.

Callouts on the right side of the image point to specific features:


- Přesměrování volání (Call Forwarding):** Points to the 'Rufumleitung' section.
- Vyhodnocení (Evaluation):** Points to the 'Auswertung' section.
- Správa (Administration):** Points to the 'Verwaltung' section.
- Nastavení systému (System Settings):** Points to the 'Systemeinstellungen' section.
- Instalace (Installation):** Points to the 'Installation' section.
- Konfigurace (Configuration):** Points to the 'Konfiguration' section.

V prvním kroku budou zadány vlastnosti volacího zařízení v oblasti instalace. K tomu dodržujte postup instalačních kroků v předepsaném sledu.

Instalace VManageru volání

Postupujete v uvedeném sledu. Při instalaci vidíte před jednotlivými kroky žluté varovné znamení, které signalizuje neúplné zadání dat. Kompletní zadání je signalizováno zeleným háčkem.

1. Zřízení skupinových ústředn a pokojů

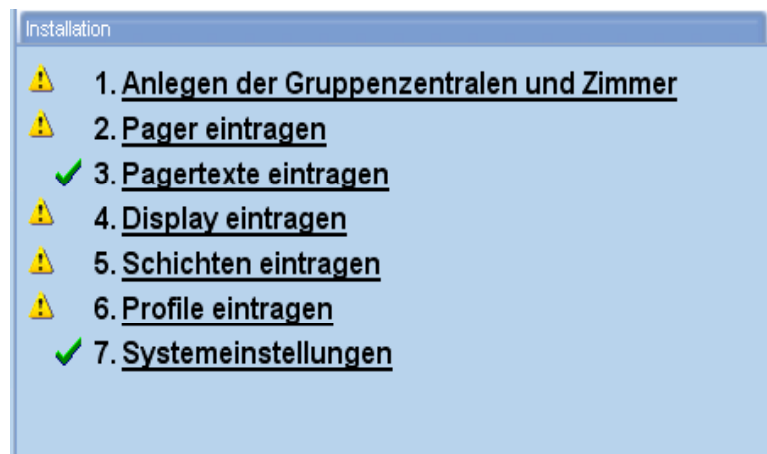


7 kroků instalace

Klikněte v oblasti instalace na první bod **Zřízení skupinové ústředny a pokoje**.



Nová skupinová ústředna

Klikněte na tlačítko **Nová skupinová ústředna** a začnete se zřízením skupinové ústředny. Ukáže se okno: Zde запиšte číslo skupinové ústředny a příslušný počet pokojů. Potvrďte a uložte data kliknutím na tlačítko **OK**.

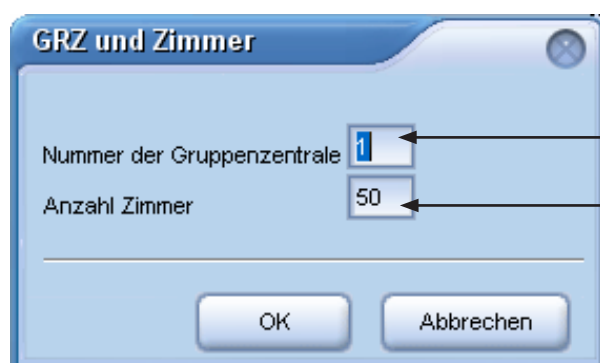


Číslo skupinové ústředny

Pokoje k skupinové ústředně


Po zadání skupinové ústředny zavřete okno skupinové ústředny.

2. Zadat pagery

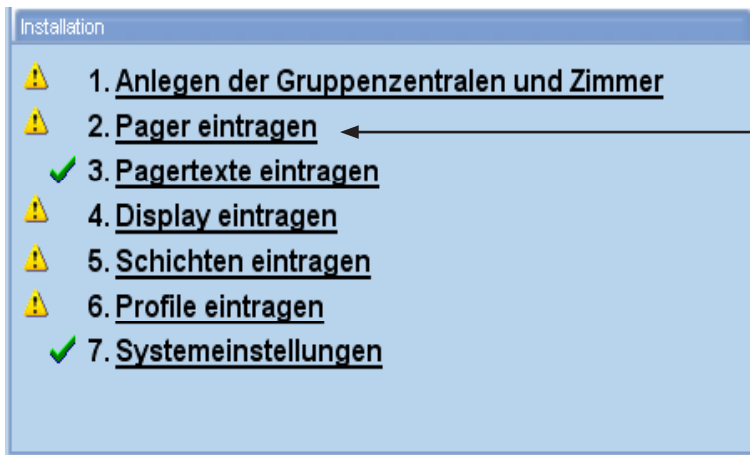

Pro zadání pagerů klikněte na druhý krok. Tato okna musíte vyvolat pouze tehdy, pokud je volací zařízení připojeno na paging nebo PBX.

Zřídít pagery

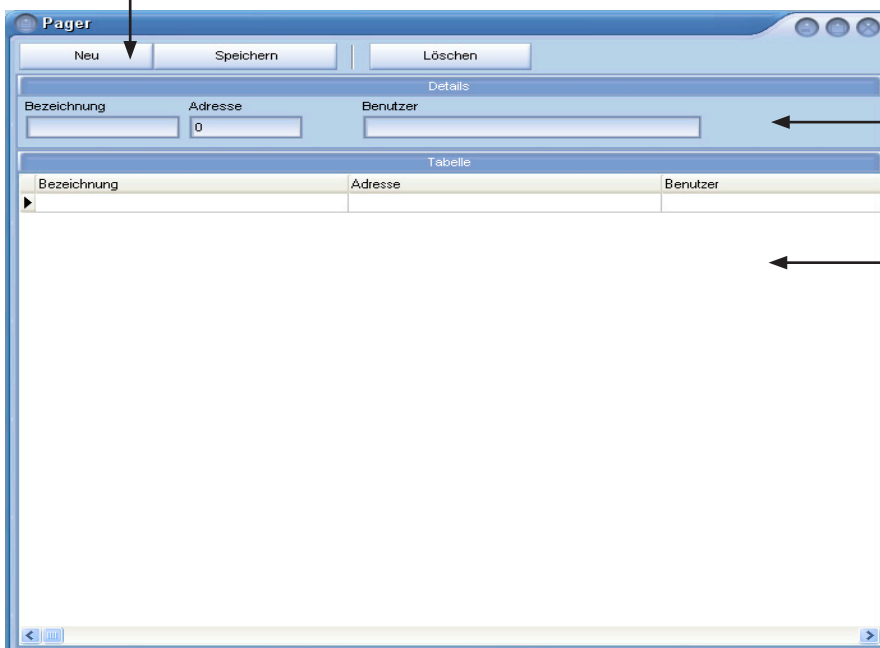

Pro zadání pageru klikněte na tlačítko **Nový**. Zadejte název pageru ve do vstupního pole označení, například OB1 pro přiřazení pageru nebo skupiny pagerů k obytné zóně 1. V poli adresa zadáte adresu pageru pro příslušný přístroj nebo skupinu pagerů. Eventuálně můžete pageru přiřadit uživatele.


Pro uložení zadání klikněte na tlačítko **Uložit**.

Opakujete postup až budou zadány všechny pagery.

Tlačítkem **Vymazat** můžete z tabulky pagerů opět pagery vymazat.


V tabulce pagerů vidíte všechny zadané názvy, adresy a případně uživatele. Zavřete okno před zadáním textů pagerů v dalším kroku.

3. Texty pagerů zadat

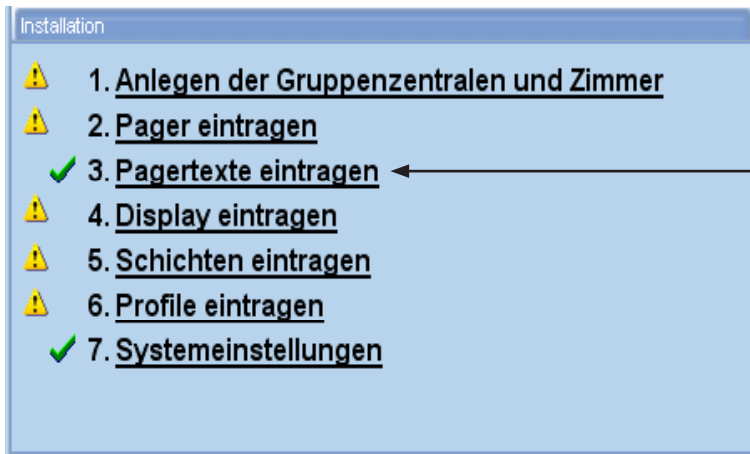

Texty pagerů zadat

Klikněte na třetí krok **Texty pagerů zadat**. Ukáže se následující okno:

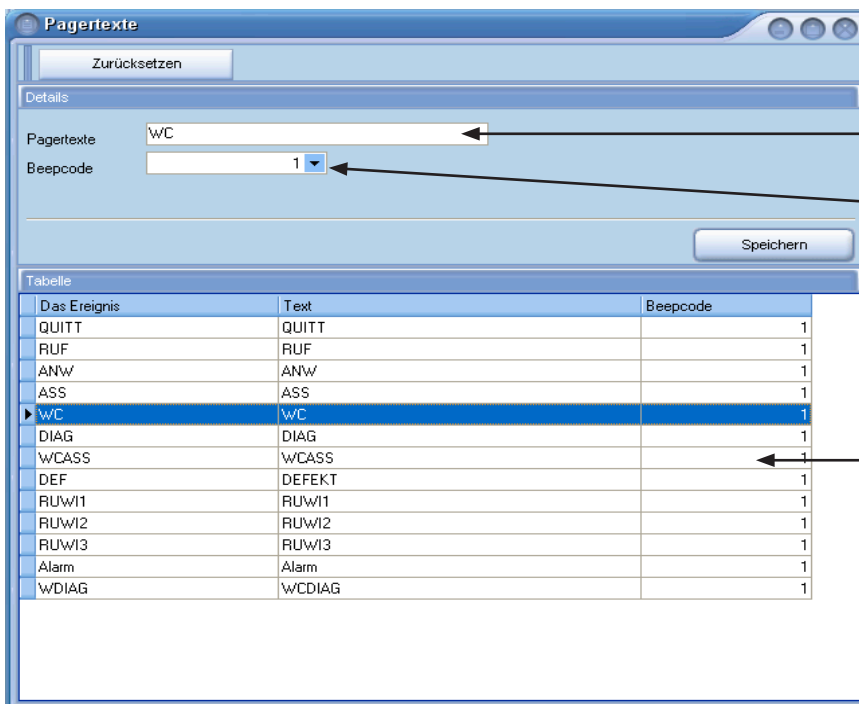

Texty pagerů zadat

Výběr Beepcodů

Událost a příslušný text pageru

Pro individuální úpravu aktuálního textu události a/nebo Beepcode vyberte v tabulce událost. Označte v tabulce požadovanou událost a změňte text pro událost volání ve vrchním vstupním datovém poli texty pagerů. Potvrďte změnu zadání stisknutím na tlačítko **Uložit**.


Pokračujete stejně, dokud texty pagerů neodpovídají Vaším požadavkům. Beepcode je volací tón pageru / mobilu.

Při Beepcode se musí dát pozor na to, že ne každý Beepcode bude zařízením paging nebo PBX podporován.

Informujte se o kompatibilitě paging / PBX s Beepcodey.


Pozor: Nastavte beepcode dle TK-zařízení a / nebo pagerů

4. Zadat displej

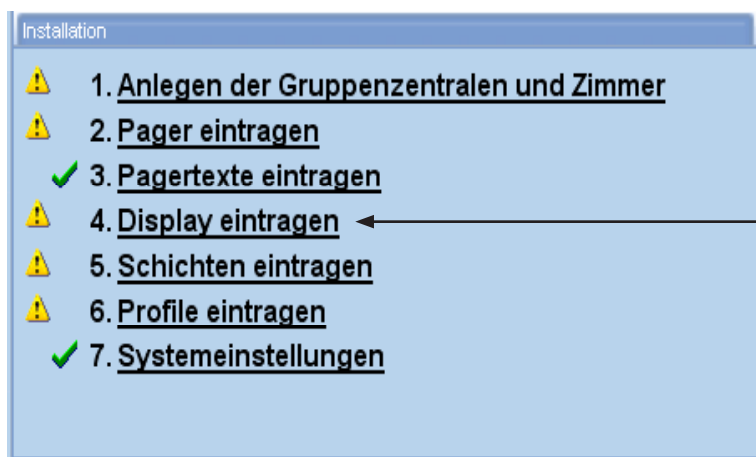

Zadat displej

Ve čtvrtém kroku se konfiguruje displeje. Klikněte na krok **Zadat displej**. Ukáže se následující okno:

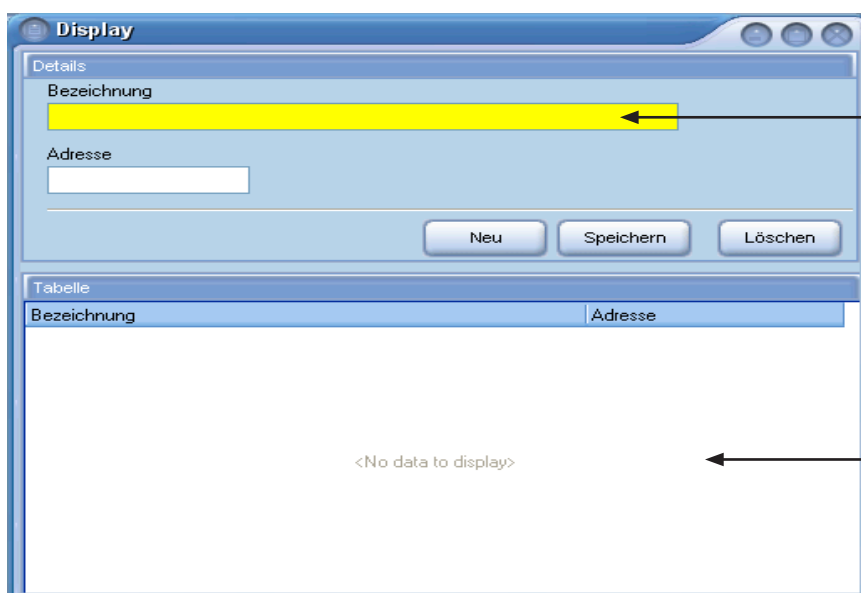


Zadat displej

Tabulka
displejů


Pro zřízení displeje klikněte na tlačítko **Nový**. Ve vstupních datových polích **Název a Adresa** zapište název a adresu. V poli **Adresa** zadejte adresu displeje. Může to být individuální nebo skupinová adresa, podle požadavků Vašeho zařízení. Opakujete postup dokud nejsou zadány všechny displeje. Zadané displeje se ukazují v tabulce displejů.

Pozor: Pokud jste vybrali možnost data Displeje do skupinové ústředny vysílat, v musíte zadat displeje s adresami těchto skupinových ústředn.

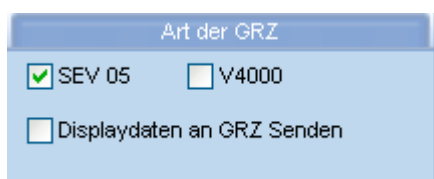

Nastavení systému (viz. strana 25)


5. Zadat směny

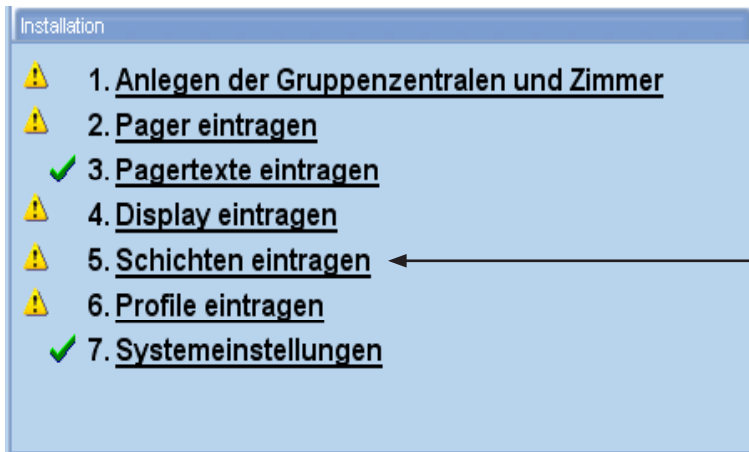

Zadat směny

V pátém kroce zadáte směny. Klikněte na krok **Zadat směny** a otevře se následující okno:

Zadat směny, změnit a vymazat

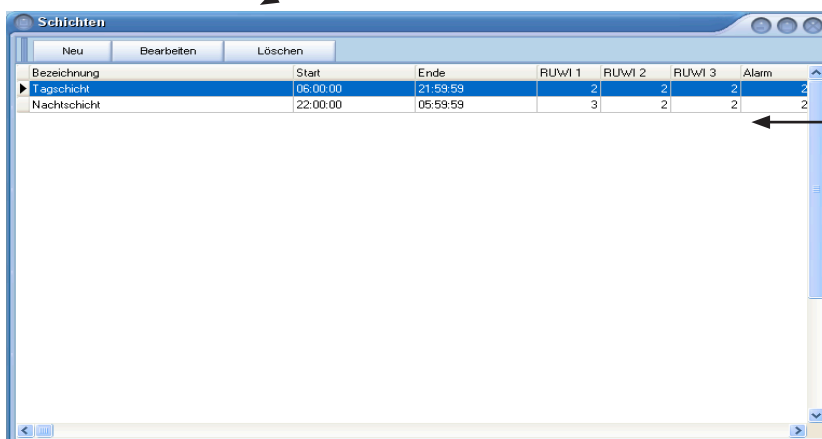

Tabulka směň

Pro zřízení směny klikněte na tlačítko **Nový** a otevře se okno pro zadání směny.



Zadat směny


Opakování volání a alarm

V poli název zadejte název pro směnu, např. Noční směna.

K této směně запиšte začátek a ukončení. Nyní můžete určit časy opakování volání do spuštění alarmu a časy alarmu. Přednastaveno je 2 minuty, ale může to být změněno.


Po zadání klikněte na tlačítko **Uložit**. Opakujete postup dokud všechny směny nejsou zadány.

6. Zadat profily

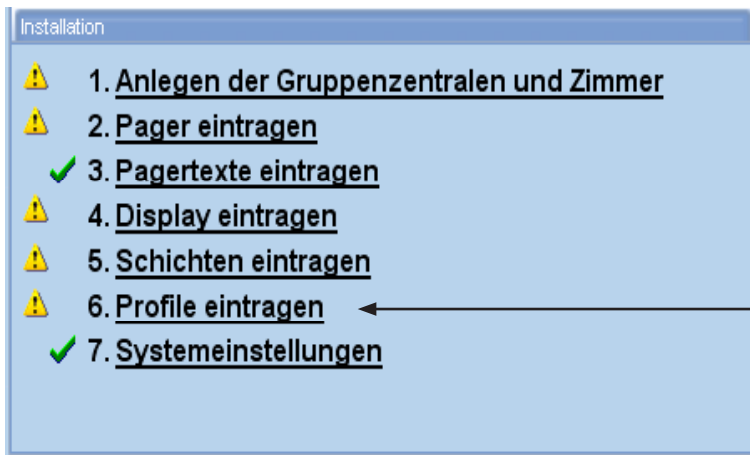

Zadat profily

V šestém kroku zapište profily. Klikněte na krok **Zapsání profilů** a ukáže se následující okno:

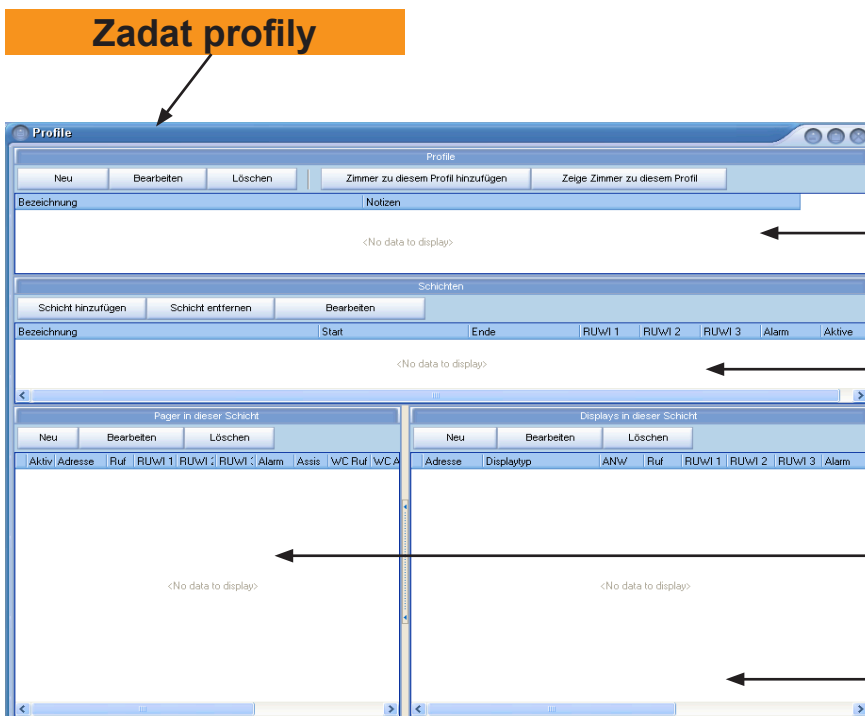

Zadat profily


Tabulka profilů

Směny k profilu

Pager k profilu

Displej k profilu


Pro zřízení profilu klikněte na tlačítko **Nový**. Ukáže se okno detail profilu:

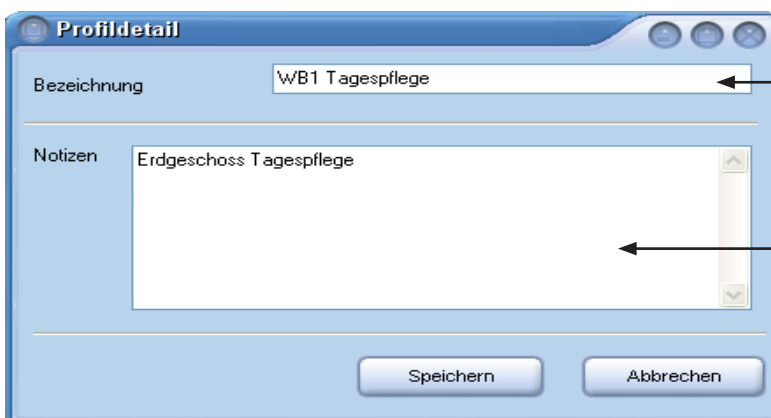


Název

Poznámky

Do vstupního pole název zapište název pro ten profil. Eventuálně můžete zadat poznámky k profilu. Potvrďte Vaše zadání stisknutím tlačítka **Uložit**. Opakujete postup dokud nejsou zřízeny všechny profily.

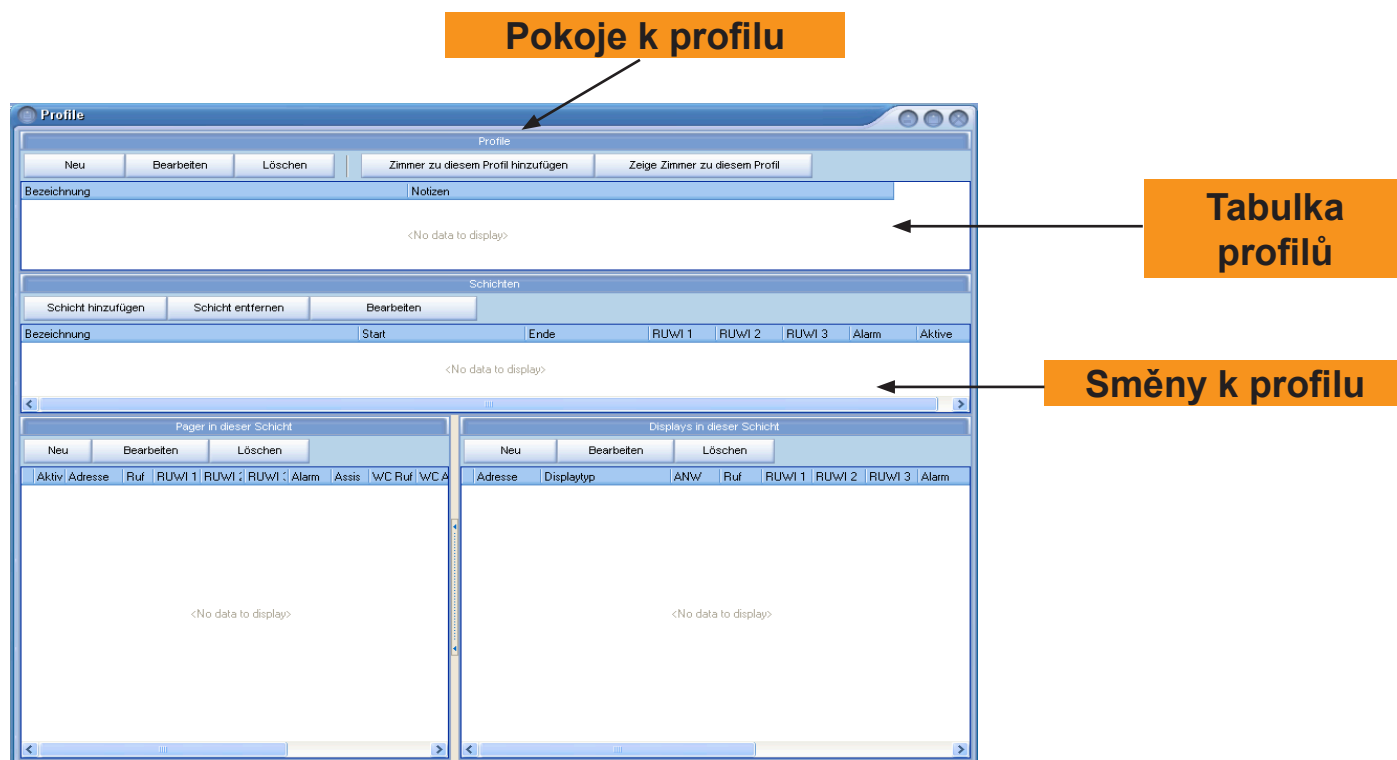

Klikněte na tlačítko **Přidat pokoje k tomu profilu**. Ukáže se tabulka pokojů:

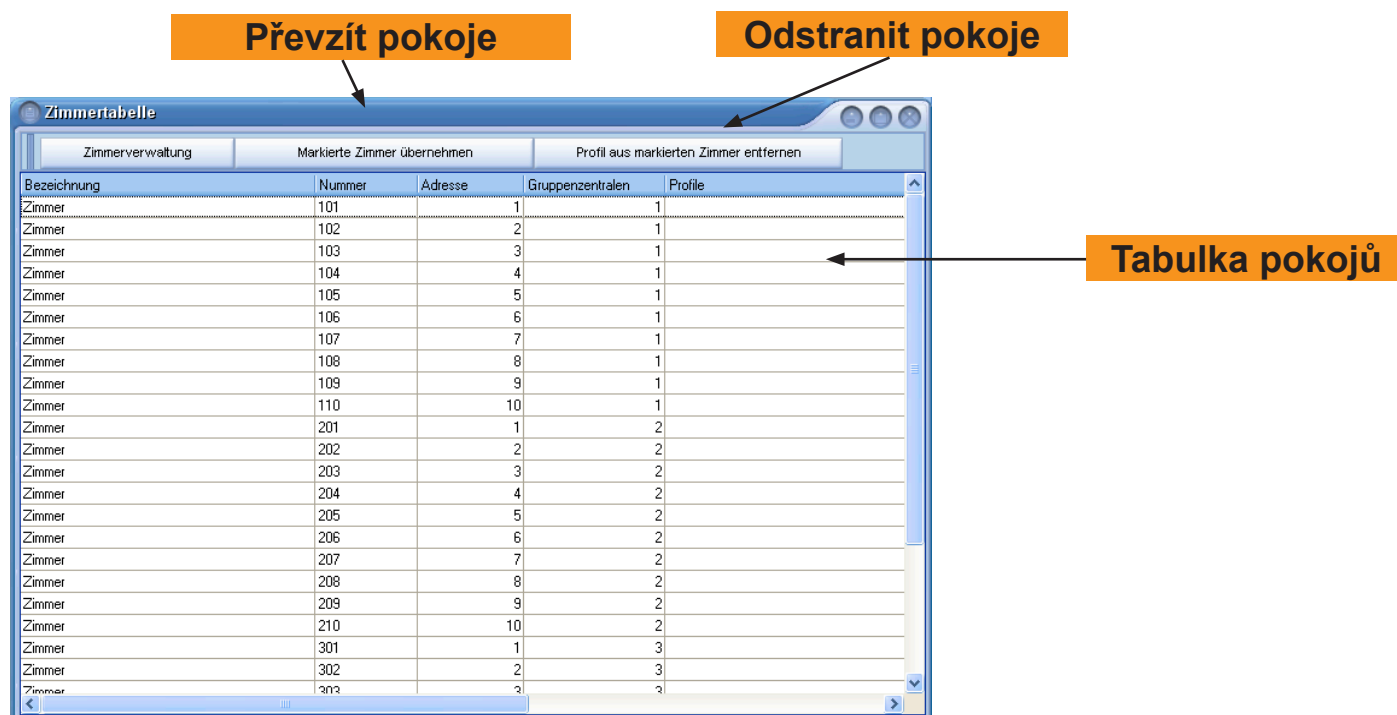

Pro výběr pokojů označte v tabulce pokojů příslušný pokoj, přidržení tlačítka CTRL lze označit další pokoje.

Převzít označené pokoje

Označené pokoje odstranit

Bezeichnung	Nummer	Adresse	Gruppenzentralen	Profile
Zimmer	101	1	1	1
Zimmer	102	2	1	1
Zimmer	103	3	1	1
Zimmer	104	4	1	1
Zimmer	105	5	1	1
Zimmer	106	6	1	1
Zimmer	107	7	1	1
Zimmer	108	8	1	1
Zimmer	109	9	1	1
Zimmer	110	10	1	1
Zimmer	201	1	2	2
Zimmer	202	2	2	2
Zimmer	203	3	2	2
Zimmer	204	4	2	2
Zimmer	205	5	2	2
Zimmer	206	6	2	2
Zimmer	207	7	2	2
Zimmer	208	8	2	2
Zimmer	209	9	2	2
Zimmer	210	10	2	2
Zimmer	301	1	3	3
Zimmer	302	2	3	3
Zimmer	303	3	3	3


Označené pokoje

Po označování klikněte na tlačítko **Převzít označené pokoje** pro přiřazení vybrané pokoje. Opakujete postup pro každý profil. Klikněte-li na tlačítko **Odstranit profil ze označených pokojů** tak bude přiřazení profilů z vybraných profilů odstraněno.


Bezeichnung	Start	Ende	RUW1	RUW2	RUW3	Alarm	Aktive
<No data to display>							

Změny k profilu


Po přiřazení pokojů k profilům, přiřadte ke každému profilu příslušné směny.

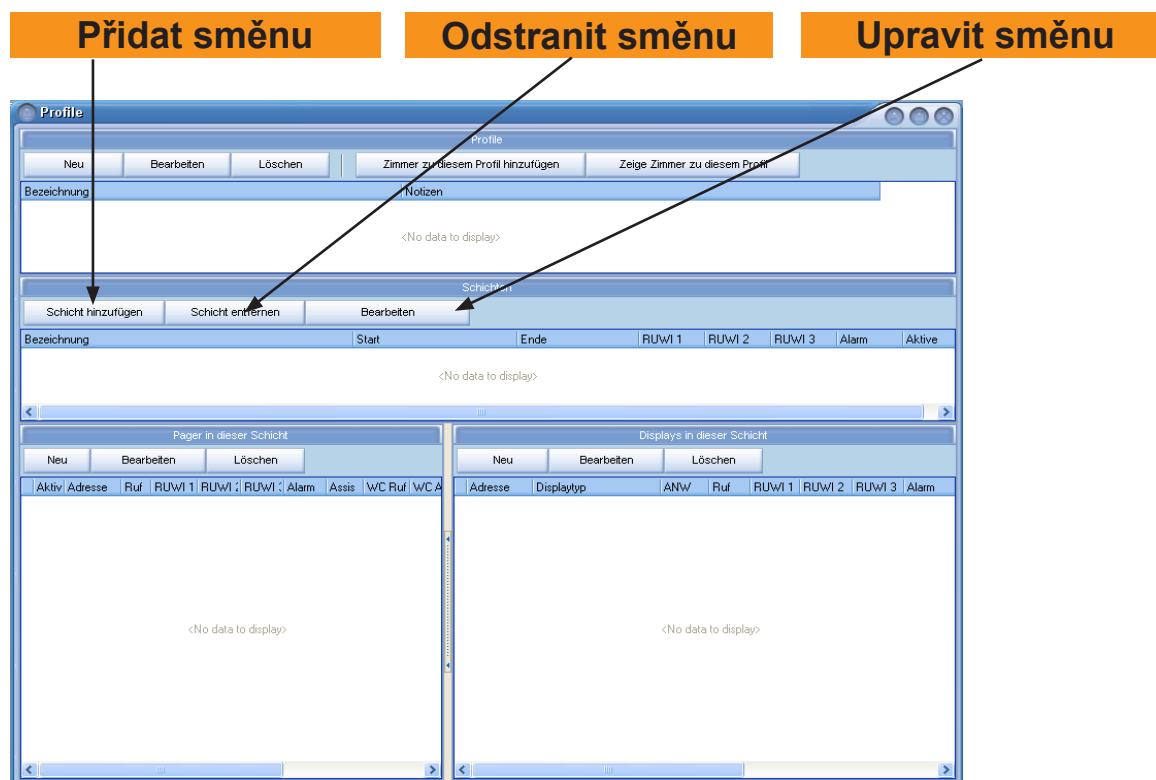

Pro přiřazení směny k profilu klikněte na tlačítko **Přidat směnu**. Ukáže se následující okno:

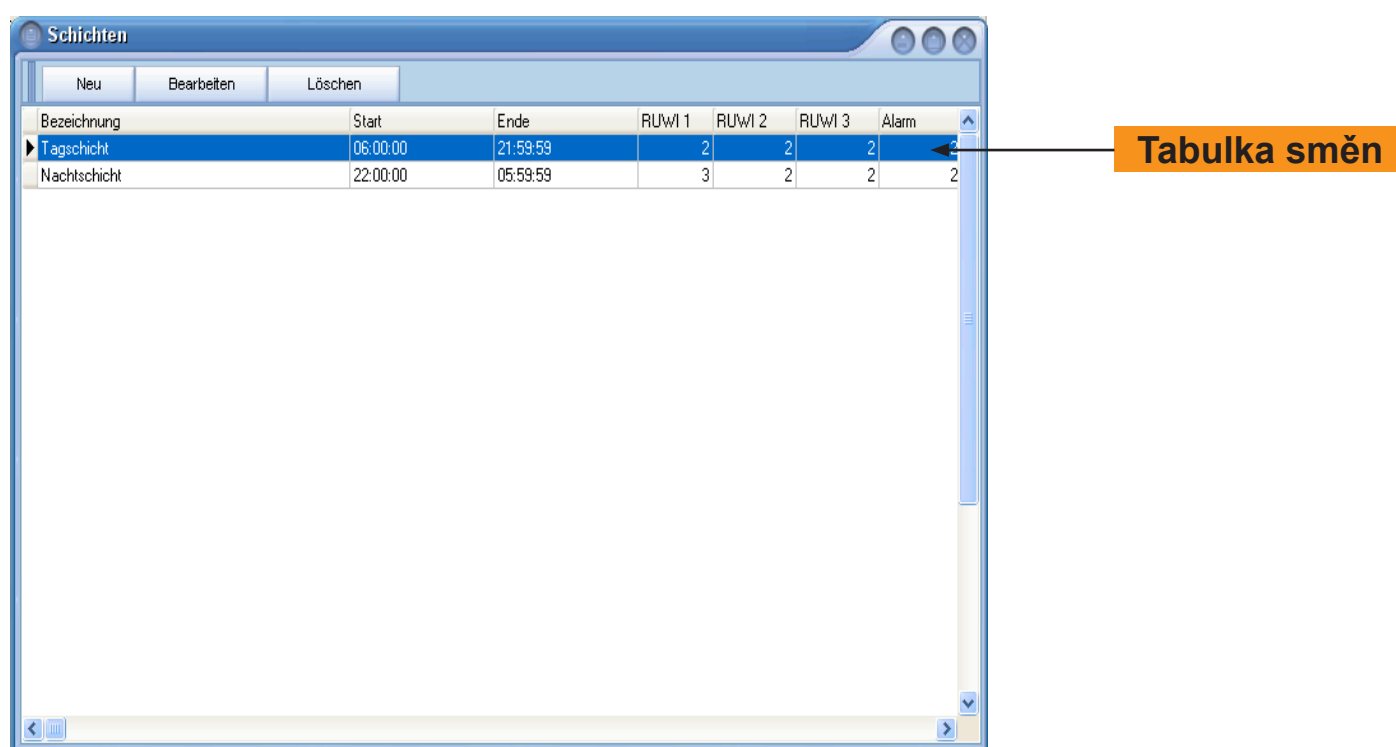


Wählen Sie eine Schicht aus, indem Sie auf diese in der Schichttabelle zweimal klicken. Jetzt ist diese Schicht dem zugehörigen Profil zugeordnet. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle entsprechenden Schichten in das Profil übernommen haben.

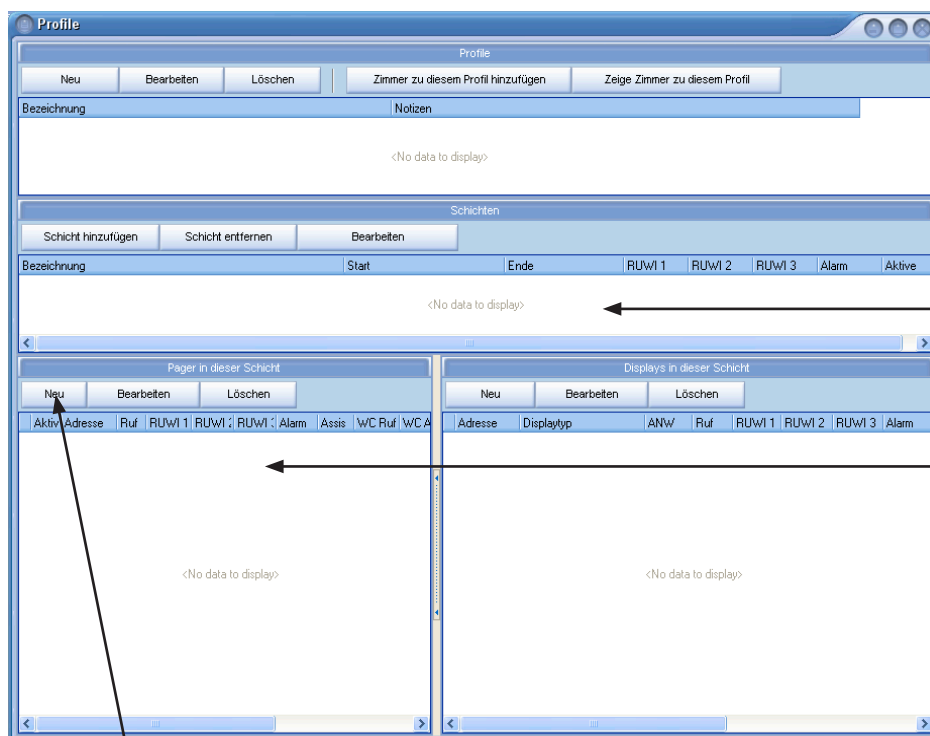

Směny

Přiřadit pagery k jedné směně


Pro přiřazení pageru k jedné směně, označte v oblasti směn příslušnou směnu a klikněte v levé oblasti pageru na tlačítko **Nový**. Ukáže se následující okno:

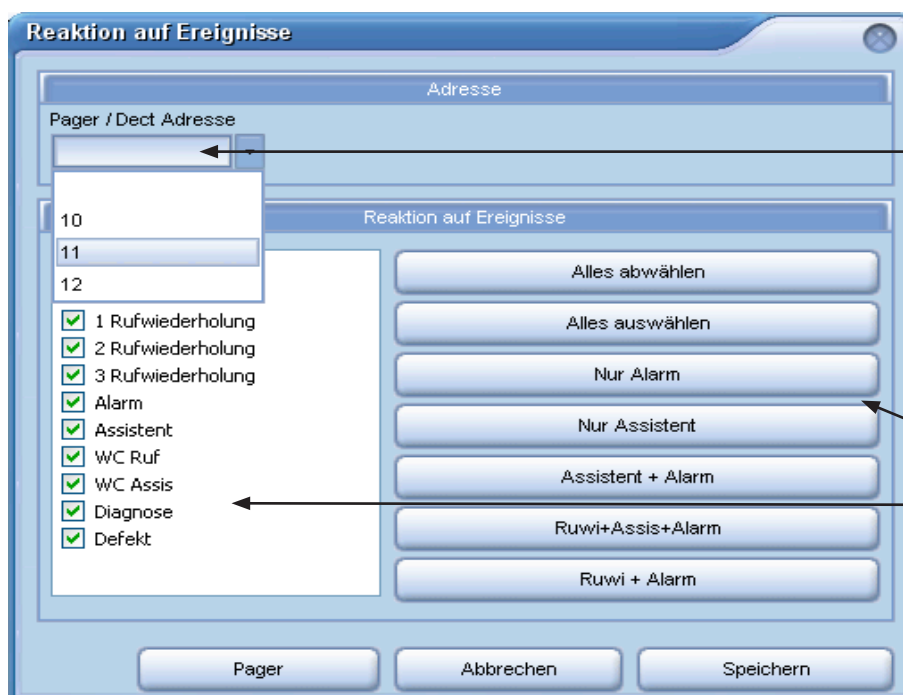

Výběr pagerů

Výběr Události


Vyberte přes výběr adresy pageru pager nebo skupinu pageru. Kliknutím na události budou tyto aktivované pro vysílání do pagerů. Zelený háček znamená, že událost bude zobrazována na tomto pageru. Ty události můžete také vybrat kliknutím na pravá tlačítka. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko **Uložit**. Opakujete postup dokud jste pro směnu nepřijali všechny pagery.

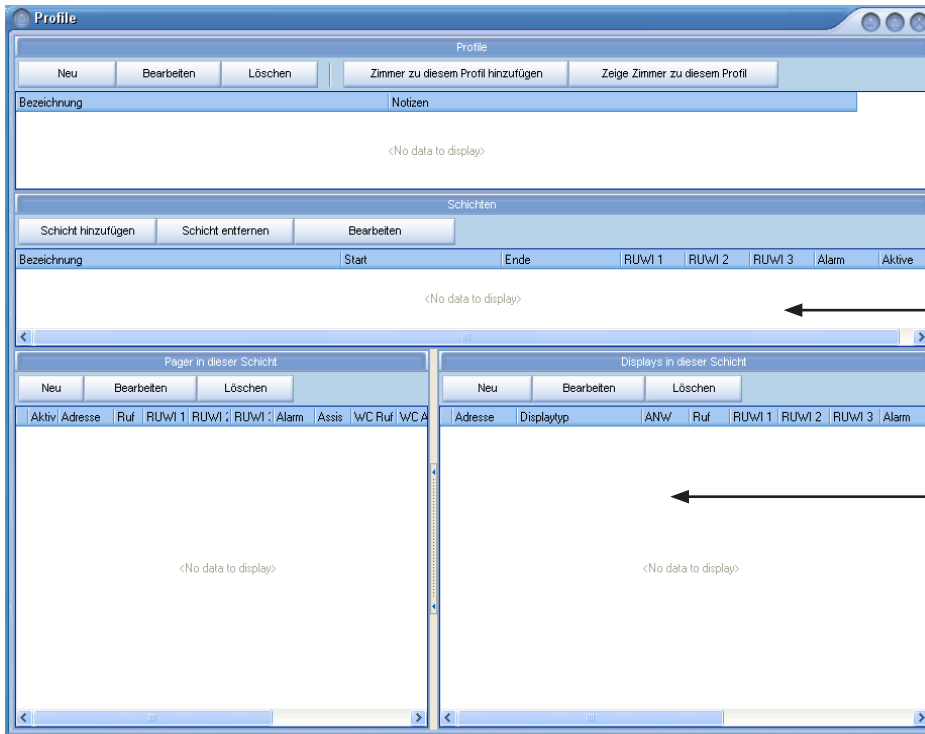

Směny

Přiřadit displeje směně

Pro přiřazení displeje směnám, označte nejdříve příslušnou směnu ze sektoru směn a po výběru směny klikněte v sektoru displejů na tlačítko **Nový**.

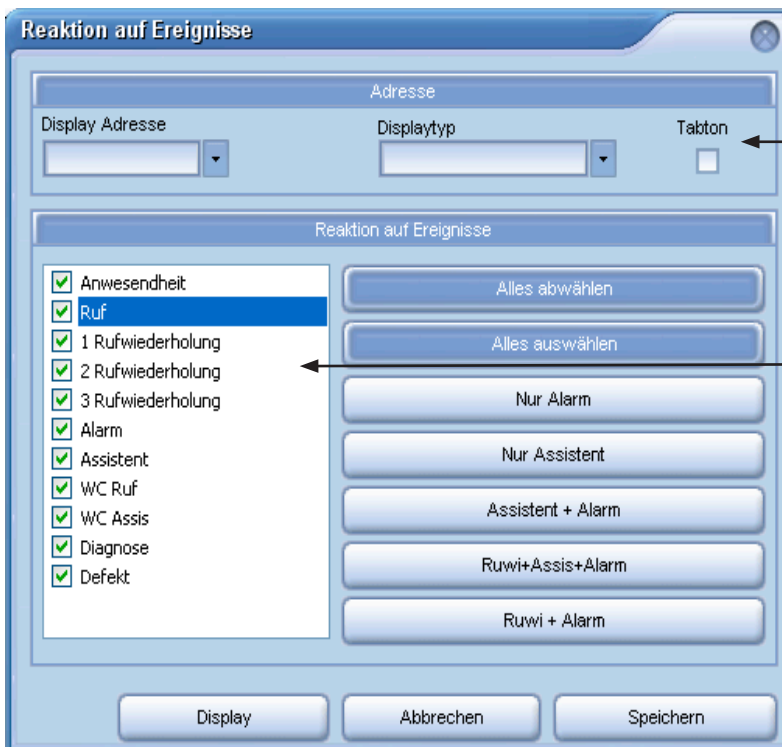

Výběr displejů a typů displeje


Výběr události

Vybírejte v horní oblasti okna pomocí adresy příslušný displej a vyberte pro tento displej příslušné typy displejů. Potom vyberte události, které mají být zobrazeny. Klikněte na tlačítko výběru nebo na tlačítka události. Zelený háček znamená, že událost bude zobrazená na tomto displeji. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko **Uložit**. Opakujte postup dokud jste nepřijali všechny displeje.


Opakujete přiřazení pagerů a displejů pro každou směnu jednoho profilu.

Softwarem máte možnost zřízené směny deaktivovat, to znamená, pokud je směna neaktivní, nebudou na příslušné pagery a / nebo Displeje posílány žádné události .

Pro deaktivace směn příslušnou směnu označte.

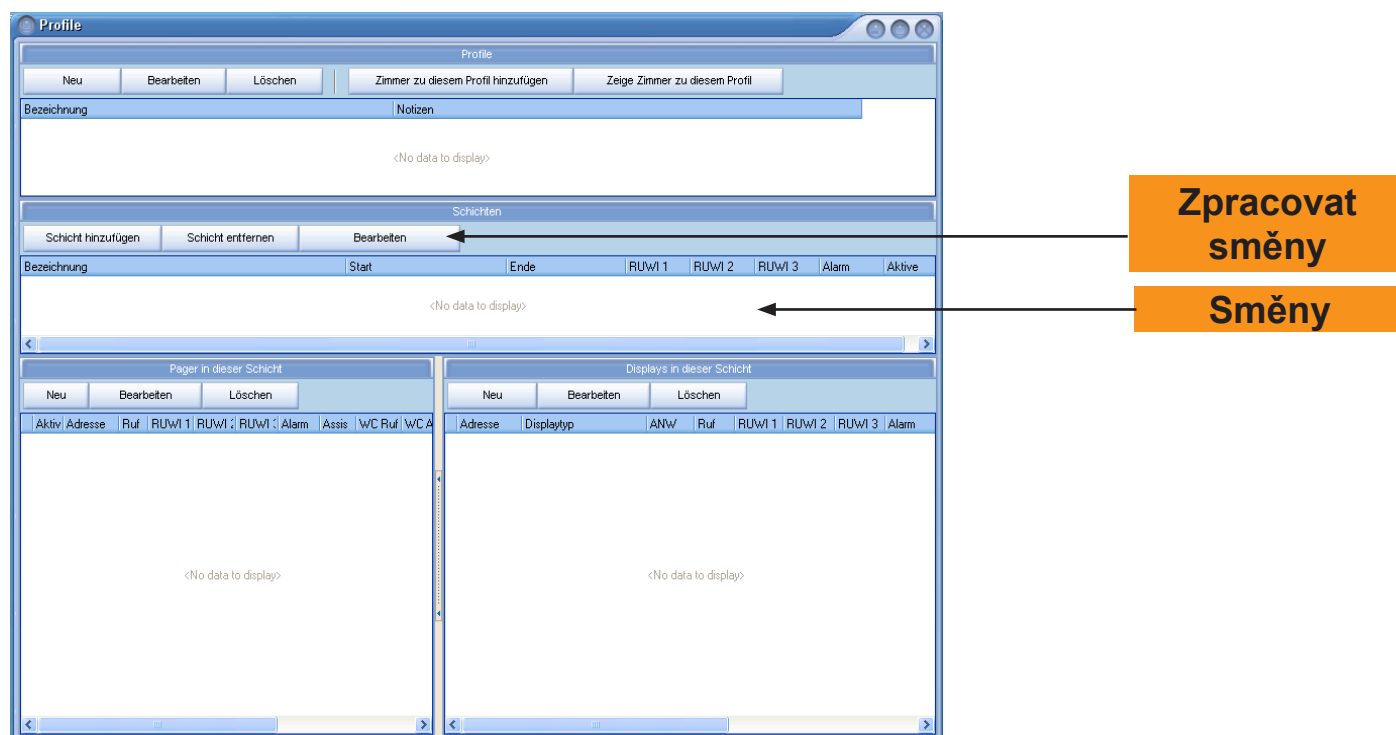


Po označení směny klikněte na tlačítko **Upravit** a otevře se následující okno:

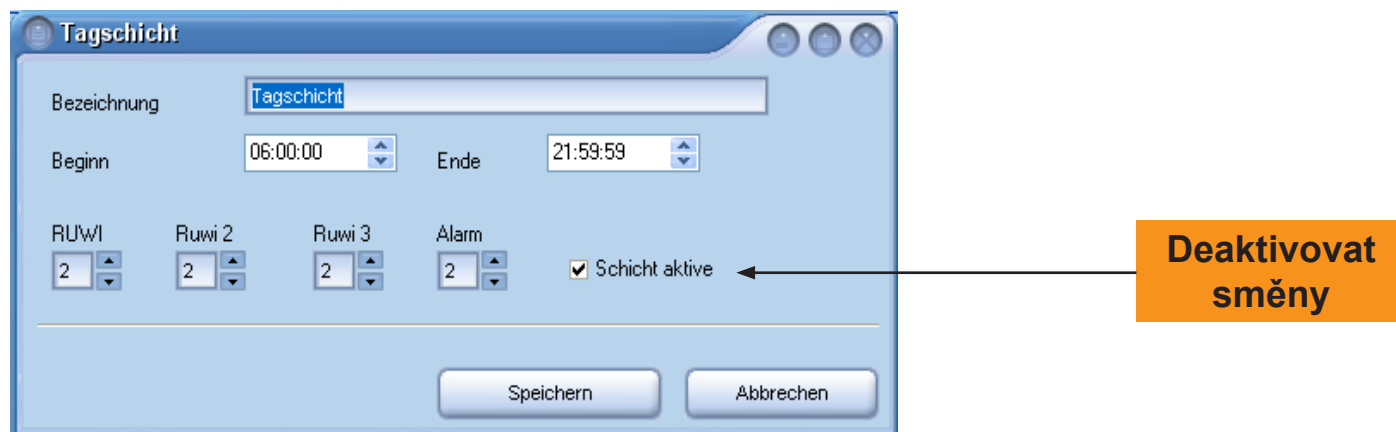

Pro deaktivaci směny klikněte na čtvereček výběru Směna aktivní a zelený háček nebude k dispozici. Směna teď není aktivní. Klikněte na tlačítko **Uložit** a Vaše nastavení bude uloženo.

7. Nastavení systému

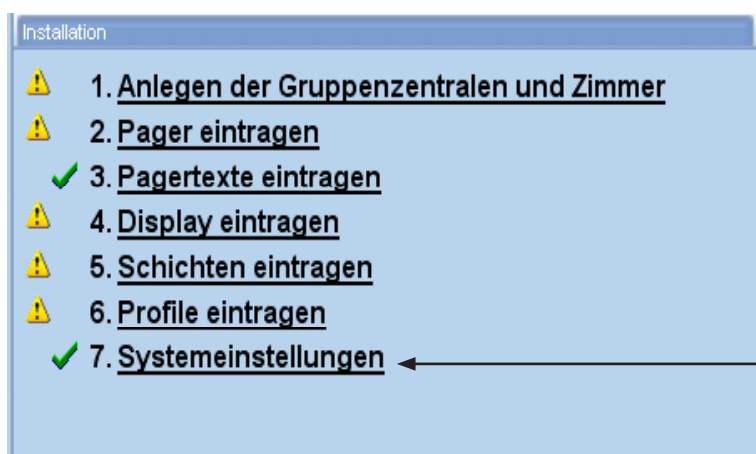


Nastavení systému

V sedmém kroku zapište nastavení systému. Klikněte na krok **Systemové nastavení** a následující okno se ukazuje:

Nastavení skupinové ústřeny

Nastavení paging / PBX

Nastavení displejů

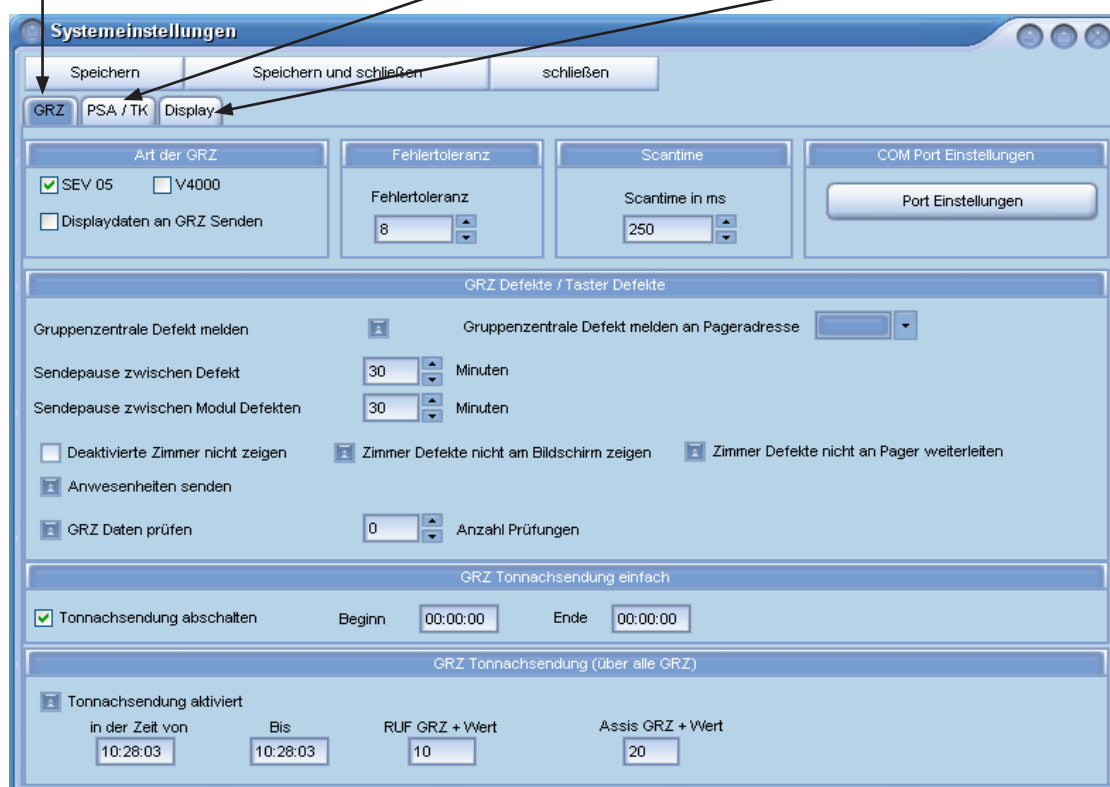

Nastavení skupinových ústředn

Nastavení skupinových ústředn


Druh skupinových ústředn

Data displejů vysílat do SK

Tolerance chyb

Nastavení portu


Scantime

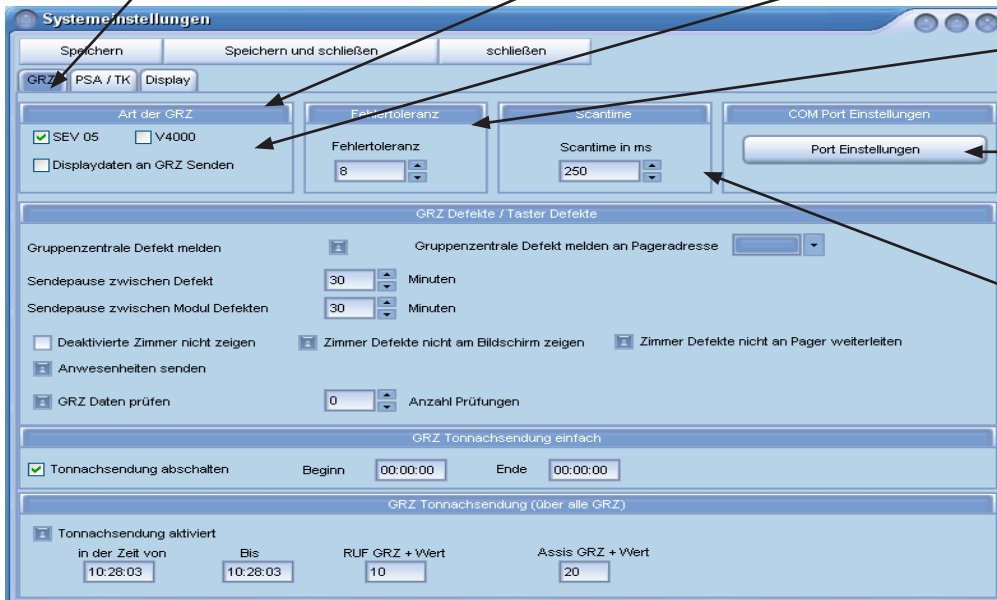

Vybete v okně skupinové ústředny Druh skupinových ústředn. Zelený háček ukazuje, který druh skupinových ústředn byl vybrán. Aktivujete-li opci Data displejů vysílat do SÚ, tak budou data vysílána přímo do skupinové ústředny a ne přes PC.

Tolerance chyb přístupu scanu je počet pokusů, přijmout data od skupinové ústředny, dříve než bude chyba skupinové ústředny vyslána.

Nastavení Scantime se provádí v milisekundách, to znamená, že v tomto intervalu budou skupinové ústředny dotazovány. Hodnotu můžete změnit, ale vysoká hodnota vede k zpomalení dotazování.

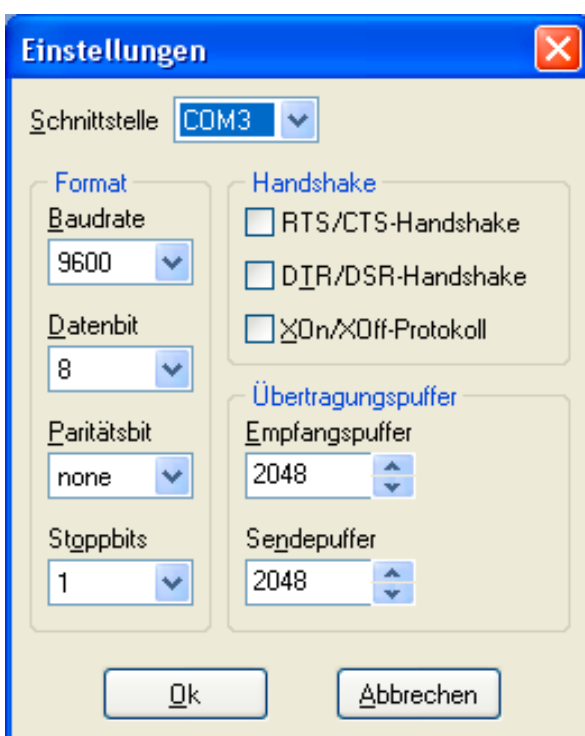

Kliknutím tlačítka **Nastavení Portu** se otevírá okno Nastavení. Zde budou nastaveny parametry sériového rozhraní.

Pro uložení klikněte na tlačítko **OK**.

Přednastavení:

Rozhraní: COM3

Rychlost: 9600

Databit: 8

Parita: none

Stopbit: 1

Skupinová ústředna Poruchu hlásit

Pauza vysílání mezi poruchami modulů

Pauza vysílání mezi poruchami

SÚ Poruchu hlásit na adresu pageru

GRZ Defekte / Taster Defekte

Gruppenzentrale Defekt melden

Gruppenzentrale Defekt melden an Pageradresse

Sendepause zwischen Defekt 30 Minuten

Sendepause zwischen Modul Defekten 30 Minuten

Deaktivierte Zimmer nicht zeigen

Anwesenheiten senden

GRZ Daten prüfen

Zimmer Defekte nicht am Bildschirm zeigen

Zimmer Defekte nicht an Pager weiterleiten

0 Anzahl Prüfungen

SÚ Data zkoušet

Přítomnosti vysílat

Deaktivované pokoje nezobrazit

Pokoje poruchy nezobrazovat na monitoru

Pokoje poruchy nepředat na pager

Skupinová ústředna Poruchu hlásit: Tato opce má být vždy aktivní, aby poruchy skupinové ústředny mohly být vysílány do pagerů.

Skupinová ústředna Poruchu hlásit na adresu pagerů: Výběr pageru, na který má být hlášena porucha skupinové ústředny.

Pauza vysílání mezi poruchami: Zadejte interval, v kterém má být vysláno hlášení poruchy na jeden pager.

Pauza mezi poruchami modulů: Zadejte interval, v kterém má být vysláno hlášení poruchy na jeden pager.

SÚ Data: Při aktivaci této opce se kontrolují zkouší ještě jednou data. Počet zkoušek nastavíte v poli výběru.

Přítomnost vysílat: Po spuštění volání předat přítomnost personálu na pager.

Deaktivované pokoje nezobrazovat: Deaktivované pokoje se nezobrazují.

Pokoje poruchy nezobrazovat na monitoru: Při aktivaci budou poruchy na monitoru nezobrazují.

Pokoje poruchy nepředávat na pager: Při aktivaci této opce se nepředávají pokojové poruchy na pager.

SÚ Následné vysílání tónu jednoduché

Následné vysílání tónu vypnout

Někdy se žádá, např. v noci, aby nedocházelo k následnému vysílání tónu. K tomuto účelu se může následné vysílání tónu vypnout. Aktivujete opci vysílání následného tónu vypnout kliknutím na čtvereček a zadejte interval pro vypnutí následného vysílání tónu.

Pozor: Ta funkce není k dispozici, pokud byla aktivována opce data displejů vysílat do SÚ.

SÚ Následné vysílání tónu přes všechny SÚ

Následné vysílání tónu aktivováno

Volání SÚ+hodnota


Asis SÚ+hodnota

Následné vysílání tónu aktivované: Při aktivaci této opce se děje následné vysílání tónu na všechny SÚ. Do vstupní pole zadejte zahájení a ukončení

Pozor:
Volání SÚ/+hodnota: Změny provádět výhradně servisními techniky TADiCOM.
Asis SÚ+hodnota: : Změny provádět výhradně servisními techniky TADiCOM


Nastavení pagingu / PBX

Nastavení pagingu / PBX

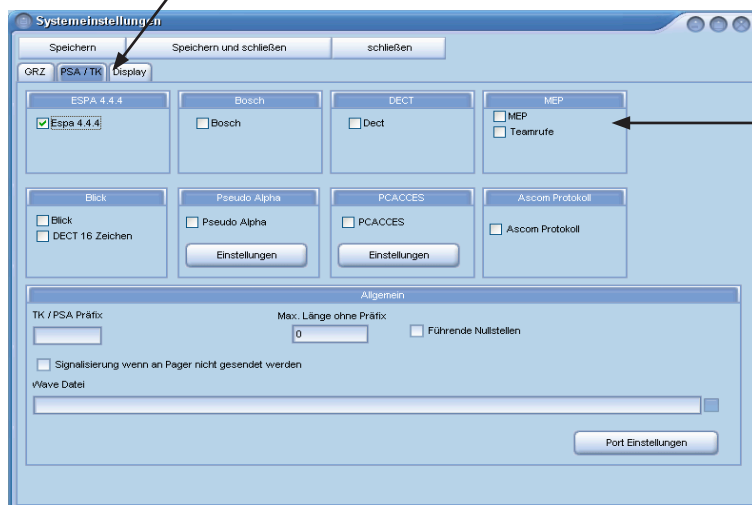

Protokoly


V okně protokolů vyberte příslušný protokol mezi zařízením a alarmovým serverem. Toto nastavení by měli provádět servisní technici. U protokolu MEP může být dodatečně aktivováno nastavení týmové volání. U protokolu Pseudo Alpha a PCACCES se ještě musejí provádět další nastavení. Nastavení se dozvíte od výrobce PBX.

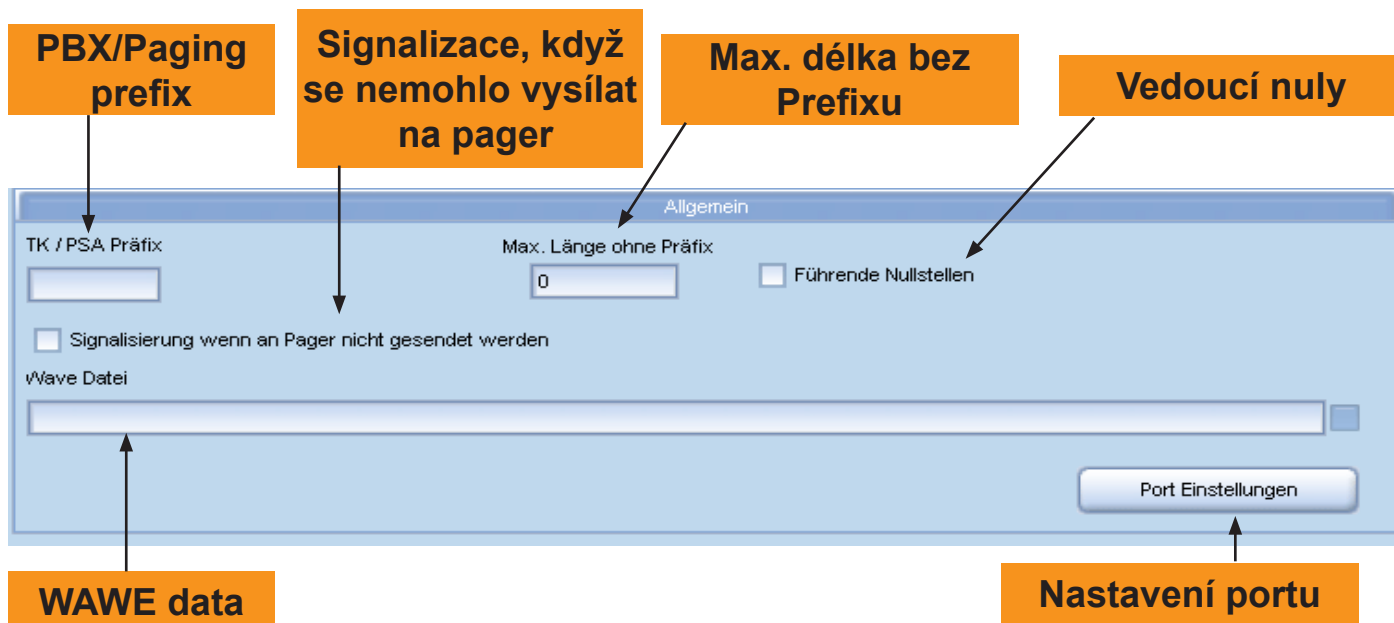

- PBX/Paging prefix:** Při použití prefixu se zapíše do vstupního pole.
- Max. délka bez prefixu:** Délka adresy pageru (počet znaků) bude napsána do vstupní pole.
- Vedoucí nuly:** Jsou-li pro adresu pageru potřeba vedoucí nuly, tak musí být opce aktivována.
- Signalizace, když se nemohlo vysílat na pager:** Pokud jsou připojeny do počítače reproduktory je při aktivace této opce možné přes ně vysílat akustické signály pokud událost nebyla vyslána na paging / PBX.
- Wave data:** Výběr souboru Wave pro akustickou signalizaci.
- Nastavení portu:** K nastavení sériové komunikaci mezi počítačem a pagingem /PBX: Tato nastavení by měli provádět výhradně servisní technici TADiCOM

Nastavení displejů

Nastavení displejů

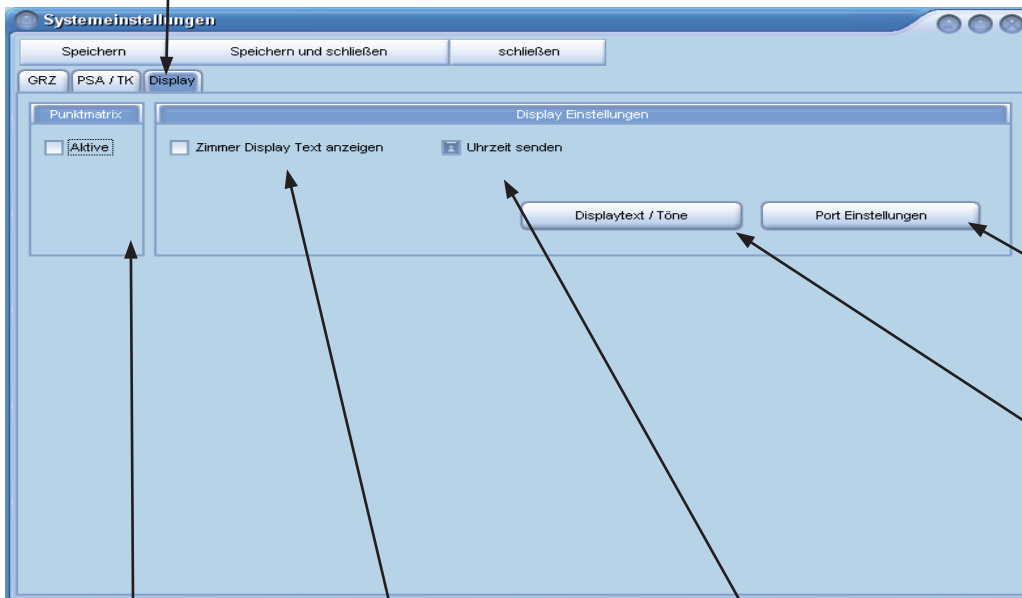

Nastavení portu

Text displeje / tóny

Bodová matice


Ukázat text pokojového displeje

Vysílat čas

Bodová matice: Při existenci displeje s bodovou maticí musí být tato opce aktivována.

Ukázat text pokojového displeje: Ve správě pokojů mohou být pro pokoj zapsány speciální texty displejů, při aktivaci této opce budou na displeji zobrazeny.

Vysílat čas: Pokud se nekoná žádná událost, bude při aktivaci této opce na displejích zobrazen čas.

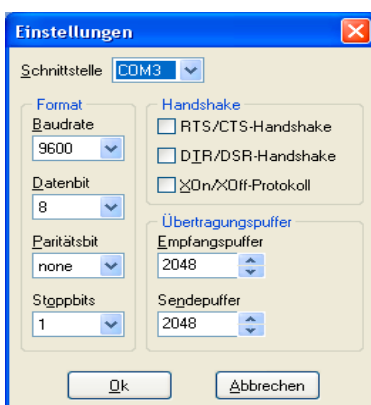

Pod nastavením portu se nastavují sérové parametry rozhraní pro komunikaci s displejem.

Pozor: Tato nastavení by měli provádět výhradně servisní technici TADiCOM.

Text displeje / tóny

Displayanzeige	Rufton	Ton erzwingen	Priorität
Ruf	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	3
Assistent	Rufton 2	<input type="checkbox"/> erzwingen	4
Anwesend	Kein Rufton	<input type="checkbox"/> erzwingen	2
WC Ruf	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	3
WC Assistent	Rufton 2	<input type="checkbox"/> erzwingen	4
Diagnose	Kein Rufton	<input type="checkbox"/> erzwingen	4
RUWl 1	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	3
RUWl 2	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	3
RUWl 3	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	3
Alarm	Rufton 3	<input type="checkbox"/> erzwingen	4
Defekt	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	1

Indikace textu displeje

Volací tón

Tón vynutit

Priorita

Indikace textu displeje: Vyberte zobrazení písmen pro příslušnou událost.

Pozor: Mohou být zobrazeny pouze písmena, která jsou zobrazitelná na 7-segmentovém displeji.

Volací tón: Můžete přiřadit událostem různé volací tóny.

Tón vynutit: V nastavení směn či profilů můžete vypnout vysílání tónu.

Zde nastavíte, že stejně bude vyslání tónu pro určitou událost vynuceno.


Priorita: Priorita vyslání displeje je při 4 nejvyšší a při 1 nejnižší.

Vyberte pro každou událost příslušnou prioritu s ohledem na zobrazení displeje. Události vyšší priority budou přednostně zobrazené


Nakonec uložte nastavení kliknutím na tlačítko **Uložit**.

8. Přesměrování

Přesměrování

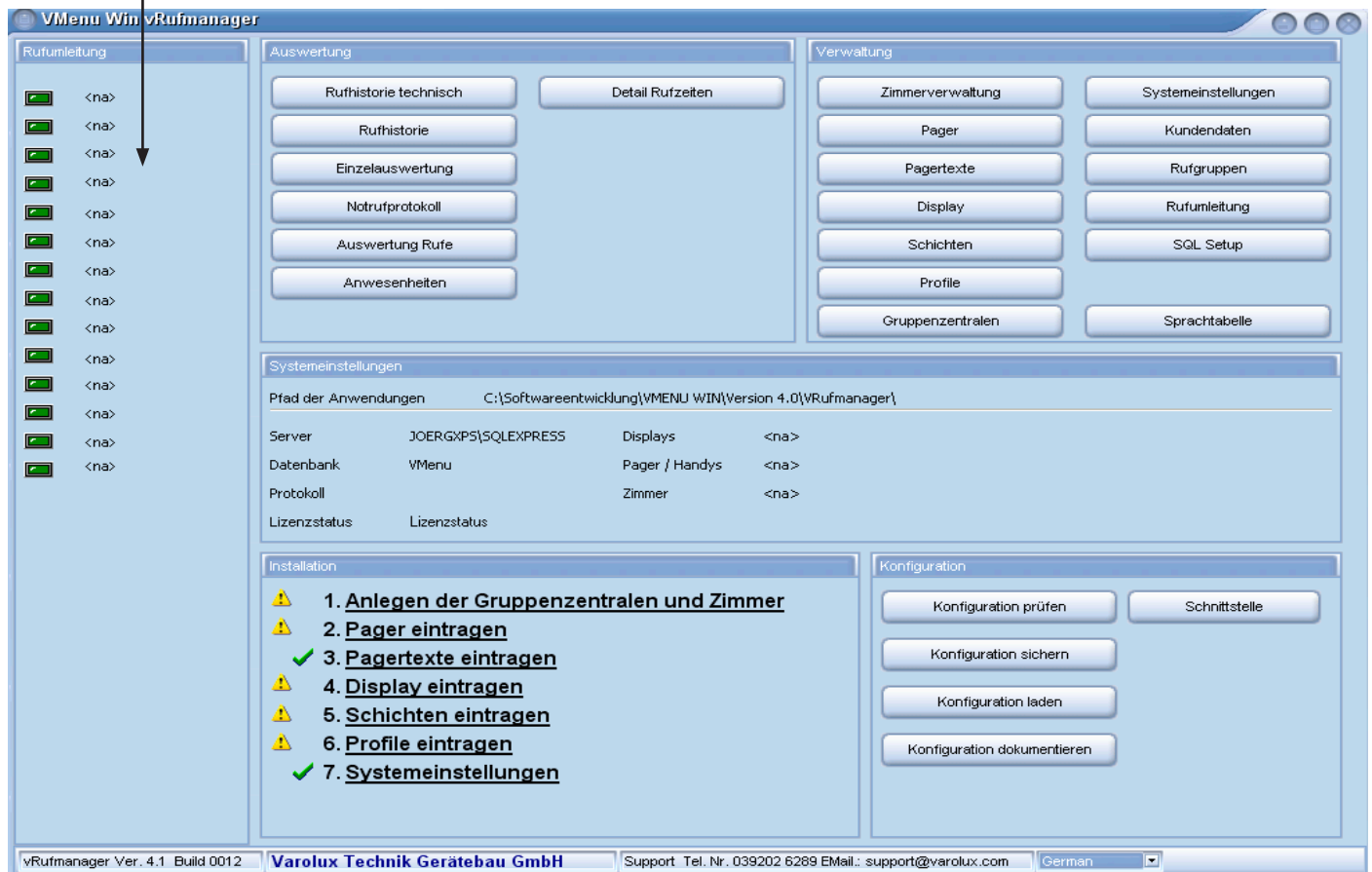

V levé oblasti úvodní strany VManageru vidíte přesměrování volání.

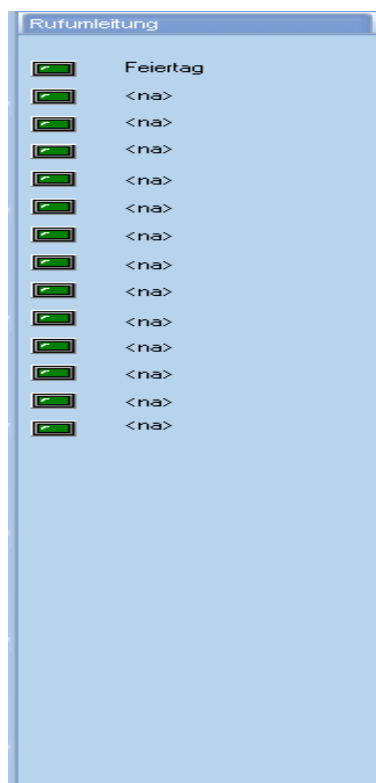


Přesměrování „Svátek“ už je zadáno. Zelená LED ukazuje, že přesměrování volání je neaktivní. Červená LED ukazuje, že přesměrování je aktivní. Kliknutím na LED můžete aktivace či deaktivace zapnout nebo vypnout.

Při aktivaci přesměrování lze volání přesměrovat.

V okně správy VManageru můžete přesměrování volání zřídit a definovat. Instrukce k přesměrování volání nalezete v okně správy tohoto návodu k obsluze.

Vyhodnocení

Vyhodnocení

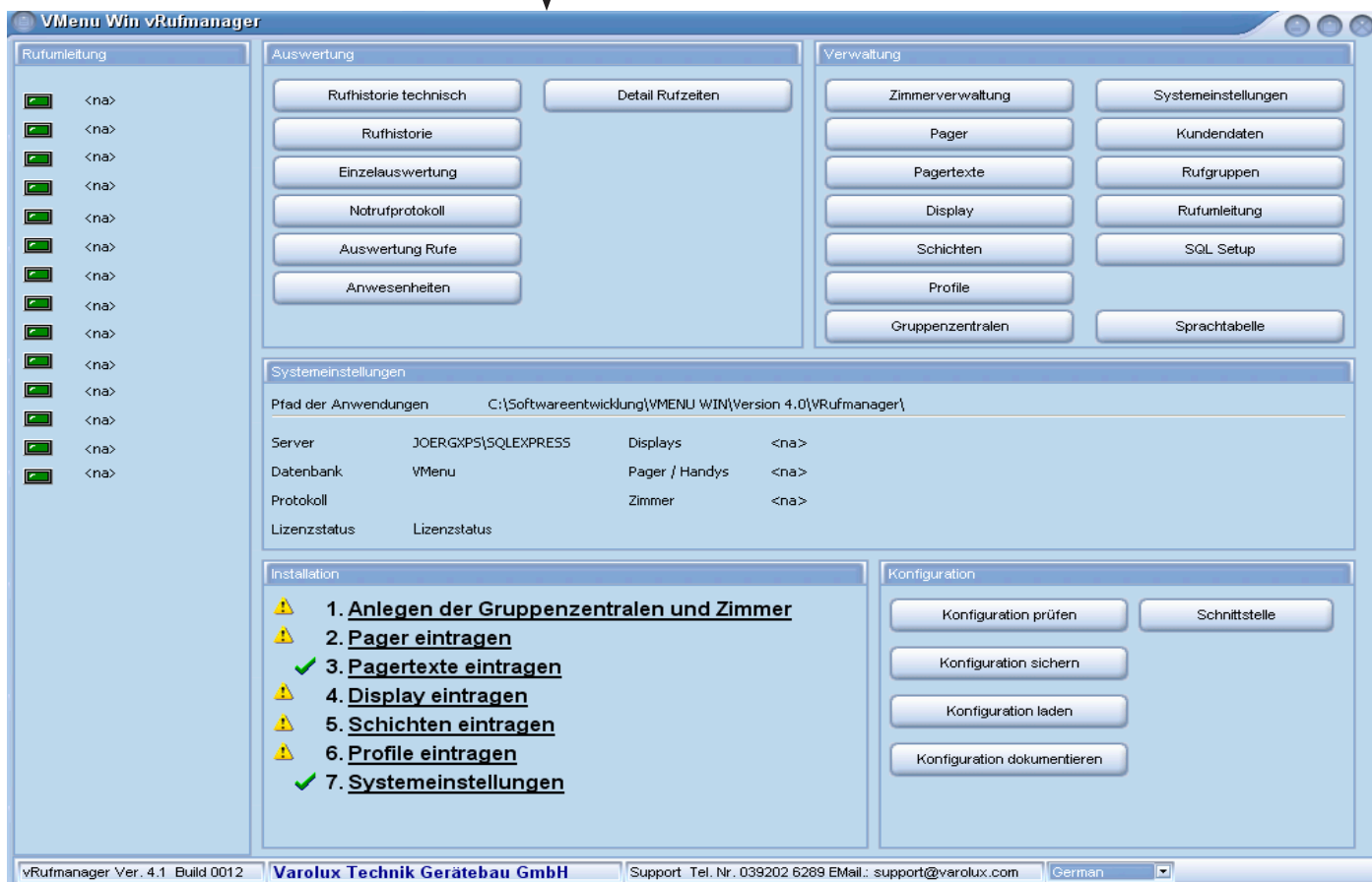

V této oblasti máte možnost provádět různé vyhodnocení dat o volání.



9. Historie volání technicky



Historie volání technicky

Historie volání technicky slouží servisním technikům případě poruchy pro zpětnou analýzu událostí. Pro otevření klikněte na tlačítko **Historie volání technicky**.

Zapište časové období v okně Časové období vybrat, pro které má být nastavena historie volání technicky. Potvrďte Vaše zadání stisknutím tlačítka **OK**. Ukáže se následující okno:



Časové období vybrat

Historie volání technicky

Datum	Uhrzeit	Zimmer	Ereignis	Status	Adr	Grz	Ruwi	Profile	Erg	DSN
08.04.2008	18.30.25	Besucher W/C 101	DEFEKT	Ruf wird übergeben	1	1	0	WB1 Tagespfleg	7	{06A
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 104	ANW	ANW	4	1	0	WB1 Tagespfleg	2	{3AE
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 105	ANW	ANW	5	1	0	WB1 Tagespfleg	2	{8DC
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 107	RUF	Ruf wird übergeben	7	1	0	WB1 Tagespfleg	1	{658
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 203	ANW	ANW	3	2	0	WB 2 Stationär	2	{A8F
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 204	ANW	ANW	4	2	0	WB 2 Stationär	2	{592
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 205	ANW	ANW	5	2	0	WB 2 Stationär	2	{F14
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 207	RUF	Ruf wird übergeben	7	2	0	WB 2 Stationär	1	{131
08.04.2008	18.30.28	Zimmer 305	ANW	ANW	5	3	0	WB3 Demente	2	{FDC
08.04.2008	18.30.28	Zimmer 307	RUF	Ruf wird übergeben	7	3	0	WB3 Demente	1	{CA3
08.04.2008	18.38.14	Besucher W/C 101	DEFEKT	Ruf wird übergeben	1	1	0	WB1 Tagespfleg	7	{85E
08.04.2008	18.38.14	Zimmer 104	ANW	ANW	4	1	0	WB1 Tagespfleg	2	{A8E
08.04.2008	18.38.14	Zimmer 105	ANW	ANW	5	1	0	WB1 Tagespfleg	2	{E5C
08.04.2008	18.38.14	Zimmer 107	RUF	Ruf wird übergeben	7	1	0	WB1 Tagespfleg	1	{DEI
08.04.2008	18.38.18	Zimmer 203	ANW	ANW	3	2	0	WB 2 Stationär	2	{FEC

DSN	Pager	Status	Datum
{5C3ECC64-4DE9-4404-9E7C-1444A99879DF}	12	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:30:29

Opce třídění **Časové období** **Všechny** **Export**

Sortiert nach Datum Sortiert nach Zimmer Sortiert nach GRZ Sortiert nach ADR Zeitraum Alle Export nach Excel

Datum	Uhrzeit	Zimmer	Ereignis	Status	Adr	Grz	Ruwi	Profile	Erg	DSN
08.04.2008	18.30.25	Besucher WC 101	DEFEKT	Ruf wird übergeben	1	1	0	WB1 Tagespfleg	7	{06A
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 104	ANW	ANW	4	1	0	WB1 Tagespfleg	2	{3AE
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 105	ANW	ANW	5	1	0	WB1 Tagespfleg	2	{8DC
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 107	RUF	Ruf wird übergeben	7	1	0	WB1 Tagespfleg	1	{658
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 203	ANW	ANW	3	2	0	WB 2 Stationär	2	{A8F
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 204	ANW	ANW	4	2	0	WB 2 Stationär	2	{592
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 205	ANW	ANW	5	2	0	WB 2 Stationär	2	{F14
08.04.2008	18.30.25	Zimmer 207	RUF	Ruf wird übergeben	7	2	0	WB 2 Stationär	1	{131
08.04.2008	18.30.28	Zimmer 305	ANW	ANW	5	3	0	WB3 Demente	2	{FDC
▶ 08.04.2008	18.30.28	Zimmer 307	RUF	Ruf wird übergeben	7	3	0	WB3 Demente	1	{CA
08.04.2008	18.38.14	Besucher WC 101	DEFEKT	Ruf wird übergeben	1	1	0	WB1 Tagespfleg	7	{85E
08.04.2008	18.38.14	Zimmer 104	ANW	ANW	4	1	0	WB1 Tagespfleg	2	{A8E
08.04.2008	18.38.14	Zimmer 105	ANW	ANW	5	1	0	WB1 Tagespfleg	2	{E5C
08.04.2008	18.38.14	Zimmer 107	RUF	Ruf wird übergeben	7	1	0	WB1 Tagespfleg	1	{DE
08.04.2008	18.38.18	Zimmer 203	ANW	ANW	3	2	0	WB 2 Stationär	2	{FEC

Historie volání technicky

DSN	Pager	Status	Datum
▶ {5C3ECC64-4DE9-4404-9E7C-1444A99B79DF}	12	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:30:29

Předání na pager

V tabulce Historie volání se ukazují uskutečněné události. Volání můžete třídit pomocí tlačítka **Třídit podle data**, **Třídit podle pokojů**, **Třídit podle Skupinové ústředny (SÚ - GZR)** a podle **ADR**.

Kliknutím na tlačítko **Časové období** můžete znovu určit časové období pro **Historie volání** technicky. Kliknete-li na tlačítko **Všechny**, tak se ukazují všechny uskutečněné události.

Chcete-li tabulku **Historie volání** exportovat do Excel, tak klikněte na tlačítko **Export do Excel**.

Označte kliknutím v tabulce Historie volání jednu událost. V spodní Tabulce pagerů vidíte, zda vybraná událost byla posílána na pager.

Výběr

Volací události

Report

Zimmer	Datum	Uhrzeit	Ereignis	Status
107	08.04.2008	23:59:37	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:00:02	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:02:03	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:04:05	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:06:06	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:08:07	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:10:07	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:12:08	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:14:09	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:16:09	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:18:10	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:20:11	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:22:12	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:24:13	Alarm	Ruf wird übergeben
107	09.04.2008	00:26:13	Alarm	Ruf wird übergeben

Pager	Status	Zeitstempel
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:38:18
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:40:17
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:42:17
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:44:19
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:46:19
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:48:19
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:50:20
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:52:20
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:54:20
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:56:21
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 18:58:22
11	Pollen nicht möglich	08.04.2008 19:00:22


V tabulce Výběr jsou nyní všechny provedené události s místem volání (pokojem), datem, časem, událostí (druhem volání), statutem, pagerem a údajem času. Chcete-li vytisknout vyhodnocení, klikněte na tlačítko **Report ukázat** a otevře se následující okno:

Report

Zimmer Nr.	Datum	Uhrzeit	Ereignis
101	08.04.2008	18:30:25	DEFEKT
101	08.04.2008	18:38:14	DEFEKT
101	08.04.2008	19:08:15	DEFEKT
101	08.04.2008	19:38:15	DEFEKT
101	08.04.2008	19:58:09	Quit
101	08.04.2008	19:58:18	DEFEKT
101	08.04.2008	20:28:19	DEFEKT
101	08.04.2008	20:58:20	DEFEKT
101	08.04.2008	21:28:21	DEFEKT
101	08.04.2008	21:58:21	DEFEKT
101	08.04.2008	22:28:22	DEFEKT
101	08.04.2008	22:58:23	DEFEKT
101	08.04.2008	23:28:23	DEFEKT
101	08.04.2008	23:58:23	DEFEKT
101	09.04.2008	00:00:02	DEFEKT
101	09.04.2008	00:30:02	DEFEKT
101	09.04.2008	01:00:03	DEFEKT
101	09.04.2008	01:30:04	DEFEKT
101	09.04.2008	02:00:05	DEFEKT


V reportu vidíte nyní volací historii pro vybrané pokoje či obytné zóny (profily). Report můžete uložit, vytisknout a exportovat. Klikněte na tlačítko **Close** pro zavření reportu.

11. Individuální vyhodnocení

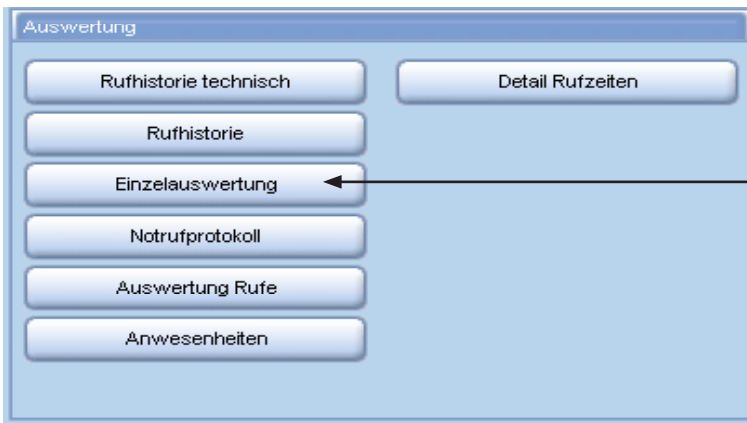

Individuální vyhodnocení

K vyhodnocení volacích událostí jednotlivých pokojů klikněte v okně vyhodnocení na tlačítko **Individuální vyhodnocení** a otevře se následující okno:

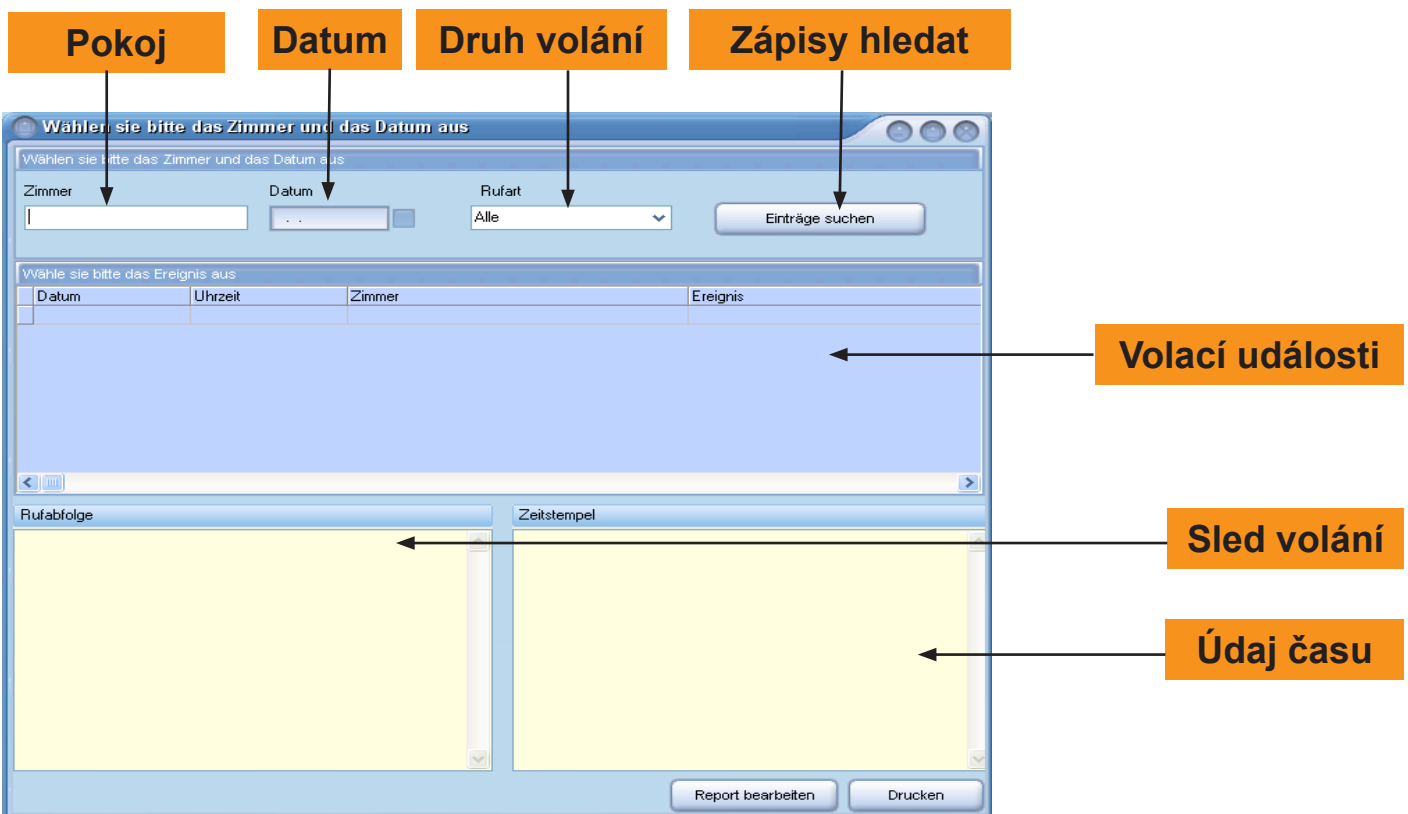

Volací události

Sled volání


Údaj času

K individuálnímu vyhodnocení zapište do vstupního pole číslo pokoje, který má být vyhodnocován. V poli výběru datum vyberte datum a v poli výběru jednu volací událost. Můžete vyhodnocovat také všechny volací události, pak vyberte v Druh volání všechny.

Klikněte na tlačítko **Zápisy hledat**. Budou ukázány všechny nalezené zápisy s datem, časem, pokojem a událostí. Označte v tabulce Volací události dvojitým kliknutím určitou událost a tím se zobrazí sled volání a údaj času (sled vysílání). Klikněte na tlačítko **Tisknout** pro tisk reportu.


Chcete-li report zpracovat, tj. uložit, exportovat atd. klikněte na tlačítko Report zpracovat.

12. Nouzový volací protokol

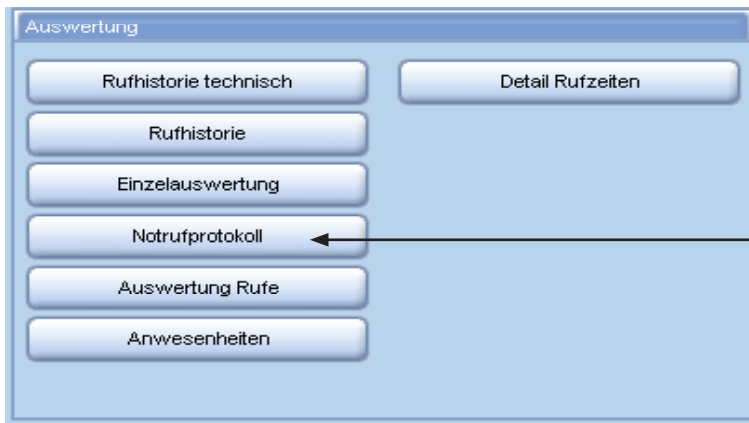

Nouzový volací protokol

Pro dokumentaci chybných alarmů a událostí různých volacích místností existuje v okně vyhodnocení protokolování nouzových volání. Klikněte na tlačítko **Protokol nouzového volání** a otevře se následující okno:

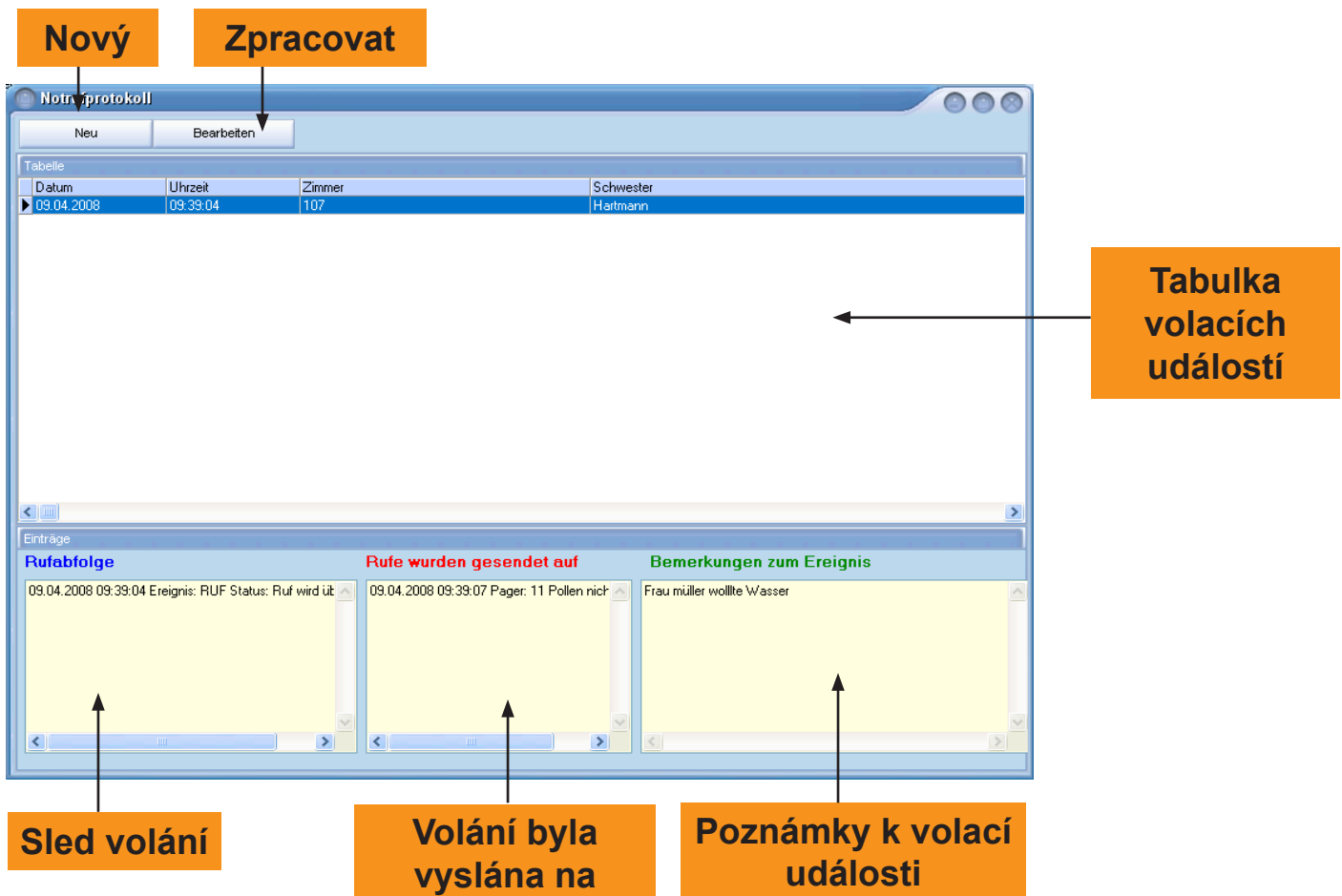


Tabulka: Seznam dosavadních zápisů


Sled volání: Sled volacích událostí

Volání byla vyslána na: Indikace, zda volání byla vyslána na pager

Poznámky k volací události: Komentář k volací události

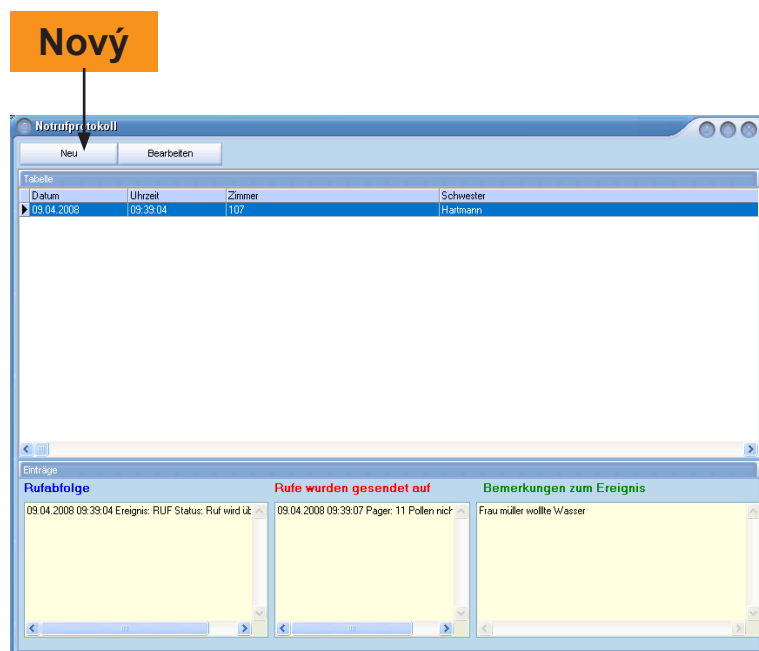

Klikněte na tlačítko **Nový** pro přidání zázpisu do volacího protokolu a otevře se následující okno:

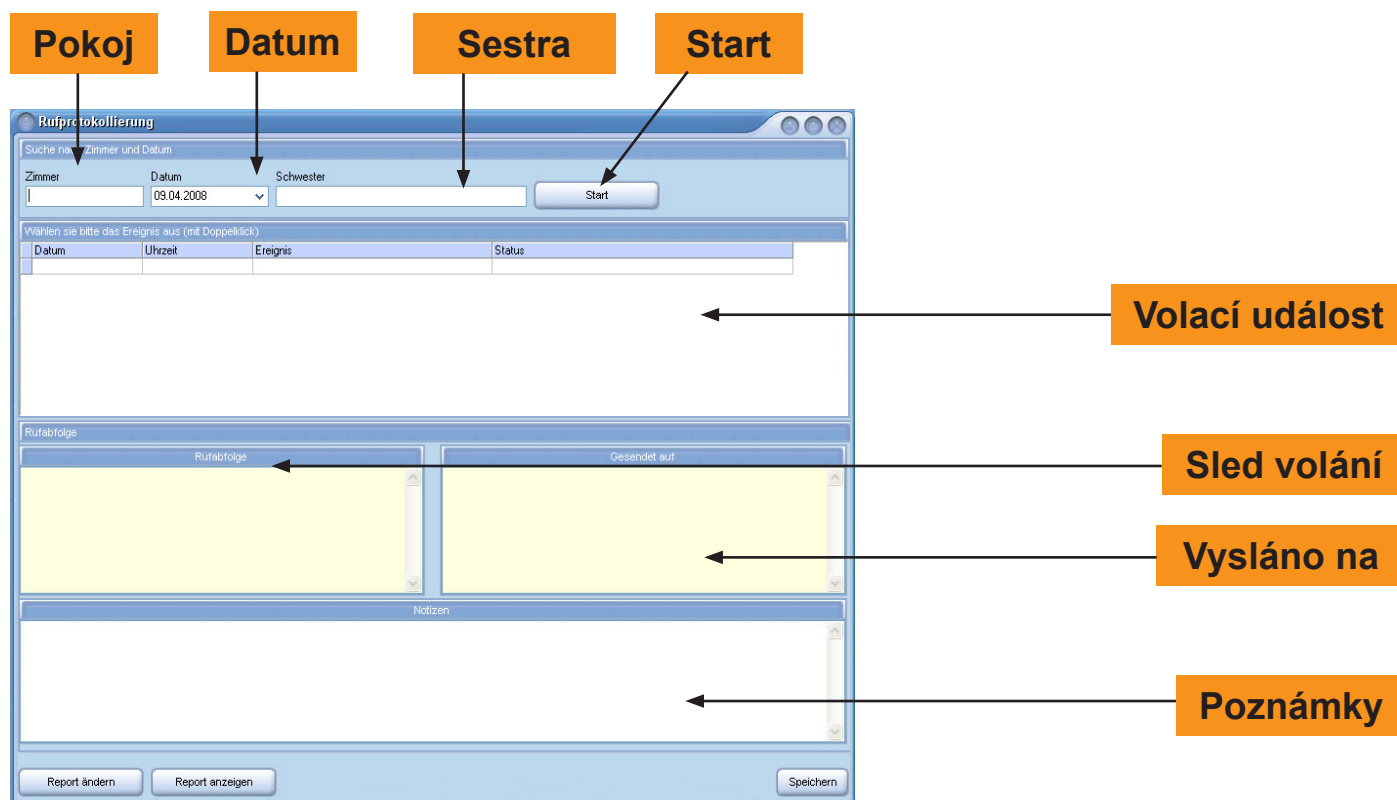


V okně Protokolování volání zapište ve vstupním poli číslo pokoje, datum a v poli Sestra jméno ošetřujícího personálu, který zpracoval volání. Pro hledání zázpisů klikněte na tlačítko **Start**. Nalezené zázpisy se ukazují v tabulce **Události volání**. Dvojitým kliknutím vyberte z tabulky událost, pro kterou má být vytvořeno protokolování. V oblasti Sled volání a Vysláno na (sled volání) jsou zobrazeny. V poli Poznámky můžete zapsat poznámky k události. Klikněte na tlačítko **Uložit**. Pro tisk klikněte na tlačítko **Ukázat report**. Report bude ukázán a můžete ho tisknout, uložit, exportovat atd.

13. Vyhodnocení volání



Vyhodnocení volání

K vyhodnocení doby volání určitých pokojů klikněte na tlačítko **Vyhodnocení volání** a otevře se okno:

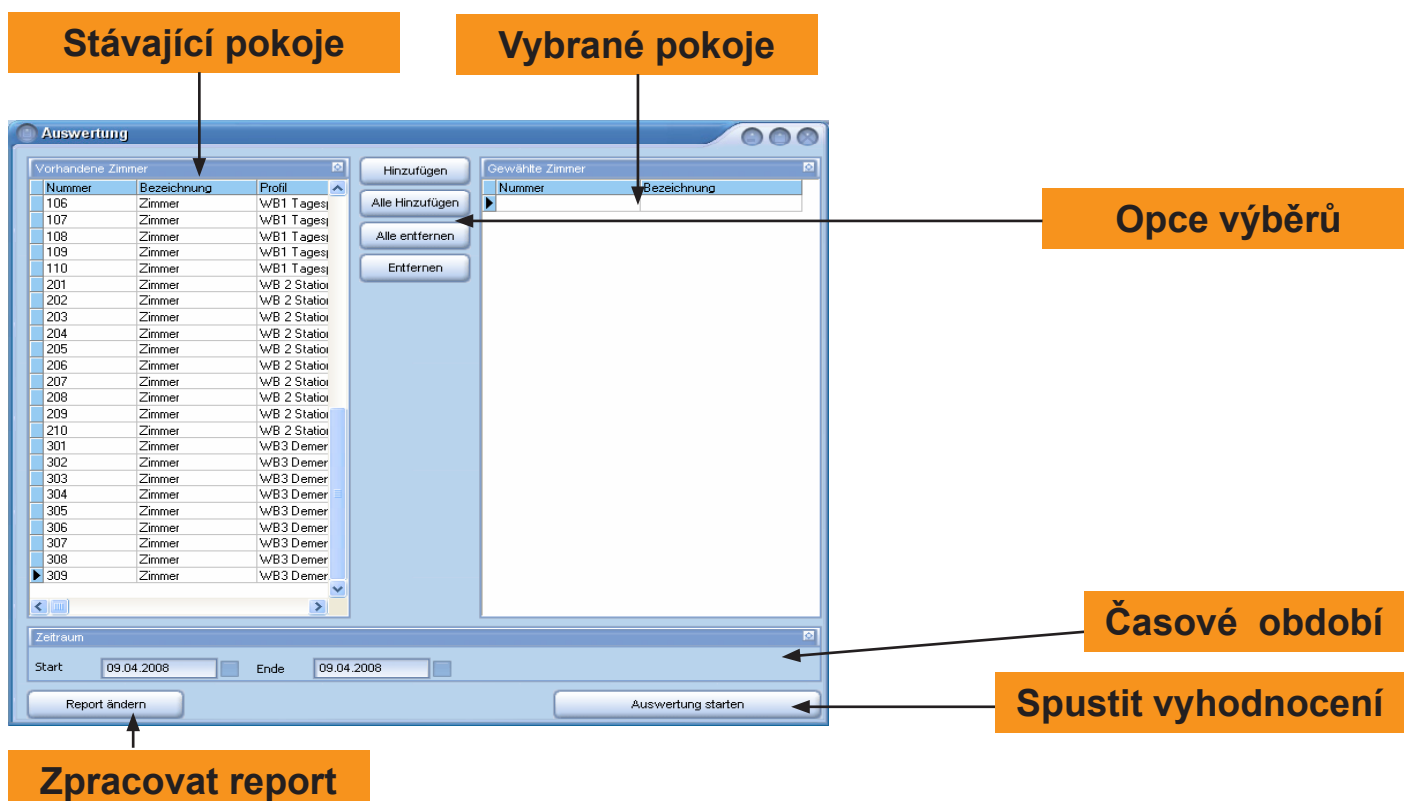

Časové období

Spustit vyhodnocení

Opce výběrů

Zpracovat report

V levé oblasti je zobrazena tabulka se stávajícími pokoji.

Aby přidával jeden pokoj do tabulky vybraných pokojů k vyhodnocení, klikněte na řádku a na tlačítko **Přidávat**. Chcete-li několik pokojů současně převzít, podržte tlačené STRG-tlačítko klávesnice při označení. Můžete vybírat kliknutím tlačítka **Všechny přidávat** všechny pokoje k vyhodnocení. Aby odstranili pokoje z tabulky Vybrané pokoje, označte příslušné pokoje a klikněte na tlačítko **Odstranit**. K odstranění všech pokojů klikněte na tlačítko **Všechna odstranit**.

Po výběru pokojů určíte v okně časové období. Zapište do vstupní polí Start a Konec délku časového období.

Po zapsání časového období startujete vyhodnocení kliknutím tlačítka **Spustit vyhodnocení**.


Report a vyhodnocení

Auswertung vom 09.04.2008
99999 Emil Mustermann Musterstr. 10 39326 Musterstadt

Datum	Zimmer	Rufstart	Rufende	Rufdauer
09.04.2008	Zimmer 107	00:00:02		
09.04.2008	Zimmer 107	09:39:04		
09.04.2008	Zimmer 107	09:41:38		
09.04.2008	Zimmer 107	11:25:55		
09.04.2008	Zimmer 107	11:27:15		
09.04.2008	Zimmer 107	14:13:20	14:13:32	00:00:12
09.04.2008	Zimmer 107	14:13:51	14:22:37	00:08:46


V reportu jsou protokolovány datum, pokoj, začátek konec a volání a délka volání.

14. Přítomnost

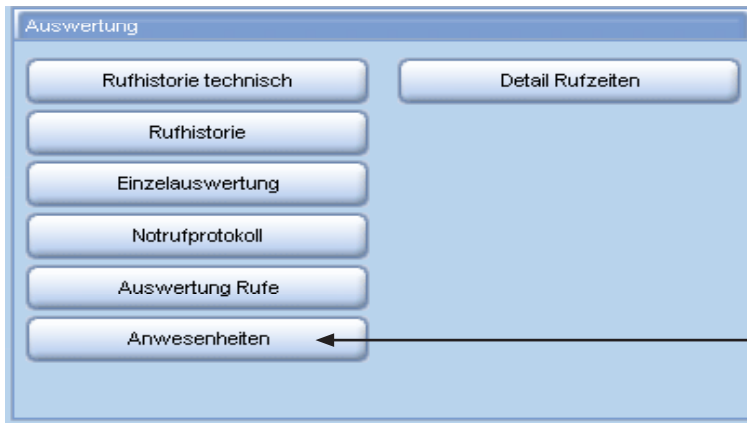

Přítomnost

K vyhodnocení přítomnosti ošetřujícího personálu klikněte na tlačítko **Přítomnost** a otevře se okno:

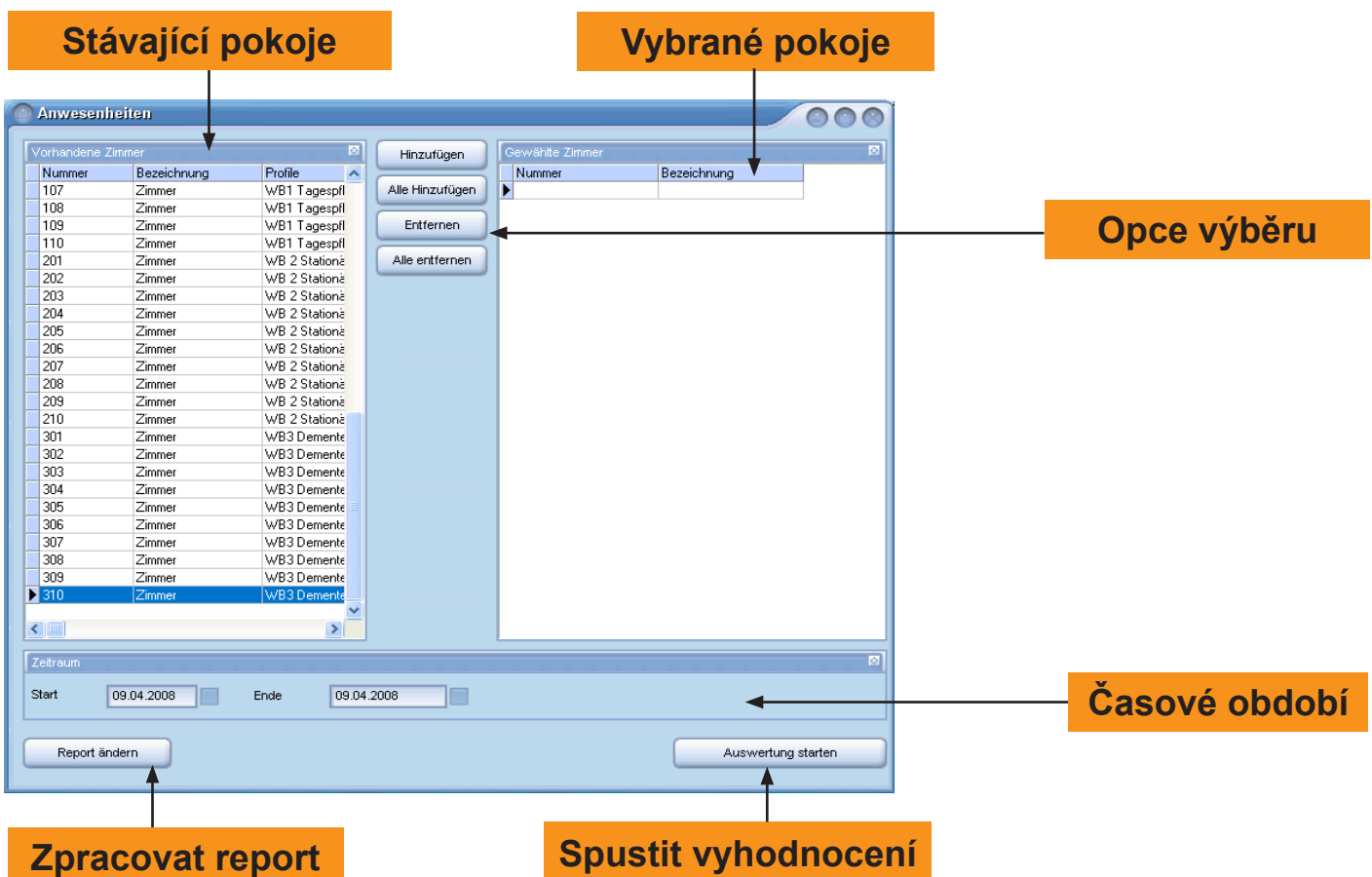

Stávající pokoje

Vybrané pokoje

Opce výběru

Časové období

Zpracovat report

Spustit vyhodnocení

V levé oblasti se zobrazí tabulka se stávajícími pokoji. Pro přidání pokoje do tabulky Vybrané pokoje klikněte na řádku pokoje a klikněte na tlačítko **Přidávat**. Chcete-li označit několik pokojů současně, držte při označení tlačítko Ctrl na klávesnici.

Kliknutím na tlačítko **Všechny přidat** můžete vybrat k vyhodnocení všechny pokoje. Aby jste odstranili pokoje z tabulky Vybrané pokoje, označte příslušné řádky pokojů a klikněte na tlačítko **Odstranit**. K odstranění všech pokojů klikněte na tlačítko **Všechny odstranit**.

Po výběru pokojů určete časové období. Zapište do vstupních polí Začátek a Konec délku časového období. Po zapsání časového období spustíte vyhodnocení kliknutím na tlačítko **Spustit vyhodnocení**.

Report přítomnost

Auswertung der Ruf und Anwesenheitszeiten
99999 Emil Mustermann Musterstr. 10 39326 Musterstadt

Datum	Zimmer	Rufbeginn	Anrw	Rufende	Rufdauer	Ruf - Anrw	Sum Anrw
09.04.2008	Zimmer 107	09:39:04					
09.04.2008	Zimmer 107	09:41:38					
09.04.2008	Zimmer 107	11:25:55					
09.04.2008	Zimmer 107	11:27:15					
09.04.2008	Zimmer 107	14:13:20		14:13:32	00:00:12		
09.04.2008	Zimmer 107	14:13:51	14:19:25	14:22:37	00:08:46	00:05:34	00:03:12
Summen					00:08:58	00:05:34	00:03:12

Page 1 of 1

V tomto reportu vidíte následující detaily přítomnosti:


- Datum a pokoj
- Začátek volání
- Začátek přítomnosti
- Konec volání
- Délka volací doby
- Doba mezi voláním a přítomnosti
- Suma přítomností

15. Detail volacích časů



Detail volacích časů

K vyhodnocení detailů volacích časů klikněte na tlačítko **Detail volacích časů** a otevře se okno:

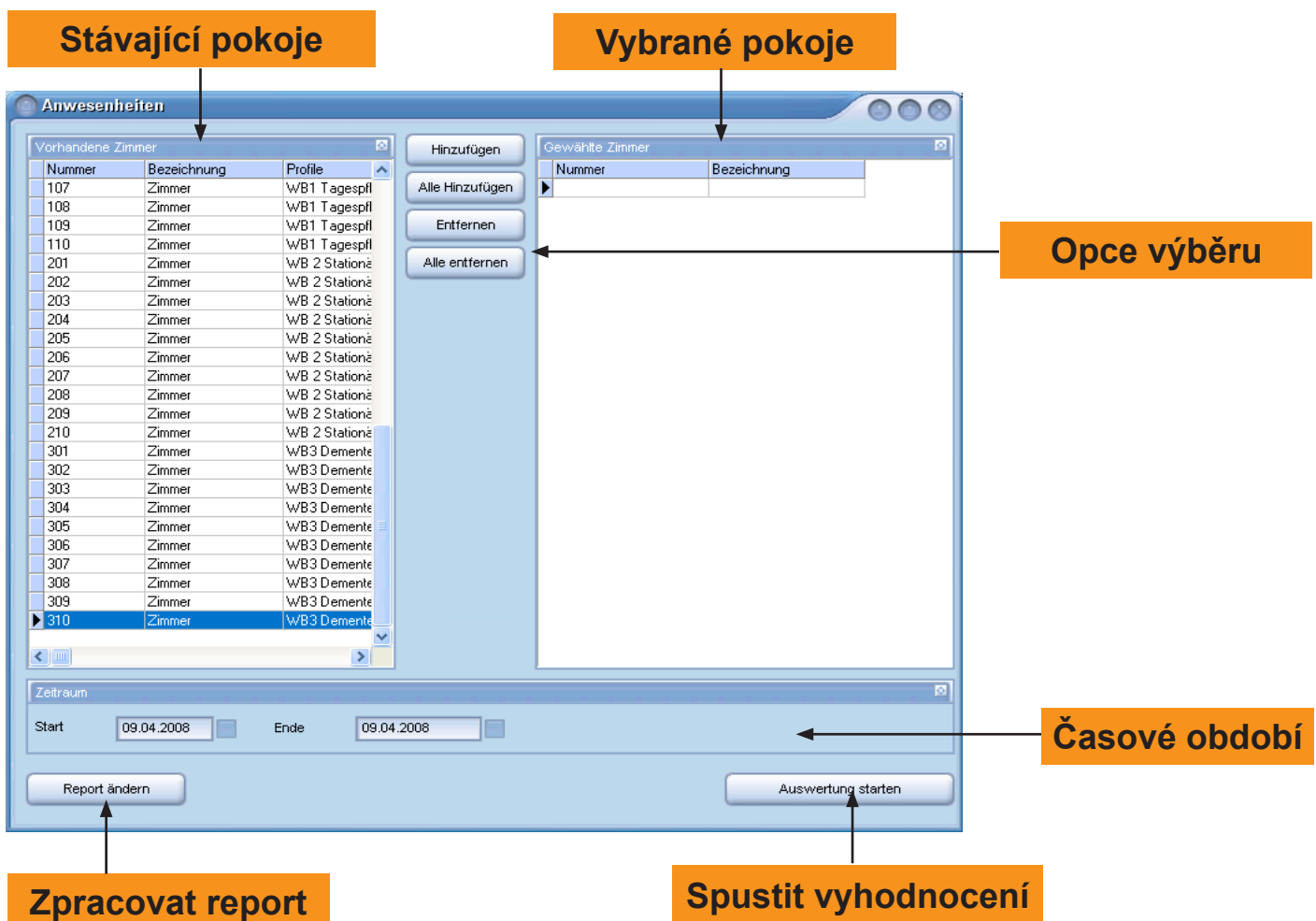

Stávající pokoje

Vybrané pokoje

Opce výběru

Časové období

Zpracovat report

Spustit vyhodnocení

V levé oblasti je zobrazená tabulka se stávajícími pokoji. Pro přidání pokoje k vyhodnocení do tabulky Vybrané pokoje, klikněte na pokojovou řádku a tlačítko **Přidávat**.

Chcete-li označit několik pokojů současně, držte při označení tlačítko Ctrl na klávesnici.

Kliknutím na tlačítko **Všechny přidat** můžete vybrat k vyhodnocení všechny pokoje. Aby jste odstranili pokoje z tabulky Vybrané pokoje, označte příslušné řádky pokojů a klikněte na tlačítko **Odstranit**. K odstranění všech pokojů klikněte na tlačítko **Všechny odstranit**.

Po výběru pokojů určete časové období. Zapište do vstupních polí Začátek a Konec délku časového období. Po zapsání časového období spustíte vyhodnocení kliknutím na tlačítko **Spustit vyhodnocení**.

Report detailu volacích časů

Rufzeitenauswertung
99999 Emil Mustermann Musterstr. 10 39326 Musterstadt



Datum	Zimmer	Rufbeginn	Rufart	Anw	Assis	RUM 1	Ruwi 2	RUM 3	Alarm	Rufende
09.04.2008	Zimmer 107	00:00:02	Alarm						08:00:12	
09.04.2008	Zimmer 107	09:39:04	RUF							
09.04.2008	Zimmer 107	09:41:38	RUF							
09.04.2008	Zimmer 107	11:25:55	RUF							
09.04.2008	Zimmer 107	11:27:15	RUF							
09.04.2008	Zimmer 107	14:13:20	RUF							14:13:32
09.04.2008	Zimmer 107	14:13:51	RUF	14:19:25		14:15:51	14:17:51			14:22:37

Page 1 of 1

V reportu detail volacích času jsou uvedeny následující detaily:

- Místnost a datum volací události
- Začátek volání
- Druh volání
- Začátek přítomnosti
- Začátek asistenčního volání
- Začátek opakování volání 1
- Začátek opakování volání 2
- Začátek opakování volání 3
- Začátek alarmu
- Konec volací události
- Doba trvání volací události

Správa

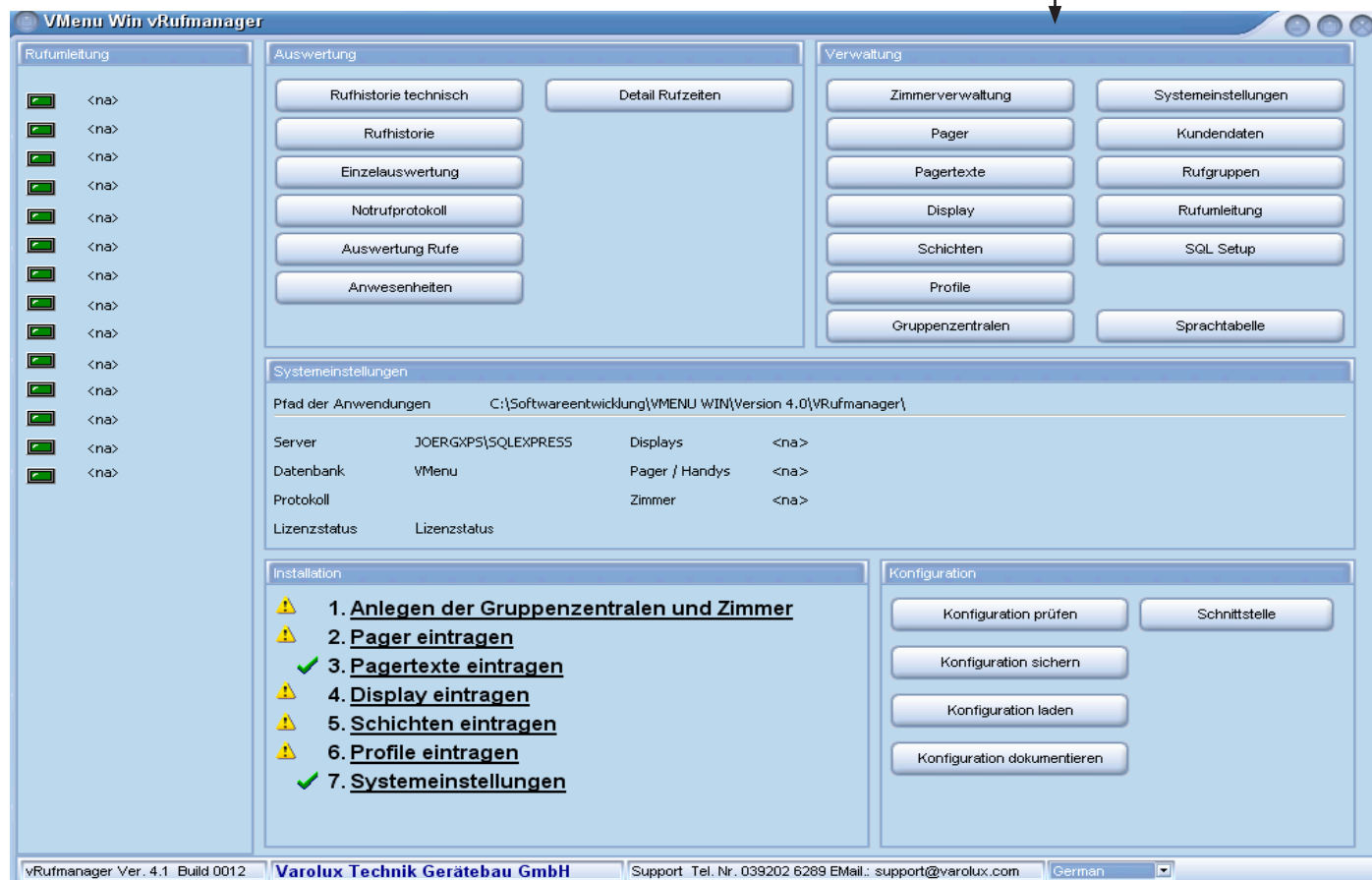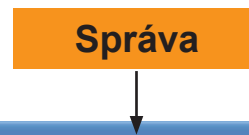


V okně správy můžete spravovat konfigurace pokojů, pager, displej, směny, profily, skupinové ústředny, nastavení systému atd.

Dále můžete zřídít volací skupiny a přesměrování volání.



16. Správa pokojů

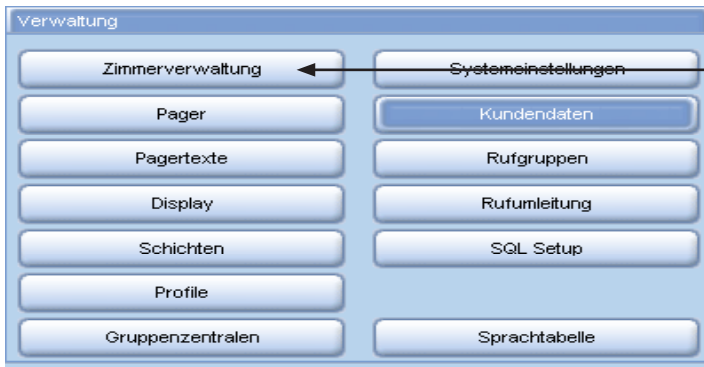

Správa pokojů

Klikněte na tlačítko **Správa pokojů** a otevře se okno:

Nový **Uložit** **Vymazat** **Deaktivovat pokoje** **F8 Rychlá změna zapnuta**

Vstupní pole **Tabulka pokojů**

Deaktiviert	ADR	GRZ	Bezeichnung	Nummer	Pagertexte	Displaytext	LEV08-14	Profil
<input type="checkbox"/>	1	1	Besucher WC	101	Besucher WC 101	101	101	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	2	1	Zimmer	102	102	102	102	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	3	1	Zimmer	103	103	103	103	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	4	1	Zimmer	104	104	104	104	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	5	1	Zimmer	105	105	105	105	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	6	1	Zimmer	106	106	106	106	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	7	1	Zimmer	107	107	107	107	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	8	1	Zimmer	108	108	108	108	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	9	1	Zimmer	109	109	109	109	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	10	1	Zimmer	110	110	110	110	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	1	2	Zimmer	201	201	201	201	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	2	2	Zimmer	202	202	202	202	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	3	2	Zimmer	203	203	203	203	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	4	2	Zimmer	204	204	204	204	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	5	2	Zimmer	205	205	205	205	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	6	2	Zimmer	206	206	206	206	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	7	2	Zimmer	207	207	207	207	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	8	2	Zimmer	208	208	208	208	WB 2 Stationär

Pro přidání pokoje klikněte na tlačítko **Nový**. Zapište do vstupního pole název, číslo, adresu, skupinovou ústřednu a text displeje. Do vstupních polí displejů můžete zapsat k pokojům např. číslo pokoje „123“. Do třetího pole můžete zapsat příslušný text pageru k pokojům, protože text displeje nemusí být vždy shodný se textem pageru.

Pro uložení zápisu klikněte na tlačítko **Uložit**.

K vymazání jednoho stávajícího pokoje označte pokoj v tabulce pokojů a klikněte na tlačítko **Vymazat**. Ale pokoje můžete také pouze deaktivovat, to znamená, že pokoje nemusí být vymazány, ale při zobrazení dat procesů volání nebudou zobrazeny.

Pro deaktivování pokoje klikněte na tlačítko **Deaktivovat pokoje**. V tabulce pokojů ukazuje zelený háček v příslušné kolonce Deaktivovat, zda byl pokoj deaktivován. Tlačítkem **Rychlá změna** můžete změny zapnut nebo vypnut.

Při nastavené rychlé změně můžete provádět změny přímo v tabulce pokojů.

Klikněte na řádek pokoje a zapište změny tam přímo.

Potvrďte Vaše zadání kliknutím na tlačítko **Uložit**.

The screenshot shows a table titled 'Tabelle' with columns: Deaktiviert, ADR, GRZ, Bezeichnung, Nummer, Pagertexte, Displaytext, LEV08-14, and Profile. The table contains 20 rows of room data. Four orange callout boxes point to specific UI elements: 'Třídít' points to the 'Sortiert nach' dropdown; 'Číslo k textu pageru / k displeji' points to the 'F3 = Nummer zu Pagertext / Display / Display klein' button; 'Označení a číslo k textu pageru' points to the 'F4 = Bezeichnung und Nummer zu Pagertext' button; and 'Číslo k textu displeje' points to the 'F5 = Nummer zu Displaytext / Display klein' button. A fifth orange callout box, 'Tabulka pokojů', points to the table itself.

Deaktiviert	ADR	GRZ	Bezeichnung	Nummer	Pagertexte	Displaytext	LEV08-14	Profile
<input type="checkbox"/>	1	1	Besucher WC	101	Besucher WC 101	101	101	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	2	1	Zimmer	102	102	102	102	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	3	1	Zimmer	103	103	103	103	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	4	1	Zimmer	104	104	104	104	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	5	1	Zimmer	105	105	105	105	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	6	1	Zimmer	106	106	106	106	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	7	1	Zimmer	107	107	107	107	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	8	1	Zimmer	108	108	108	108	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	9	1	Zimmer	109	109	109	109	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	10	1	Zimmer	110	110	110	110	WB1 Tagespflege
<input type="checkbox"/>	1	2	Zimmer	201	201	201	201	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	2	2	Zimmer	202	202	202	202	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	3	2	Zimmer	203	203	203	203	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	4	2	Zimmer	204	204	204	204	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	5	2	Zimmer	205	205	205	205	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	6	2	Zimmer	206	206	206	206	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	7	2	Zimmer	207	207	207	207	WB 2 Stationär
<input type="checkbox"/>	8	2	Zimmer	208	208	208	208	WB 2 Stationär

Ve správě pokojů se nachází nad tabulkou pokojů lišta s tlačítky. Tlačítkem **Třídít podle** můžete třídít tabulku podle různých kritérií. Klikněte na tlačítko Třídít podle a ukáže se seznam opcí pro třídění. Kliknutím vyberte kritérium a tabulka pokojů se podle toho seřídí.

Pro přímé přidání čísla pokojů k textům pageru a textům displeje klikněte na tlačítko **Číslo k textu pageru / k displeji / Displej malý** nebo stiskněte klávesu F3 na klávesnici.


Tlačítkem **Označení a číslo k textu pageru** nebo klávesou F4 přidáváte číslo a název pokojů k textům pageru. To znamená, že při volací události se zobrazí název a číslo jako text pageru.

Pro výběr čísla pokoje jako textu displeje, klikněte na tlačítko **Číslo k textu pageru** nebo funkční klávesu F5

17. Pager




Pro změnu pagerů klikněte v okně správy na tlačítko **Pager** a otevře se okno:

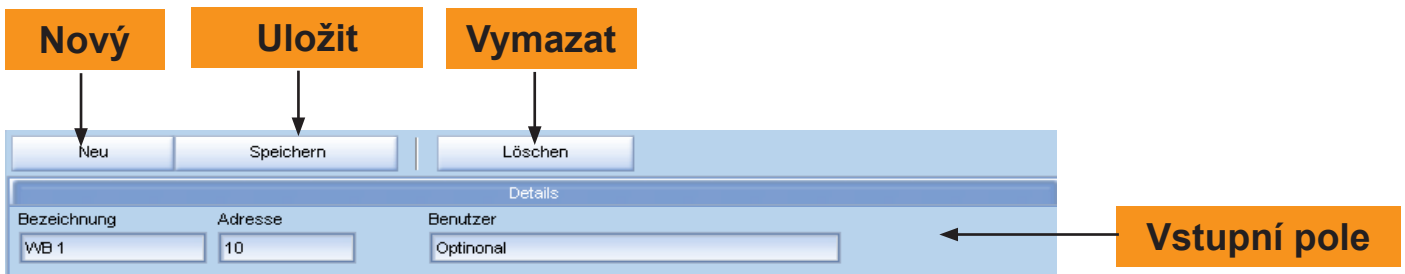


Pro řízení pageru klikněte na tlačítko **Nový** a potom zapište do vstupních polí název, adresu eventuálně uživatele.


Klikněte na tlačítko **Uložit**. Pro vymazání pageru pager v tabulce pagerů označte a klikněte na tlačítko **Vymazat**.

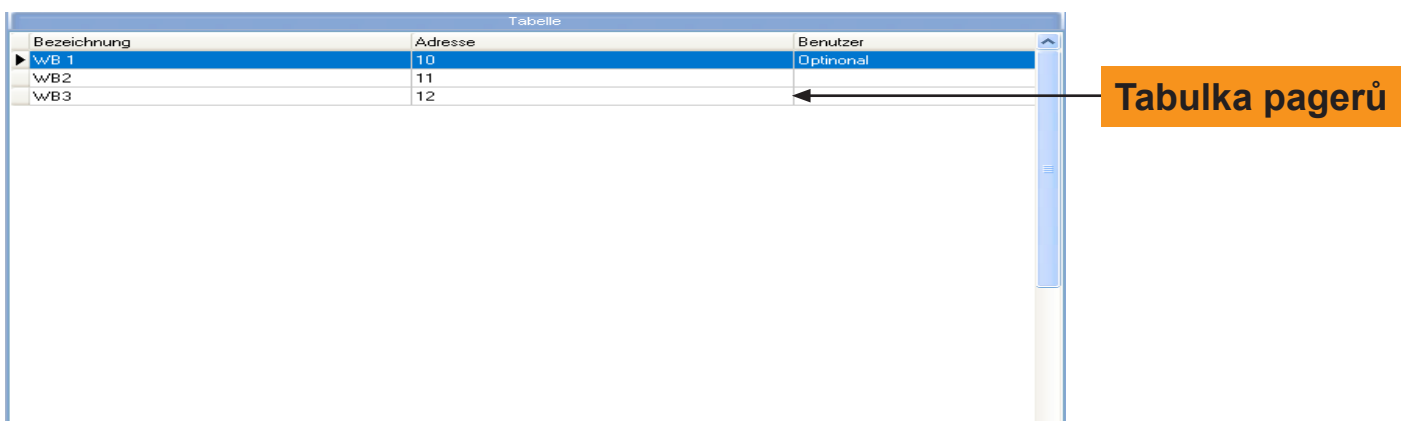

18. Texty pagerů

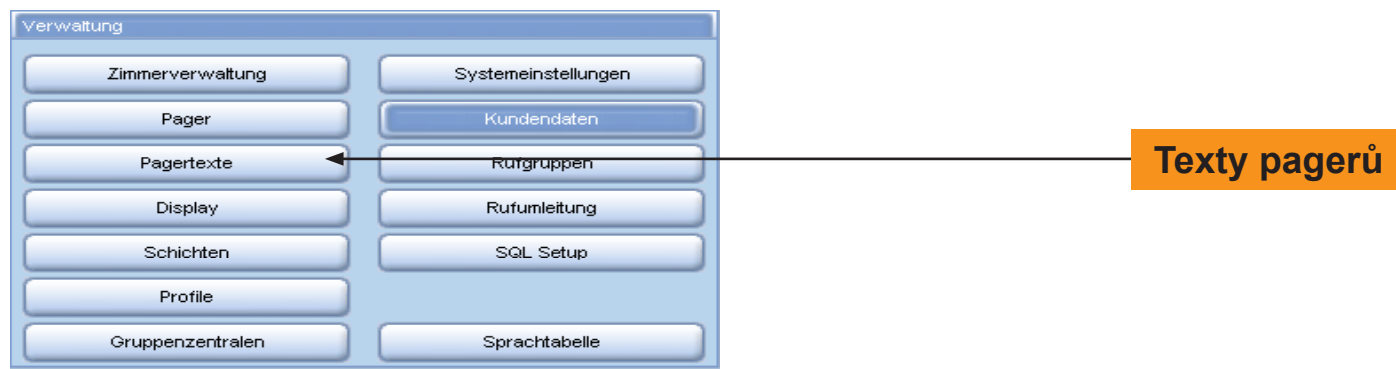


Ke změně textů pagerů klikněte v okně správy na tlačítko **Texty pagerů** a otevře se okno:

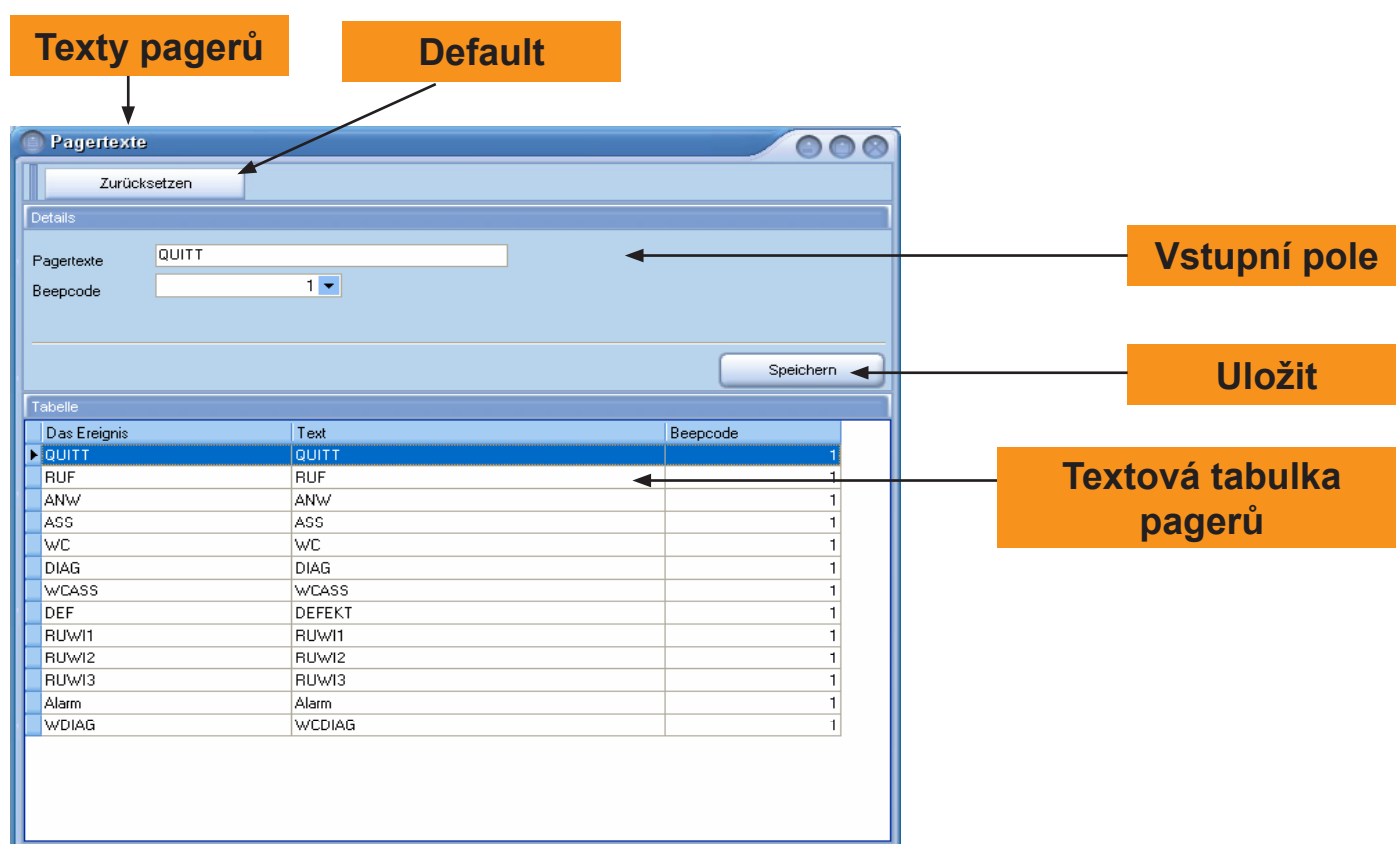


K změně textů pagerů a kódů pípání klikněte v textové tabulce pagerů na příslušnou událost, zapište změny a potvrďte Vaše zadání kliknutím na tlačítko **Uložit**. Pro návrat k původnímu standardnímu nastavení textů pagerů a kódů pípání klikněte na tlačítko **Default**.

19. Displej

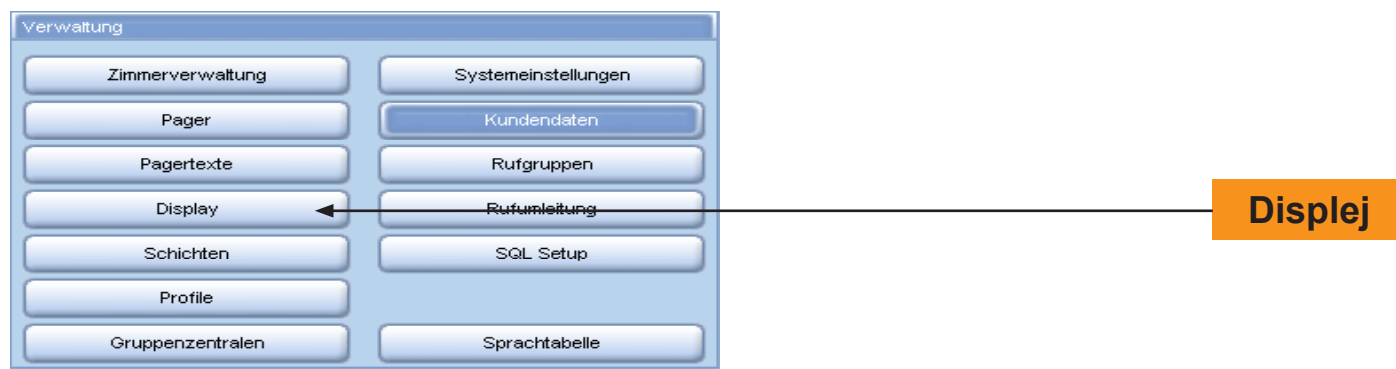

Pro změny nastavení displeje klikněte v okně správy na tlačítko **Displej** a otevře se okno:

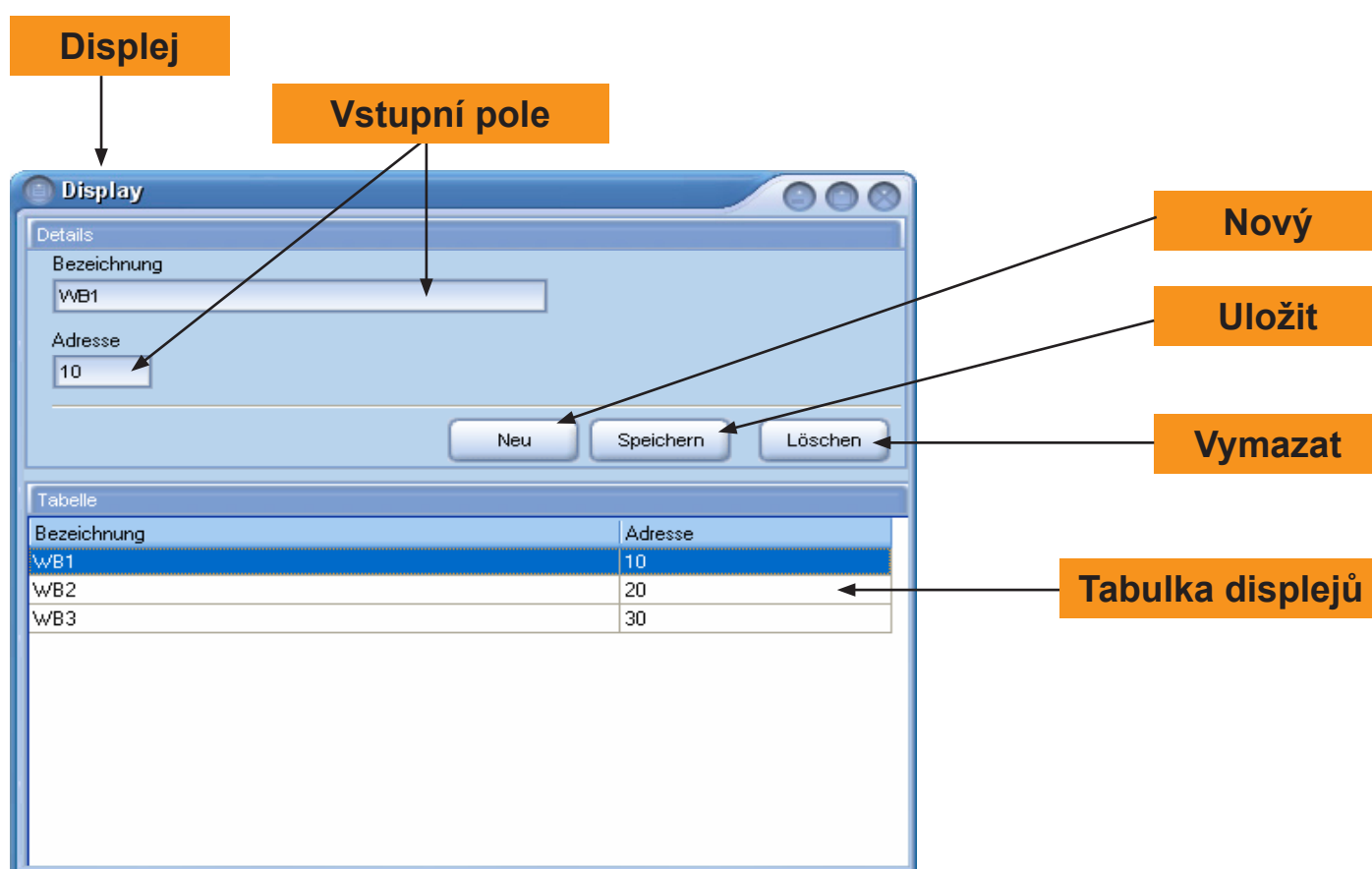

Pro zřízení nového displeje klikněte na tlačítko **Nový**.


Zapište do vstupních polí název a adresu displeje a potvrďte kliknutím na tlačítko **Uložit**. Pro vymazání displeje označte příslušný displej v tabulce displejů a klikněte na tlačítko **Vymazat**.

Ke změně údajů displeje zapsání označte příslušný displej v tabulce displejů, změňte název a / nebo adresu a klikněte na tlačítko **Uložit**.


20. Směny



K změně směn klikněte v okně správy na tlačítko **Směny** a otevře se okno:

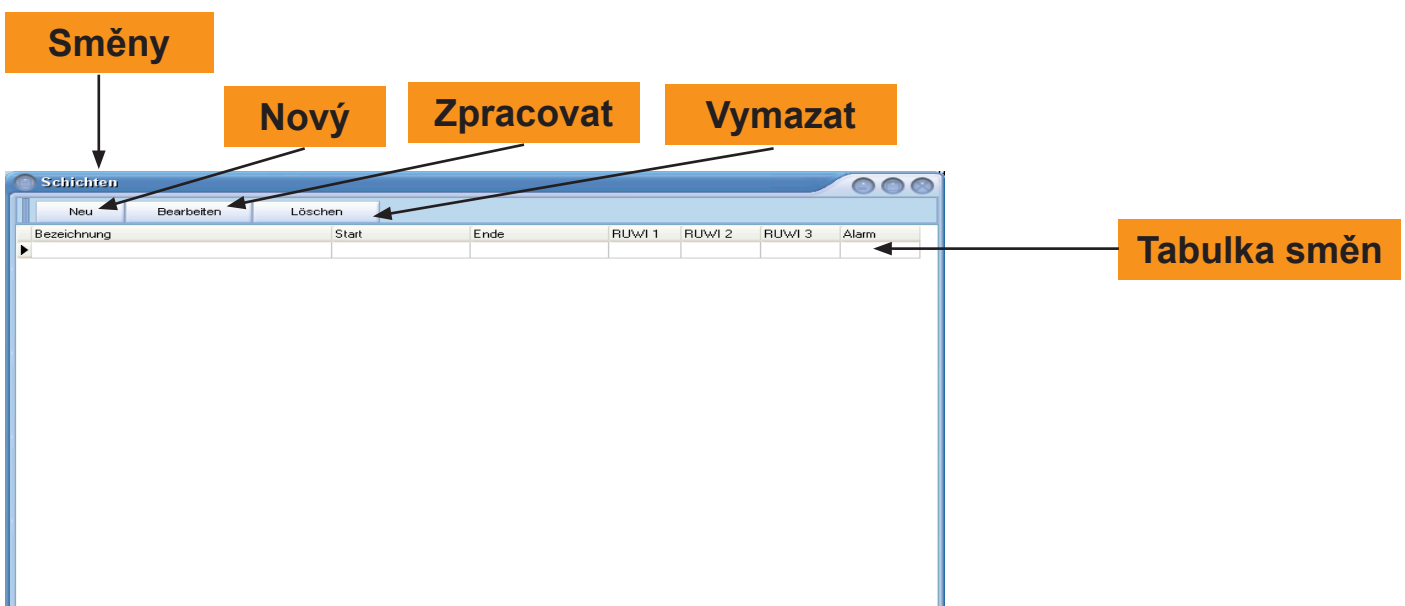

Pro zřízení nové směny klikněte na tlačítko **Nový** a pro změnu klikněte na tlačítko **Zpracovat**. Otevře se okno:

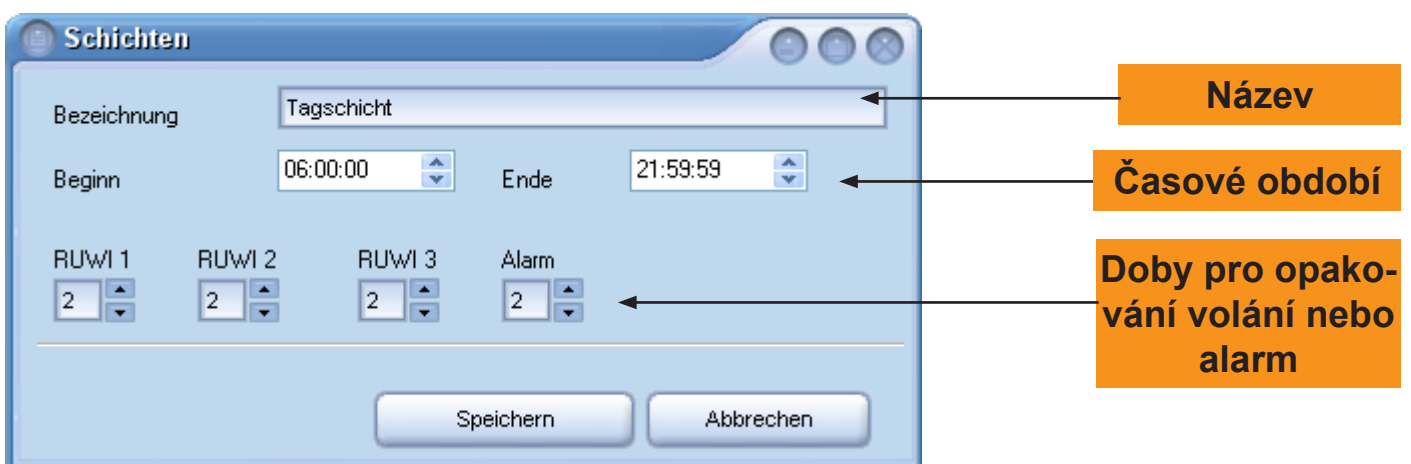

Zapsáním do vstupního pole **Název** a určením doby začátku a konce stanovíte směnu. V oblasti časy pro opakování volání a alarm vyberte odstup pro opakování volání a alarm v minutách a klikněte na tlačítko **Uložit**.

21. Profily



Profily

K změně profilů klikněte v okně správy na tlačítko Profily a otevře se okno:

Profily

Nový **Zpracovat** **Vymazat** **Pokoje přidávat k tomuto profilu**

Pokoje ukázat k tomuto profilu

Tabulka profilů

Bezeichnung	Start	Ende	RUW1	RUW2	RUW3	Alarm	Aktive
Tagschicht	06:00	21:59	2	2	2	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Nachtschicht	22:00	05:59	3	2	2	2	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktiv	Adresse	Ruf	RUW1	RUW2	RUW3	Alarm	Assis	WC Ruf	WC A
<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Adresse	Displaytyp	ANW	Ruf	RUW1	RUW2	RUW3	Alarm
10	LEV 08 - 40/60 /100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Volací místnosti (např. pokoje) je možné spojit v profilech dohromady. V profilech můžete tvořit obytné zóny a k těm přiřadit směny. Ke směnám je možné přiřadit konfiguraci pagerů a displejů. Pro vytvoření profilu klikněte na tlačítko **Nový**.



Zapište do okna detail profilu název a poznámku. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Pro zpracování existujících profilů klikněte na tlačítko **Zpracovat** a otevře se stejné okno. Proved'te změny a potvrďte kliknutím na tlačítko **Uložit**.

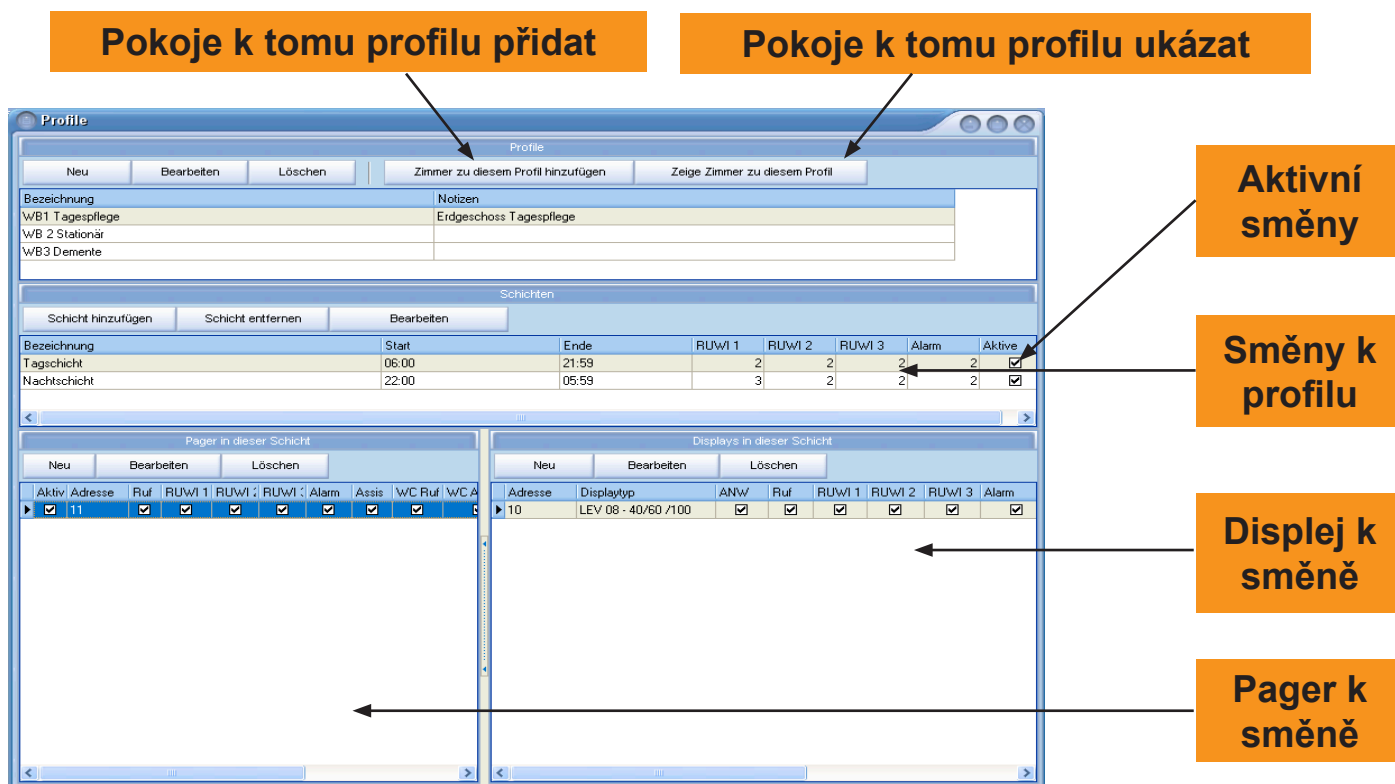

Pro přiřazení příslušného pokoje z pokojové tabulky klikněte na tlačítko **Pokoje k tomu profilu přidávat**. Tlačítko **Pokoje k tomu profilu ukázat** slouží jenom k zobrazení pokojů, které byly profilu přiřazeny. Kliknutím na tlačítko **Směnu přidávat** můžete v okně směn přiřadit příslušné směny k profilům. Pro odstranění směny klikněte na tlačítko **Směnu odstranit**. Chcete-li směnu změnit, klikněte na tlačítko **Zpracovat** a proveďte změny pro tuto směnu.

Směny můžete v tabulce aktivovat nebo deaktivovat v tabulce směn kliknutím na čtvereček výběru v kolonce Aktivní. Směnám můžete přiřazovat pagery a displeje. Pro přidání pageru z tabulky pagerů označte směnu a klikněte na tlačítko **Nový**.

Pro změnu klikněte na tlačítko **Zpracovat**. V okně pagerů můžete v tabulce pagerů pro směnu pager přizpůsobit. Kliknutím na čtvereček výběru můžete v kolonkách pager upravit. V první kolonce můžete pagery aktivovat nebo deaktivovat.

V následujících kolonkách určíte, který druh volací události má být na pageru zobrazen. Stejným způsobem můžete směnám přizpůsobit displeje.

Pro další změny v profilech opakujete tento postup

22. Skupinové ústředny




Skupinové ústředny

Pro změny skupinových ústředny kliknete na tlačítko **Skupinové ústředny** v okně správa a otevře se okno



Pro zřízení skupinové ústředny klikněte na tlačítko **Nové skupinové ústředny** a otevře se okno:

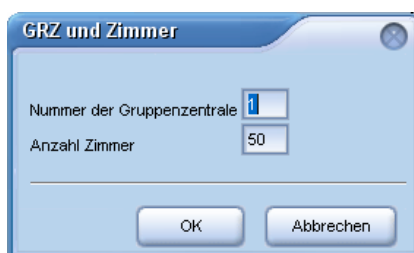

Do vstupních polí запиšte číslo a počet příslušných pokojů. Potvrďte kliknutím na tlačítko **Uložit**.

Pro vymazání skupinové ústředny označte v tabule skupinových ústřednen příslušnou skupinovou ústřednu a klikněte na tlačítko **Vymazat**. Chcete-li vidět, které pokoje patří ke které skupinové ústředně, klikněte na tlačítko **Tabulka pokojů**. V pokojové tabulce vidíte pokoje s adresami a příslušné ke skupinovým ústřednám.


Pro potvrzení změn klikněte na tlačítko **Aktualizovat**. Ukončete kliknutím na tlačítko **Ukončit**.

23. Nastavení systému



Nastavení systému

Pro změny v nastavení systému klikněte na tlačítko **Nastavení systému** a se otevře následující okno:

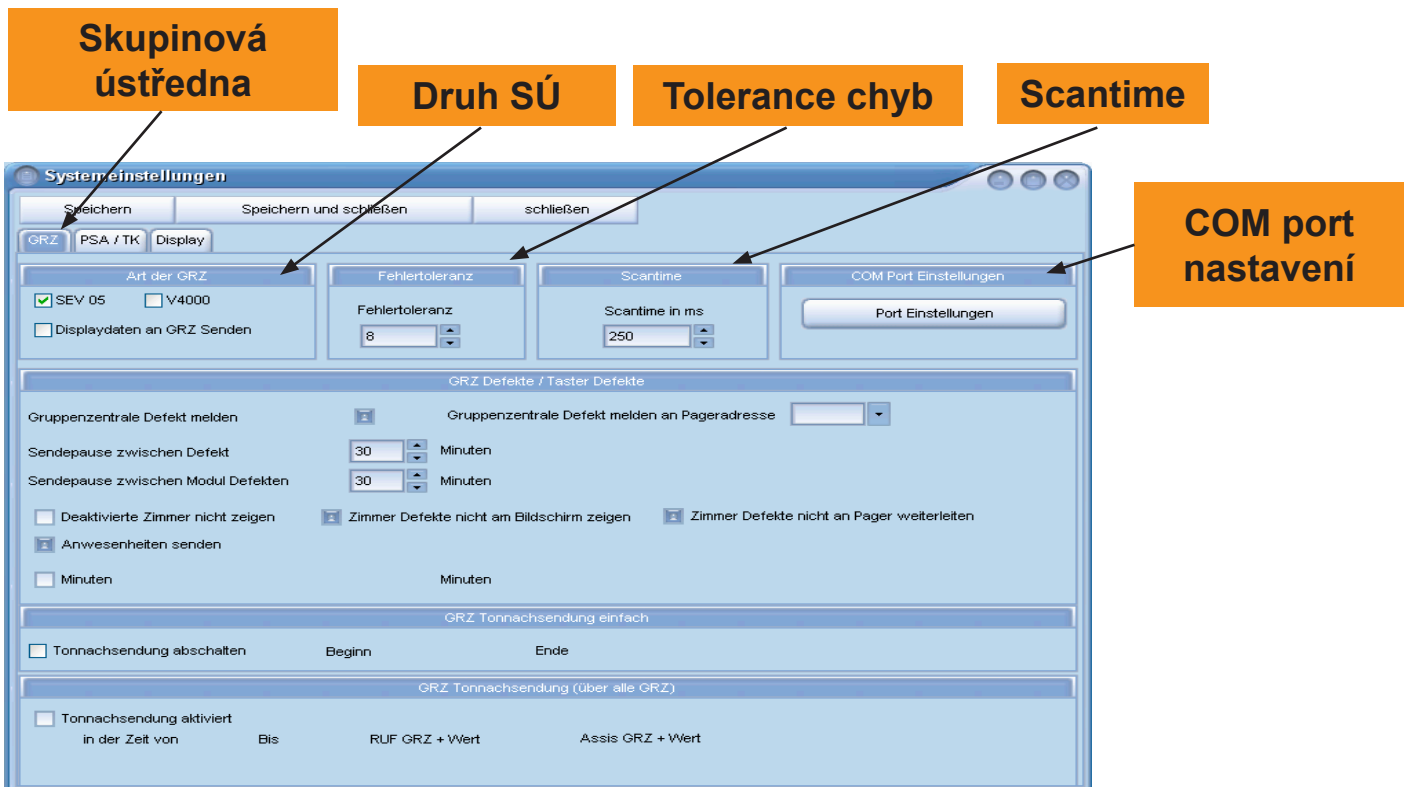

Druh skupinové ústředny: Vyberte druh skupinové ústředny a aktivujte nebo deaktivujte funkci data displeje vysílat do SÚ (skupinové ústředny).

Tolerance chyb: Počet scanů, který bude proveden, pokud nebudou obdržena žádná data ze skupinové ústředny, než bude hlášena chyba.

Scantime: Interval dotazování skupinových ústředn, uvádí se v milisekundách.

COM port nastavení: Nastavení sériových parametrů rozhraní.

Nastavení standardních hodnot by měli provádět pouze servisní technici.

Skupinová ústředna Poruchu hlásit

Pauza vysílání mezi poruchami

Pauza vysílání mezi poruchami modulů

SÚ Poruchu hlásit do adresu pageru

GRZ Defekte / Taster Defekte

Gruppenzentrale Defekt melden Gruppenzentrale Defekt melden an Pageradresse

Sendepause zwischen Defekt 30 Minuten

Sendepause zwischen Modul Defekten 30 Minuten

Deaktivierte Zimmer nicht zeigen Zimmer Defekte nicht am Bildschirm zeigen Zimmer Defekte nicht an Pager weiterleiten

Anwesenheiten senden

GRZ Daten prüfen 0 Anzahl Prüfungen

Data SÚ kontrolovat

Přítomnosti vysílat

Deaktivované pokoje nezobrazovat

Pokoje poruchy nezobrazovat na monitoru

Pokoje poruchy nepředávat na pager

Skupinová ústředna Poruchu hlásit: Tato možnost má být vždy aktivní, aby defekty skupinové ústředny mohly být vysílány do pagerů.

Skupinová ústředna Poruchu hlásit na adresu pageru:

Výběr pageru, na který má být hlášena porucha skupinové ústředny.

Pauza vysílání mezi poruchami: Zadejte interval, ve kterém mají být vyslána hlášení poruchy na pager.

Pauza vysílání mezi poruchami modulů: Zadejte interval, ve kterém mají být vyslána hlášení poruchy na pager.

SÚ Data kontrolovat: Při aktivaci této možnosti se kontrolují data ještě jednou. Počet zkoušek zadejte v poli výběru.

Přítomnosti vysílat: Po spuštění volání předat přítomnost personálu na pager.

Deaktivované pokoje nezobrazovat: Deaktivované pokoje nebudou zobrazovány.

Pokoje poruchy nezobrazovat na monitoru: Při aktivaci nebudou pokojové defekty zobrazovány na monitoru.

Pokoje poruchy nepředávat na pager: Při aktivaci této možnosti se pokojové poruchy nepředávají na pager.

SÚ Následné poslání tónu jednoduché

GRZ Tonnachsendung einfach

Tonnachsendung abschalten Beginn 00:00:00 Ende 00:00:00

Následné poslání tónu vypnout

Někdy se žádá, např. v noci, aby nedocházelo k následnému vysílání tónu. K tomuto účelu se může následné vysílání tónu vypnout. Aktivujete možnost vysílání následného tónu kliknutím na čtvereček a zadejte interval pro vypnutí následného vysílání tónu.

Pozor: Ta funkce není k dispozici, pokud byla aktivována možnost Data displejů vysílat do SÚ

SÚ Následné vysílání tónu na všechny SÚ

GRZ Tonnachsendung (über alle GRZ)

Tonnachsendung aktiviert

in der Zeit von 10:28:03 Bis 10:28:03 RUF GRZ + Wert 10 Assis GRZ + Wert 20

Následné vysílání tónu aktivováno

Volání SÚ+hodnota

Asis SÚ+hodnota


Následné vysílání tónu aktivováno: Při aktivaci této možnost se následně vysílá tón na všechny SÚ. Do vstupního pole zadejte zahájení a ukončení.

Pozor:

Volání SÚ/+hodnota: Změny provádět výhradně servisními techniky firmy TADiCOM.


Asi SÚ+hodnota: Změny provádět výhradně servisními techniky firmy TADiCOM.

Nastavení pagingu / PBX

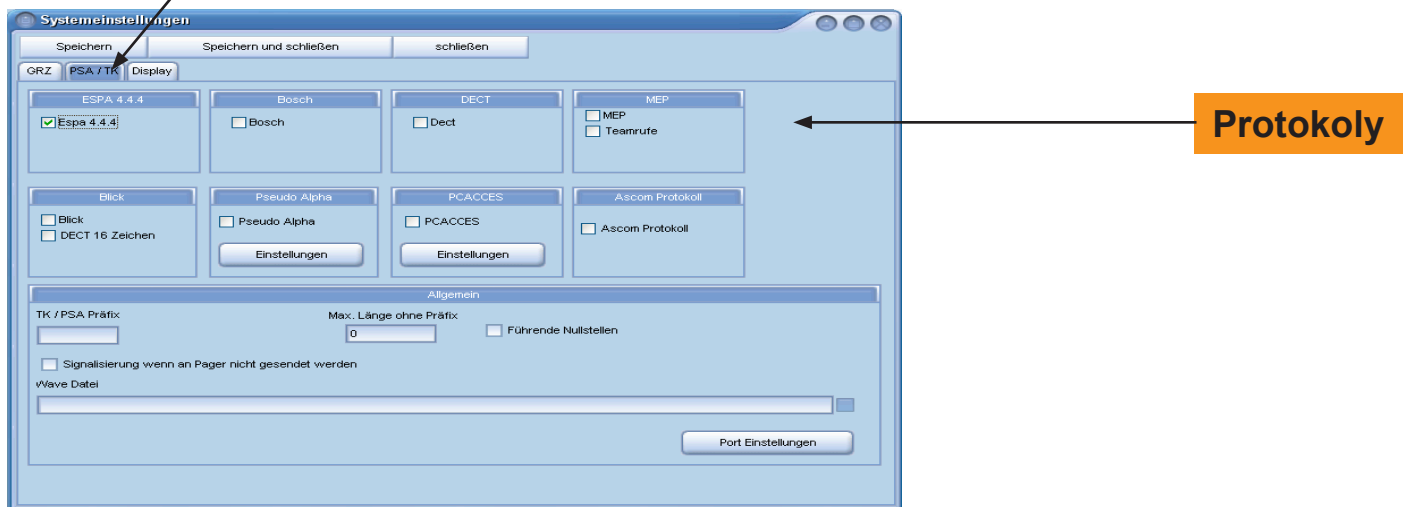

V okně protokolů vyberte příslušný protokol mezi volacím zařízením a alarmovým serverem. Toto nastavení by měli provádět pouze servisní technici.

U protokolu MEP může být dodatečně aktivováno nastavení teamového volání. U protokolu Pseudo Alpha a PCACCES se ještě musejí provádět další nastavení. Nastavení se dozvíte od výrobce PBX.

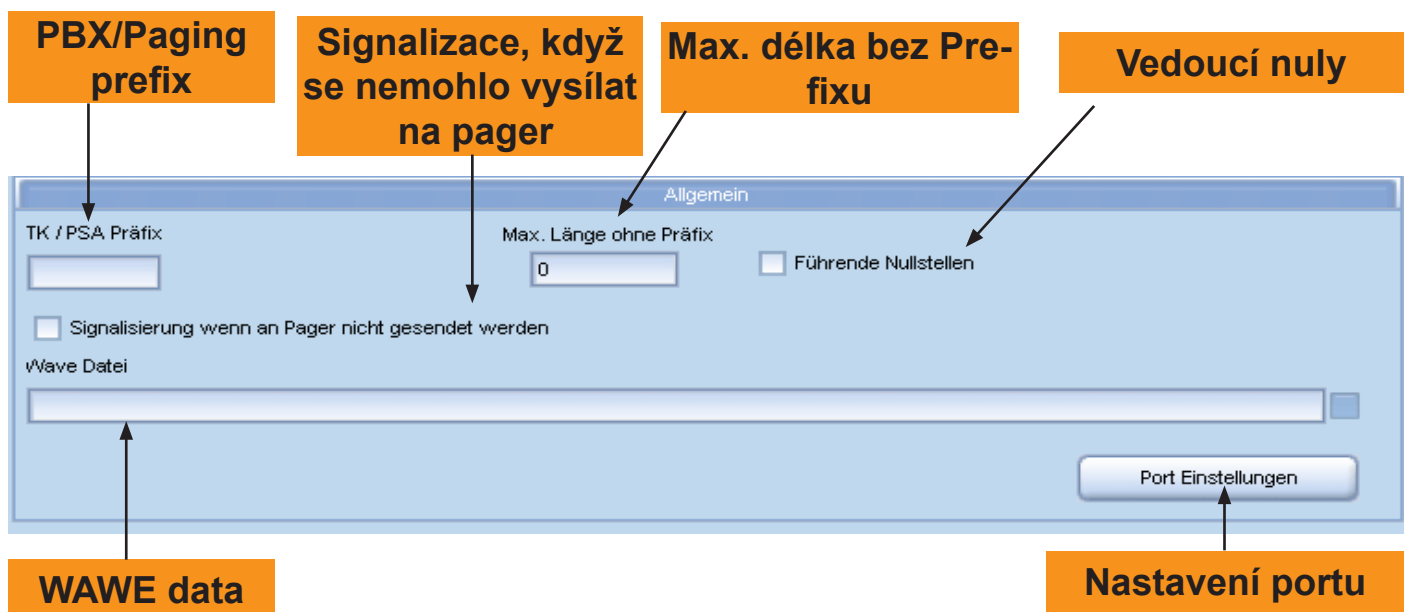

PBX/Paging prefix: Při použití prefixu se zapíše prefix do vstupní pole.


Max. délka bez prefixu: Délka adresy pageru (počet znaků) se zadá do vstupního pole.

Vedoucí nuly: Možnost aktivujte, jsou-li pro adresu pageru potřeba vedoucí nuly.


Signalizace, když se nemohlo vysílat na pager: Pokud jsou připojeny k PC reproduktory, lze při aktivaci této možnosti přes ně vysílat akustické signály, pokud událost nebyla vyslána na paging / PBX.

Wave data: Výběr souboru Wave pro akustickou signalizaci.

Nastavení portu: K nastavení sériové komunikaci mezi počítačem a pagingem / PBX: Tato nastavení by měli provádět pouze servisní technici TADiCOM.

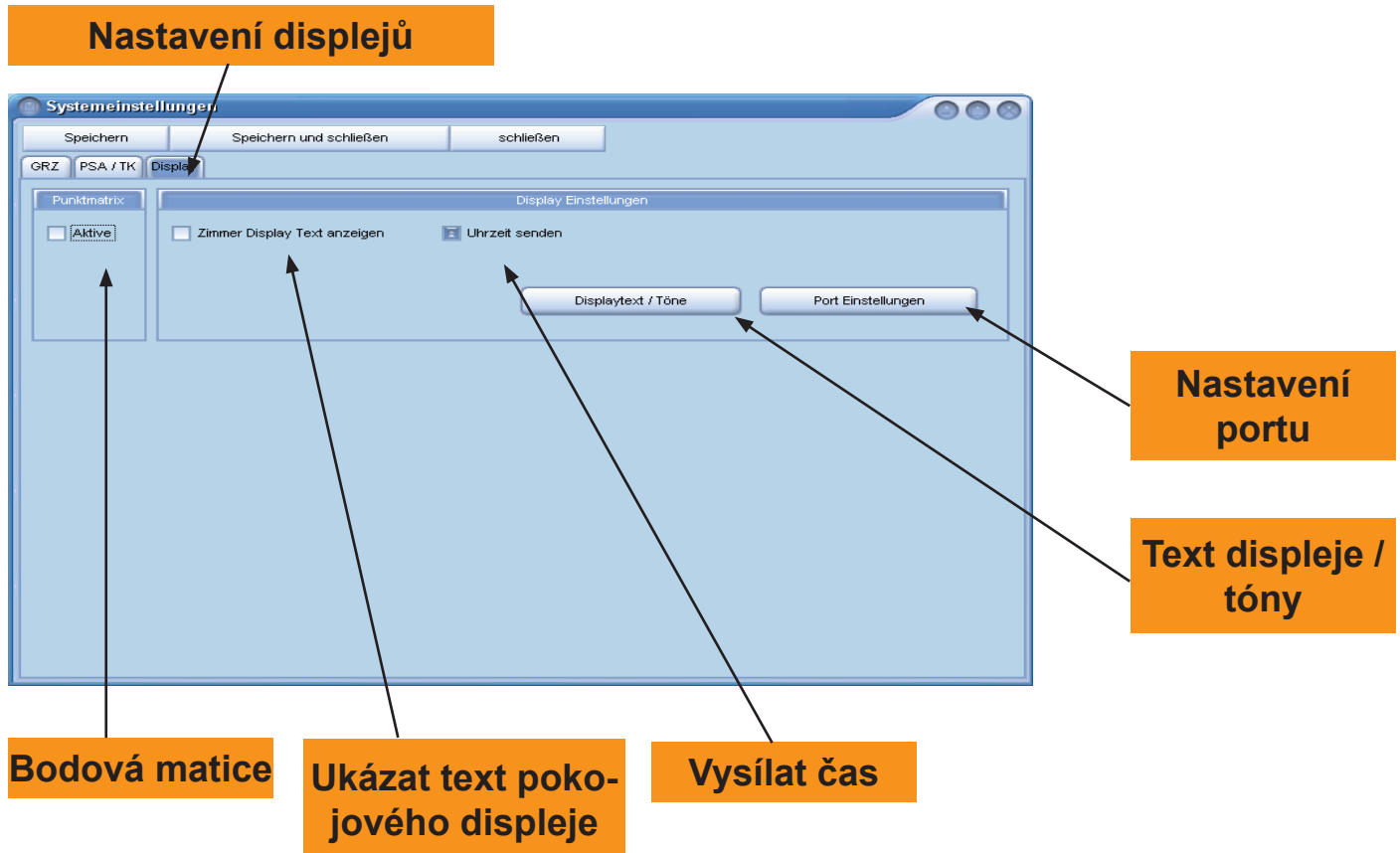

Bodová matice: pokud jsou připojeny displeje s bodovou maticí, musí být tato možnost aktivována.
Ukázat text pokojového displeje: Ve správě pokojů mohou být pro pokoj zapsány speciální texty displejů, při aktivaci této možnosti budou zobrazeny.
Vysílat čas: Pokud se nekoná žádná událost, bude při aktivaci této možnosti na displejích zobrazen čas. Pod nastavením portu se nastavují sérové parametry rozhraní pro komunikaci s displejem.

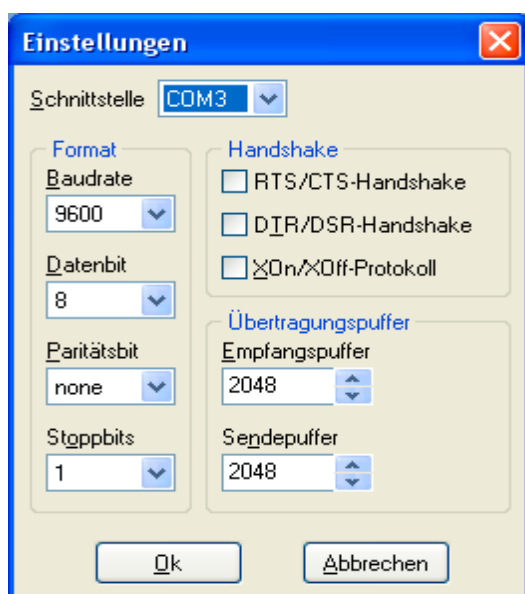

Pozor: Tato nastavení by měli být provedeny pouze servisním technikem.

Text displeje / tóny

Displayanzeige	Rufton	Ton erzwingen	Priorität
Ruf	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	3
Assistent	Rufton 2	<input type="checkbox"/> erzwingen	4
Anwesend	Kein Rufton	<input type="checkbox"/> erzwingen	2
WC Ruf	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	3
WC Assistent	Rufton 2	<input type="checkbox"/> erzwingen	4
Diagnose	Kein Rufton	<input type="checkbox"/> erzwingen	4
RUWl 1	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	3
RUWl 2	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	3
RUWl 3	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	3
Alarm	Rufton 3	<input type="checkbox"/> erzwingen	4
Defekt	Rufton 1	<input type="checkbox"/> erzwingen	1

Indikace textu displeje

Volací tón

Tón vynutit

Priorita

Indikace textu displeje: Vyberte zobrazení písmeny pro příslušnou událost.

Pozor: Mohou být zobrazeny jenom písmena, která jsou zobrazitelná na 7-segmentovém displeji.

Volací tón: Událostem můžete přiřadit různé volací tóny.

Tón vynutit: V nastavení směn či profilů můžete vypnut vysílání tónu. Zde nastavíte, že pro určitou událost bude vyslání tónu stejně vynuceno.

Priorita: Priorita vyslání displeje je při 4 nevyšší a při 1 nejnižší. Vyberte pro každou událost příslušnou prioritu s ohledem na zobrazení displeje. Události vyšší priority budou přednostně zobrazené.

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko **Uložit**.

24. Údaje klientů



Údaje klientů

Pokud by se měly změnit data klientů, klikněte v okně správy na tlačítko **Údaje klientů** a otevře se následující okno:

Vstupní datová pole

Pro změnu údajů klientů klikněte do vstupního datového pole. Zadání změny potvrďte kliknutím na tlačítko **Uložit**.

Důležité: Údaje klientů budou uvedeny do záhlaví reportu. Proto by měla být adresa vždy aktuální .

25. Skupiny volání



Skupiny volání

V okně správy můžete zřídit skupiny volání. Pro zřízení skupin volání klikněte na tlačítko **Skupiny volání** a ukáže se následující okno:

Nová skupina volání


Odstranit skupinu volání

Tabulka skupin volání

Místa volání skupin volání

V tomto okně můžete tvořit a spravovat skupiny volání. Zřízené skupiny volání se ukazují ve V-Scan a z tohoto modulu se mohou aktivovat nebo deaktivovat.

Nové skupiny volání

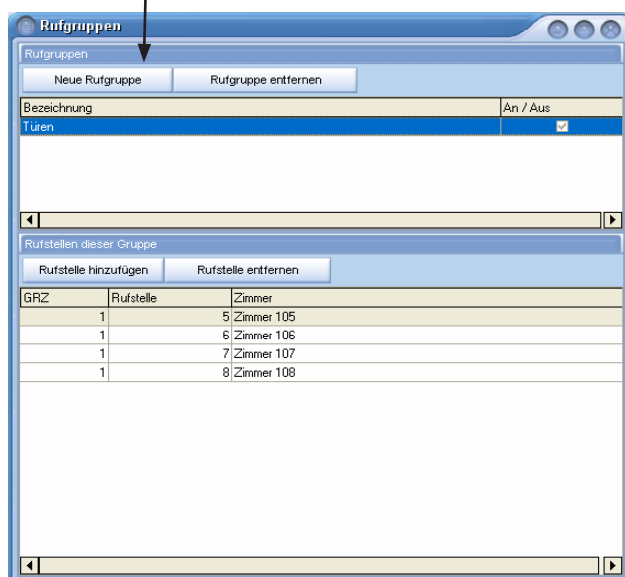


Pro zřízení nové skupiny volání klikněte na tlačítko **Nová skupina volání** a ukáže se následující okno:



Vstupní datové pole

Zapište do vstupního pole název pro skupinu a potvrďte zadání kliknutím na tlačítko **OK**.
Ukáže se tabulka pokojů, ze které můžete přiřadit zřízené skupině volání místo volání (pokoje).

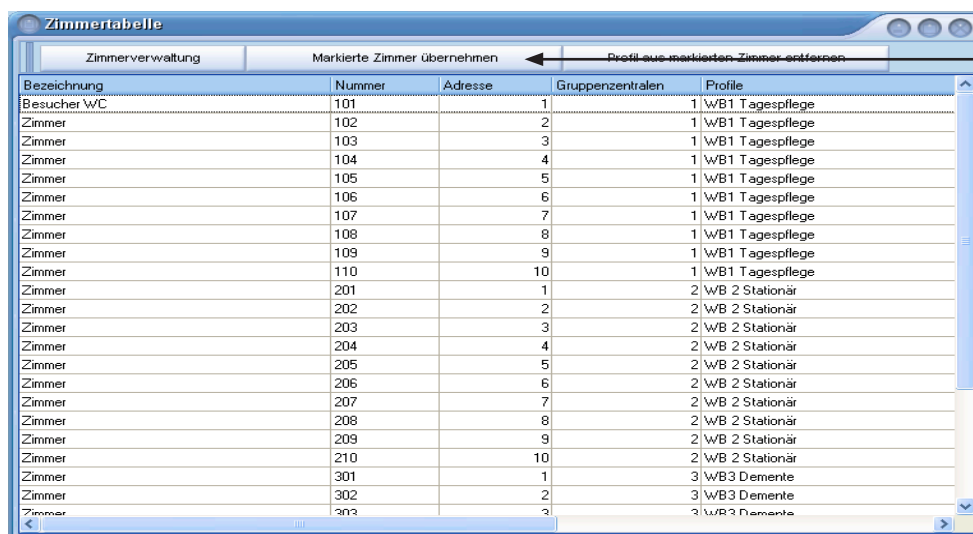

Převzít označené pokoje

Označte v pokojové tabulce pokoje, které mají k této skupině volání patřit. Pokud chcete označit současně více pokojů, tak držíte při označení na klávesnici tlačítko CTRL.

Pro přiřazení označeného pokoje ke skupině volání klikněte na tlačítko **Převzít označené pokoje**. Stisknutím na tlačítko **Odstranit profil z označených pokojů** můžete opět vymazat přiřazení skupin volání z pokojů

26. Přesměrování volání



Přesměrování volání

V oblasti správy můžete zřídit přesměrování volání. Pro zřízení přesměrování volání klikněte na tlačítko **Přesměrování volání** a ukáže se následující okno. Přesměrování volání slouží ke spojení míst volání (pokojů) a přesměrování volací události např. na druhou stanici.

Nové přesměrování

Vymazat přesměrování


Přidat / odstranit pokoje

Tabulka přesměrování volání


Pager k přesměrování volání

Displej k přesměrování volání


Pro zřízení jednoho přesměrování klikněte na tlačítko **Nové přesměrování** a otevře se následující okno.

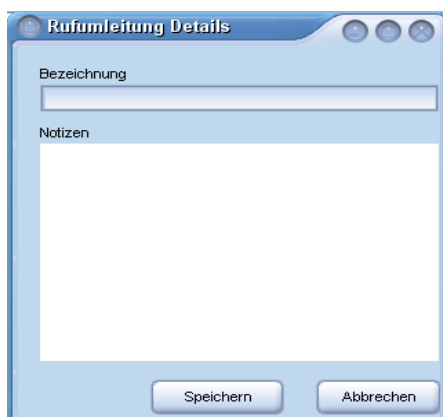

V okně Details přesměrování volání zadejte název pro přesměrování volání. Eventuálně můžete v poli poznámky zadat poznámky. Potvrďte zadání kliknutím na tlačítko **Uložit**.

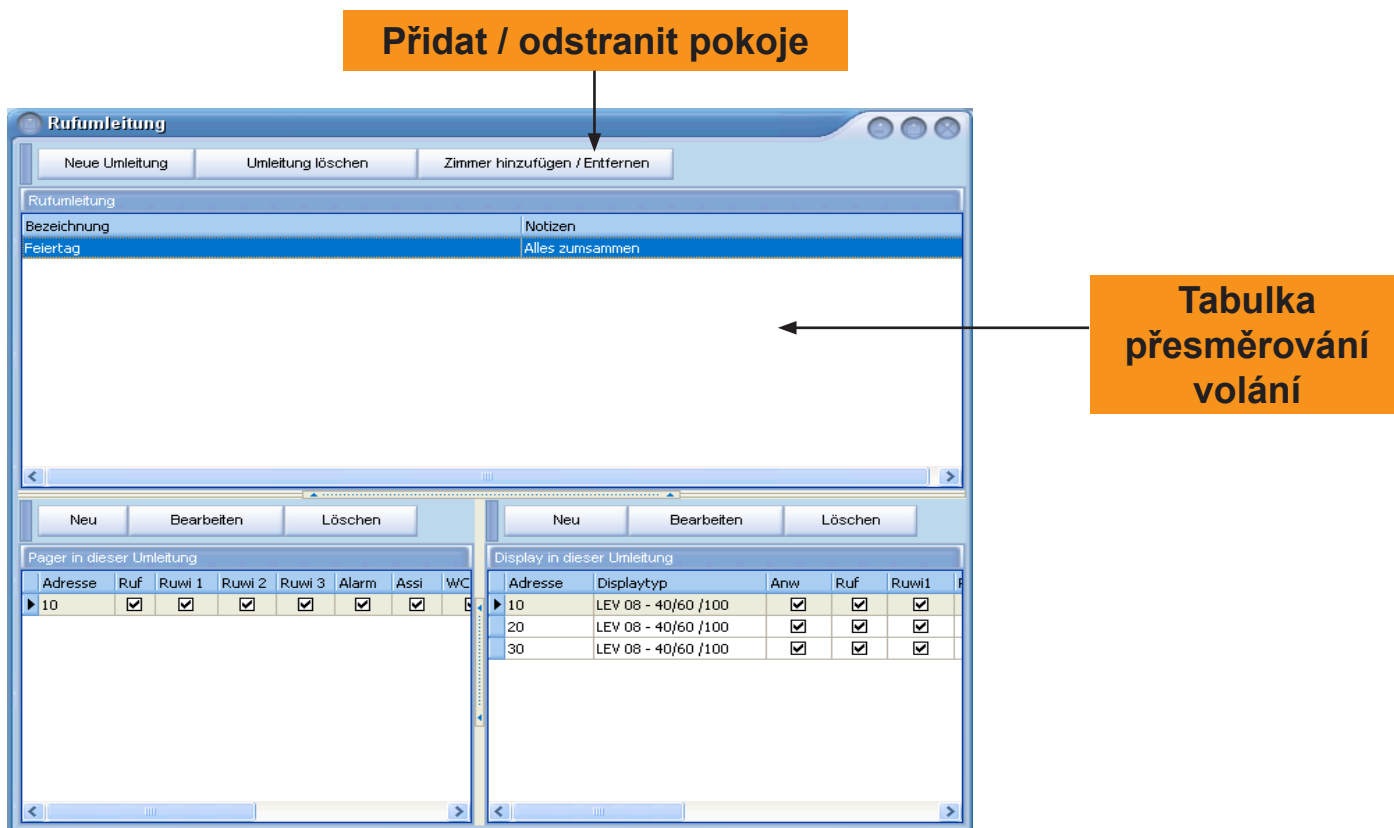

Pro přiřazení přesměrování pokoji označte přesměrování v tabulce a klikněte na tlačítko **Pokoje přidávat / odstranit** aby se přesměrování přiřadily pokoje z tabulky pokojů.

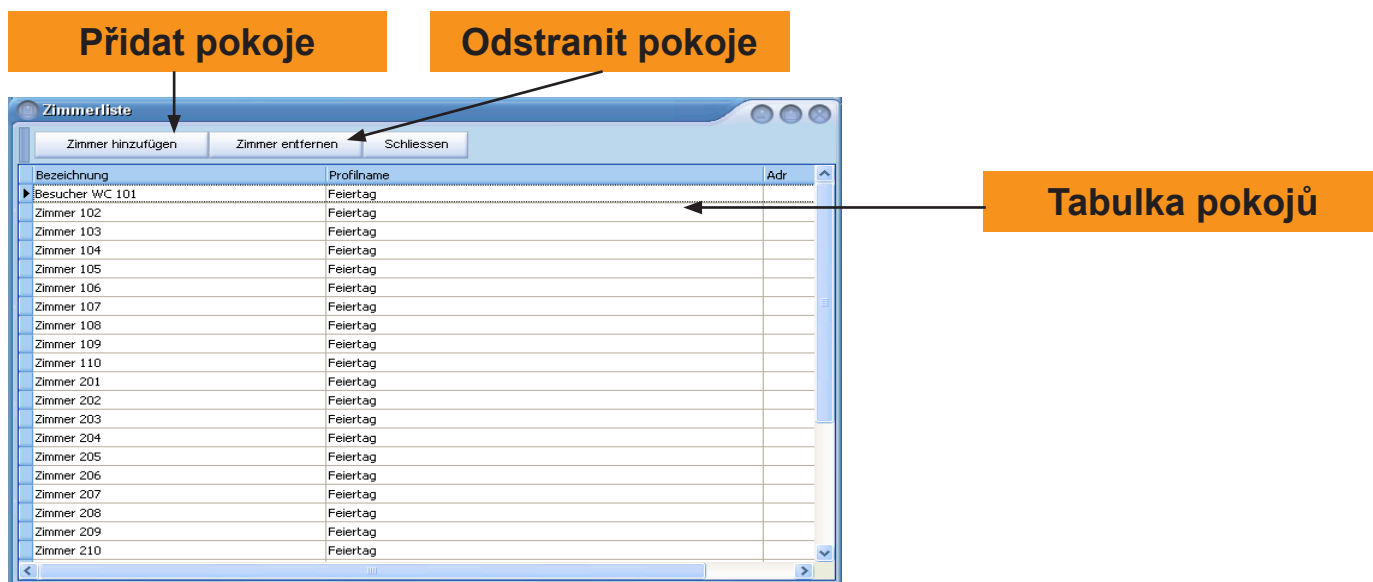


Označte v tabulce pokojů pokoje, které chcete přiřadit k tomuto přesměrování. Pokud současně chcete převzít více pokojů, tak držíte při označení tlačítko CTRL. Po označení pokojů klikněte na tlačítko **Přidat pokoje**. Pro vymazání zřízených pokojů z přesměrování volání označte příslušné pokoje a klikněte na tlačítko **Odstranit pokoje**. Na konci klikněte na tlačítko **Ukončit**

27. SQL Setup



V oblasti správy můžete provádět změny v SQL-Setup. Klikněte na tlačítko **SQL-Setup** a otevře se následující okno:

Pozor: Nastavení by měli provádět jenom servisní technici.

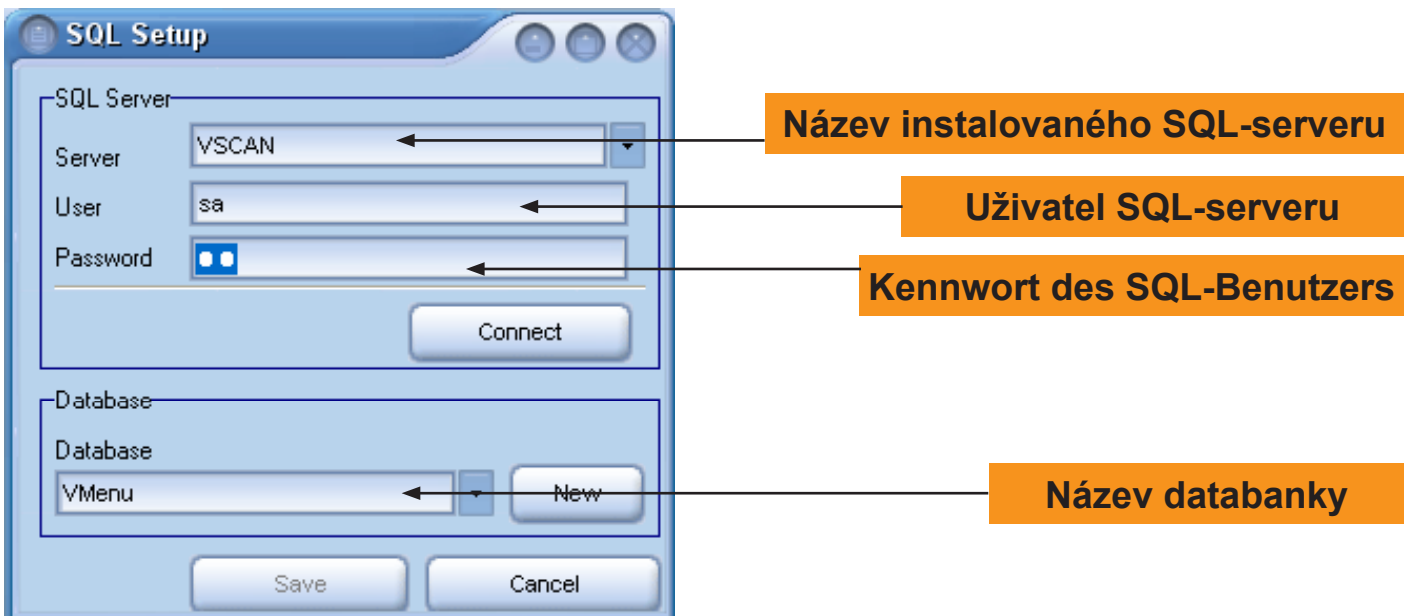

Údaje serveru, uživatele a kódu jsou už zapsány a neměli být změněny. Pokud byl už instalován SQL-server, obraťte se na administrátora aby jste dostali potřebná data. Pro nastavení připojení k serveru klikněte na tlačítko **Connect**. Při sestaveném připojení je tlačítko **Save** aktivní a může sloužit k uložení nastavení.


28. Tabulka jazyků




Tabulka jazyků

Pro otevření tabulky klikněte v okně správy na tlačítko Tabulka jazyků.

Pozor: Tabulku smí obsluhovat jenom servisní technici firmy TADiCOM.

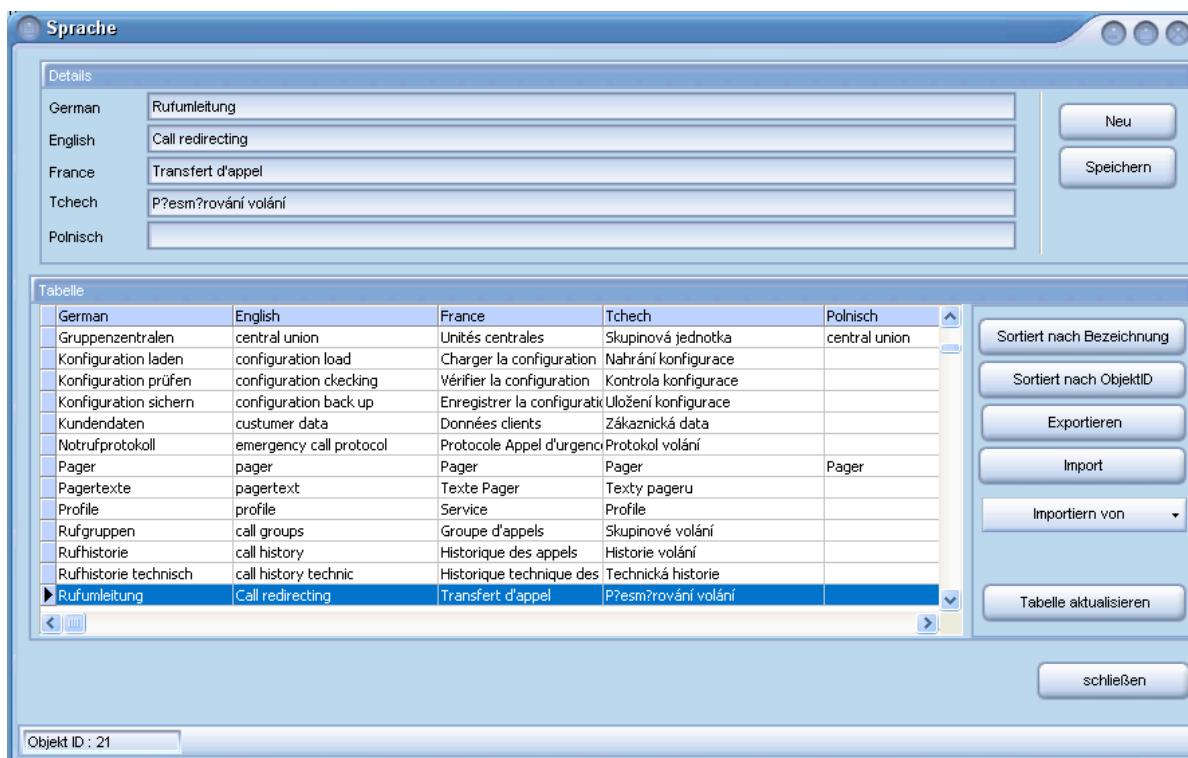


Informace o systému

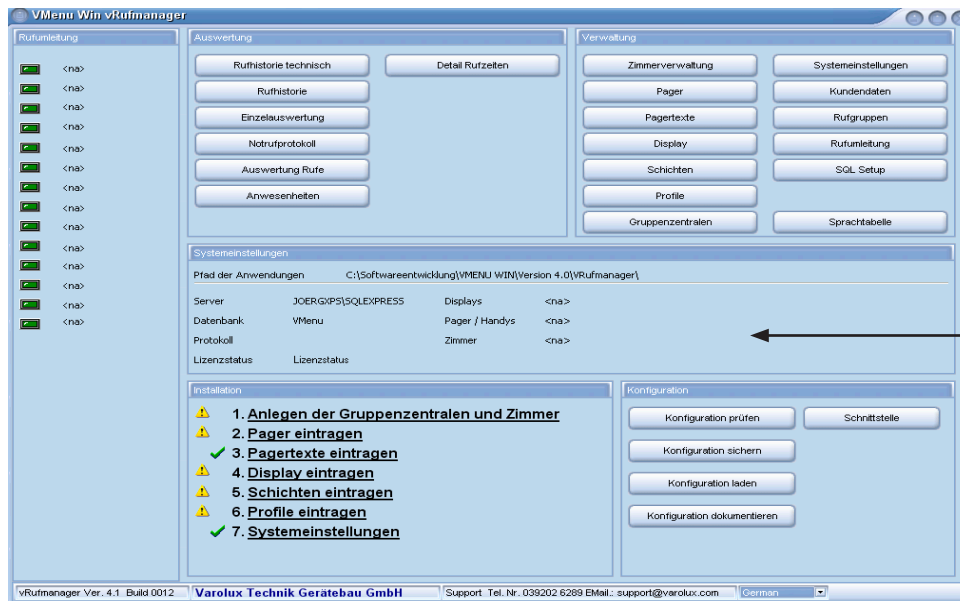

Nastavení systému

Na úvodní straně V-Manageru volání vidíte v oblasti nastavení systému informaci k nastavením.

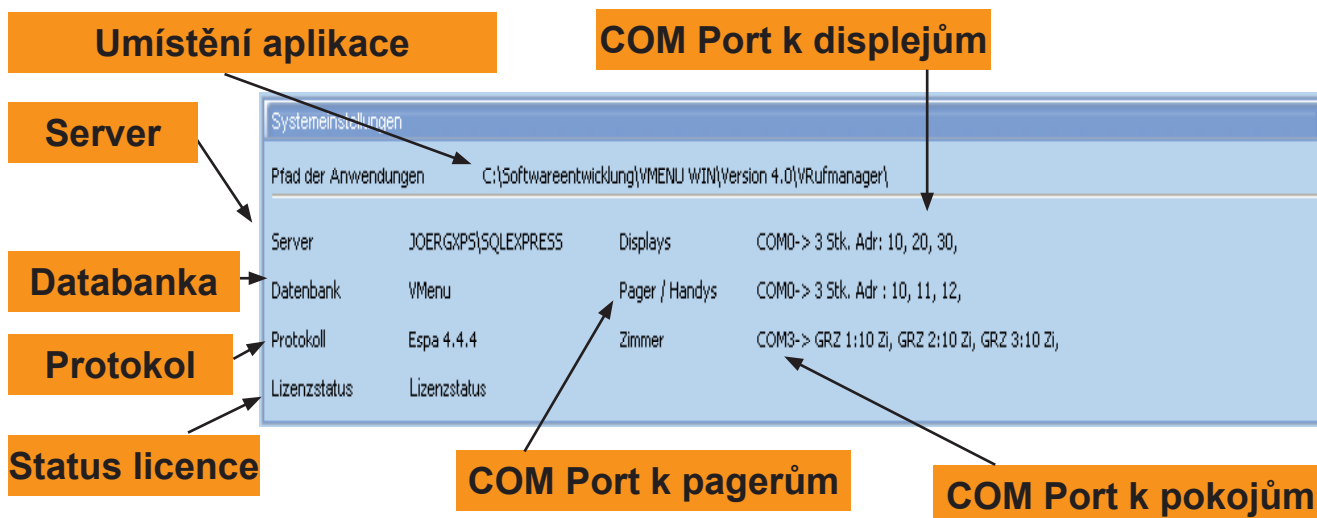

Umístění aplikace: Cesta, k umístění programu

Server: Název SQL-serveru, do kterého má přístup V-MENU –WIN

Databanka: Název databanky

Protokol: Protokol pro komunikaci mezi konvertorem alarmu a V-Scanem.

Status licence: Status licence

COM Port k displeji: Počet displejů a adresy displejů

COM Port k pageru: Počet pagerů a adresy pagerů

COM Port k pokojí: COM Port pro komunikaci mezi skupinovou ústřednou a V-Scanem, počet skupinových ústředn a příslušných pokojů (volacích míst).


Konfigurace



V oblasti konfigurace úvodní strany V-Manageru volání mohou být konfigurace zkoušeny, nahrávány, uloženy a dokumentovány.

Kontrolovat konfiguraci

Uložit konfiguraci

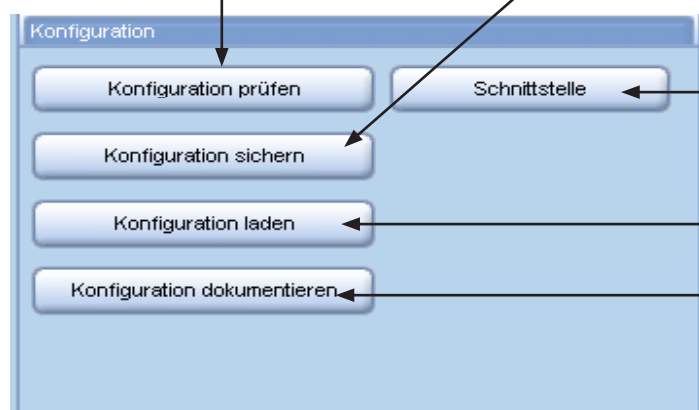

Rozhraní


Nahrát konfiguraci

Dokumentovat konfiguraci

29. Kontrolovat konfiguraci


Pro kontrolu konfigurace klikněte na tlačítko **Kontrolovat konfiguraci** a otevře se následné okno:

Status konfigurace

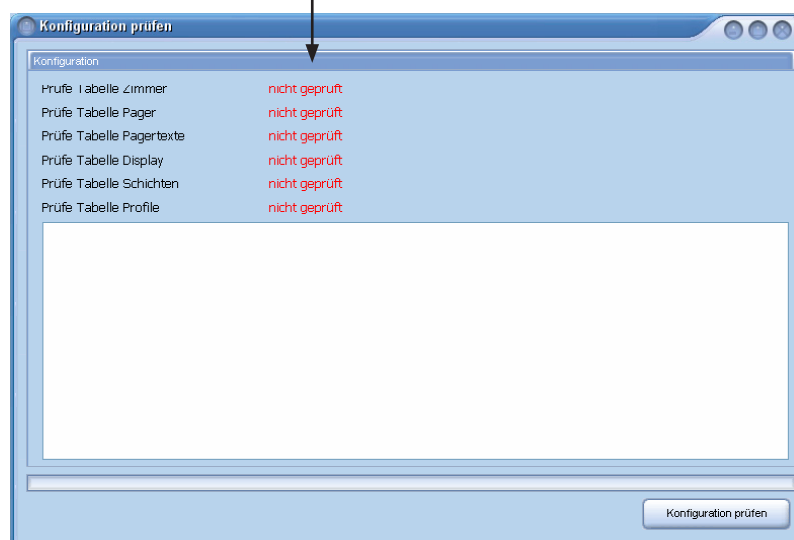

Pro spuštění klikněte na tlačítko **Kontrolovat konfiguraci**.


Zkoušené prvky

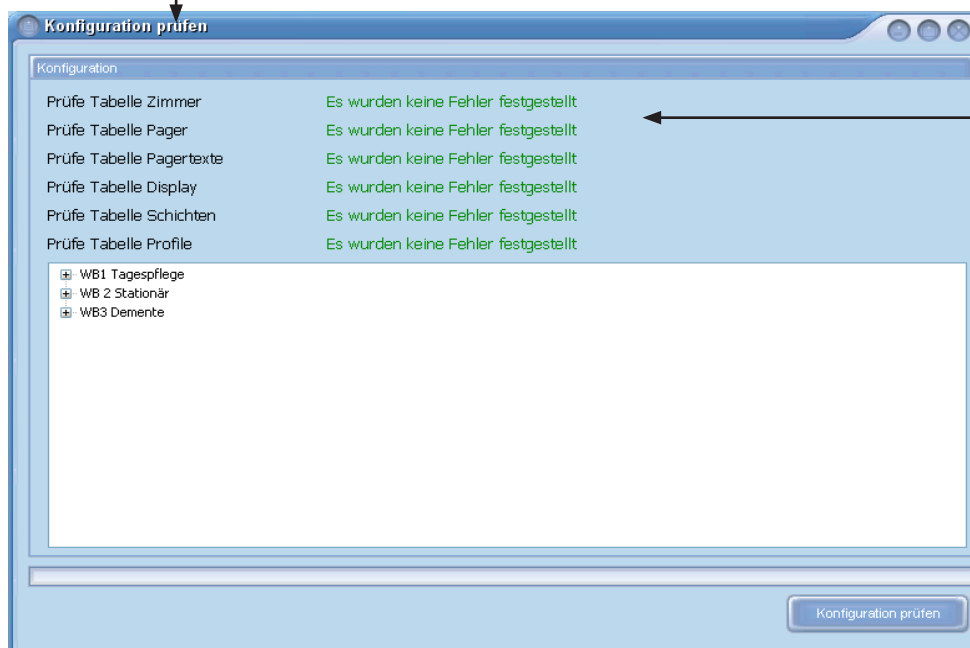

Výsledek kontroly

Pokud nebyly zjištěny v konfiguraci zkoušených prvků žádné chyby, zobrazí se bezchybný status zeleným písmem „Nebyly zjištěny žádné chyby“.


Výsledek kontroly

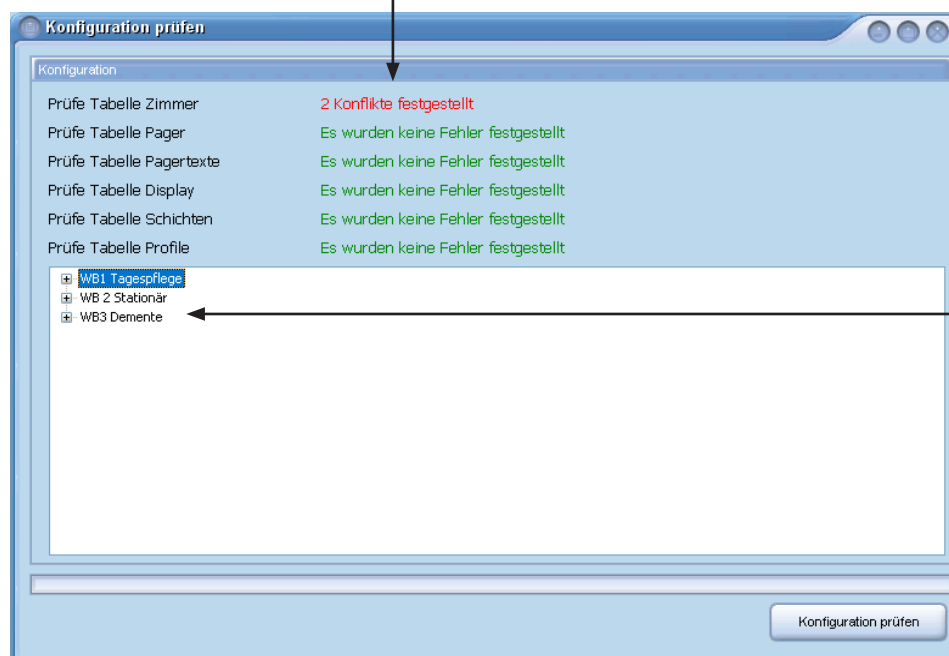

Místo chyby

Pokud byly zjištěné chyby, tak zobrazí se červeným písmem „Byly zjištěny konflikty“. Ve spodní části okna se zobrazí místo konfliktu.


30. Uložit konfiguraci

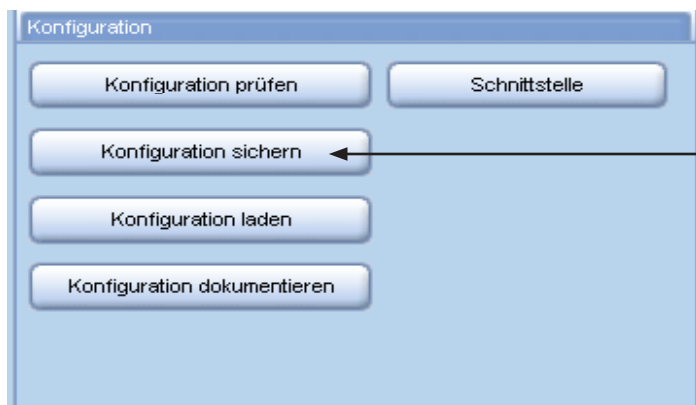

Uložit konfiguraci

V oblasti konfigurace můžete konfiguraci uložit kliknutím na tlačítko Uložit konfiguraci. Ukáže se okno.


Umístění záložních souborů

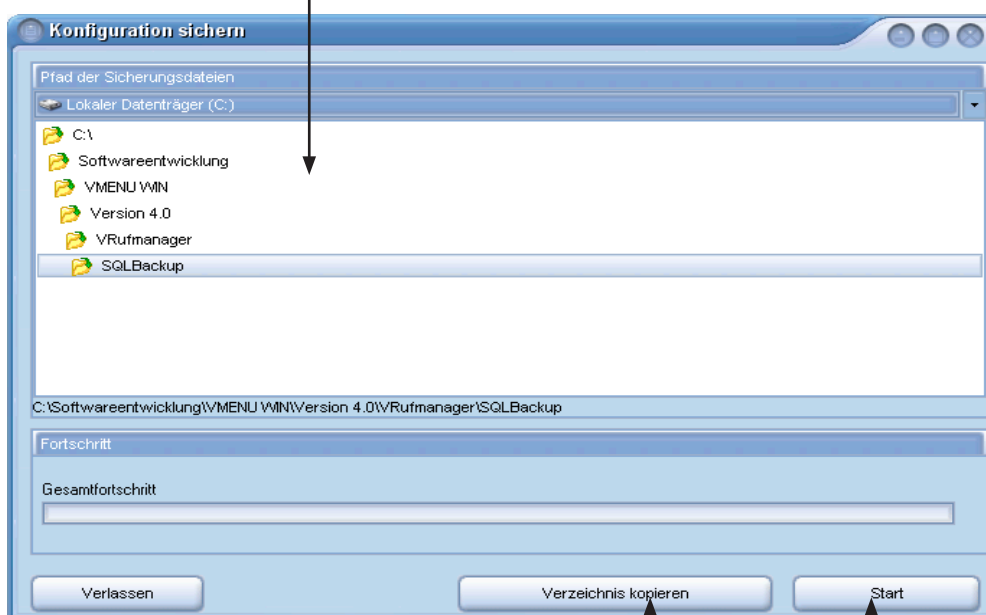

Kopírovat seznam

Spustit uložení


Automaticky se zobrazí přednastavená záložna cesta, která by neměla být měněna.

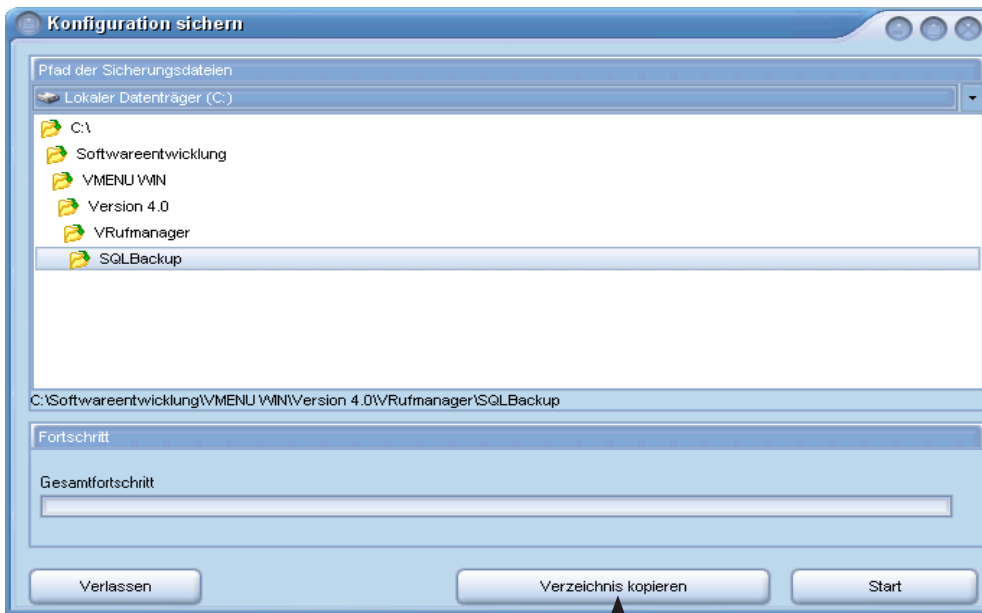

Seznam kopírovat

Pro uložení dat na externí média, klikněte na tlačítko **Kopírovat seznam** a otevře se následující okno:


Uložit externě

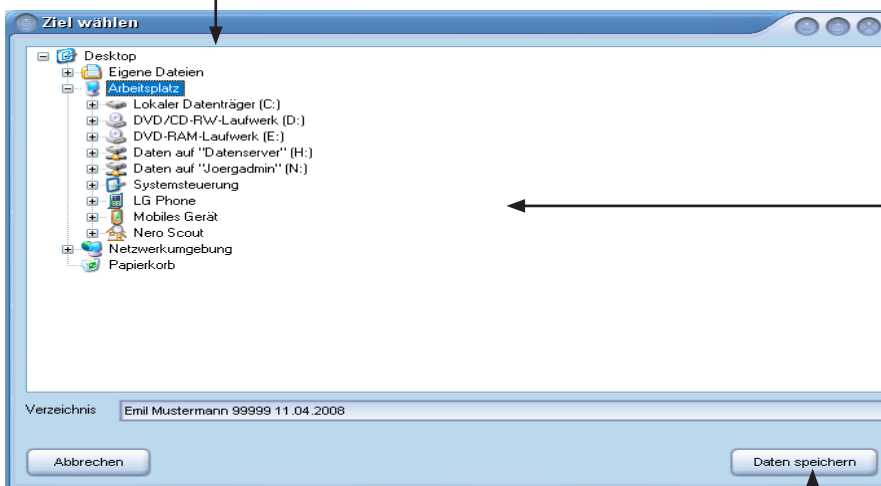

Výběr média uložení


Uložit data

V okně Volit cíl vyberte příslušná media (místo uložení) a klikněte na tlačítko **Uložit data**. Kopie adresáře bude uložena na vybraném místě nebo do vybraných médií.

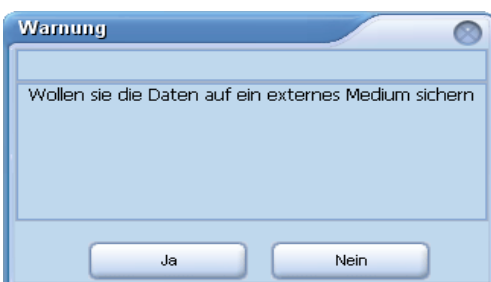


Při uložení kopie adresáře na externí paměťová média se otevře okno s varováním. Uložení potvrďte kliknutím na tlačítko **Ano**.

31. Nahrát konfiguraci

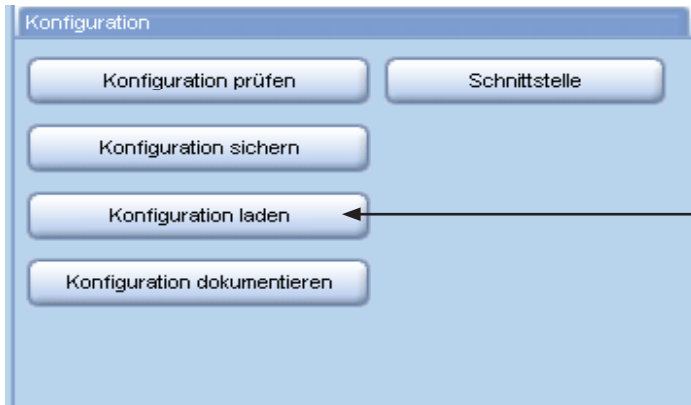


Nahrát konfiguraci

Pro nahrání uložených konfigurací klikněte v okně konfigurace na tlačítko **Nahrát konfiguraci** a otevře se následující okno:

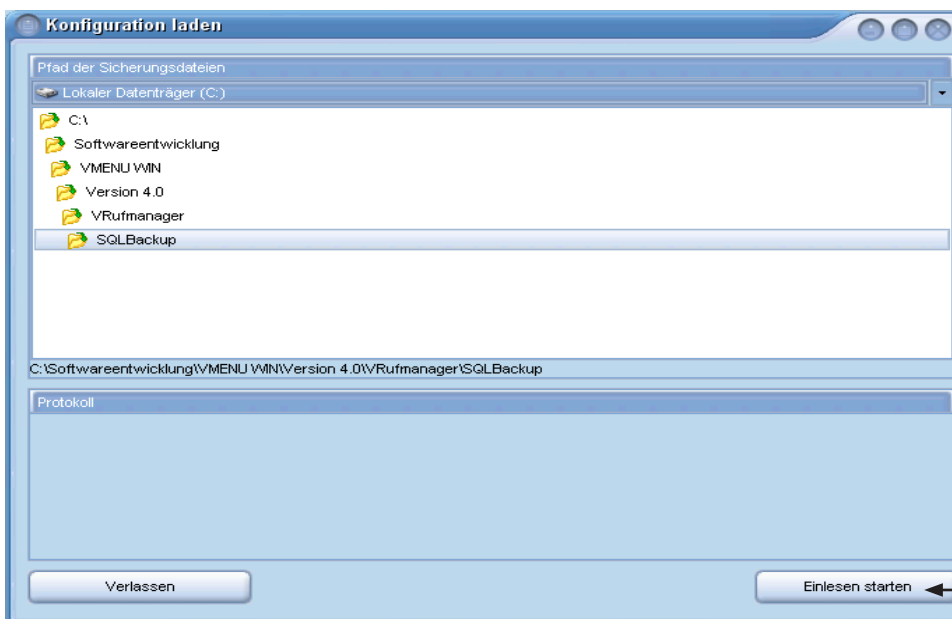

Spustit čtení


Pro spuštění konfigurace klikněte na tlačítko **Spustit čtení**. Otevře se okno s varováním:

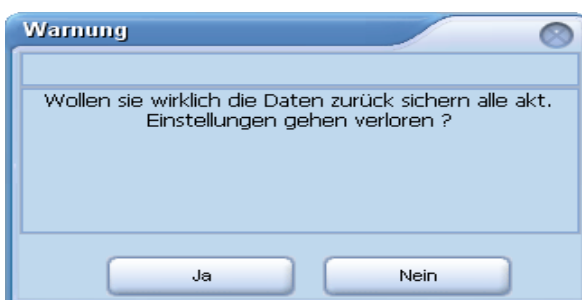

Nahrání konfigurace potvrďte kliknutím na tlačítko **Ano**. Pro přerušení postupu klikněte na tlačítko **NE**.

Data budou čteny zpět. Všechny základní údaje kromě historie volání a historie pagerů budou načteny zpět.


32. Dokumentovat konfiguraci

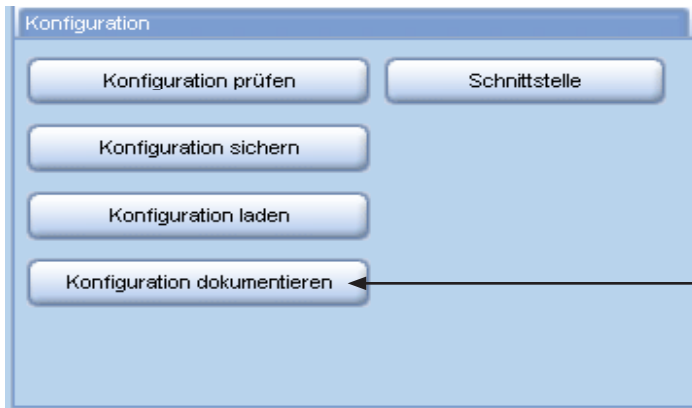

Dokumentovat konfiguraci

Pro dokumentaci konfigurace klikněte v okně konfigurace na tlačítko **Dokumentovat konfiguraci** a otevře se následující okno:

Skupinová ústředna - přiřazení adres

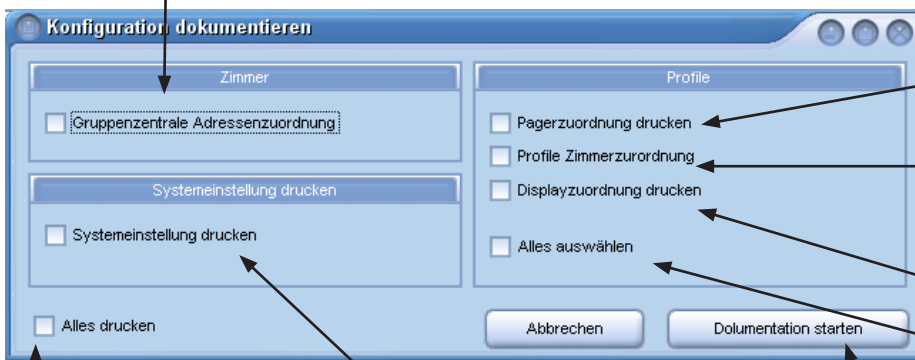

Přiřazení pagerů

Profil přiřazení pokojů

Přiřazení displejů

Vybrat všechno

Tisknout nastavení systému

Spustit dokumentaci

Tisknout všechno

V tomto okně můžete vybírat, kterou konfiguraci chcete dokumentovat reportem. Klikněte na příslušná políčka výběru .

Při výběru se ukazuje zelený háček. Pomocí možnost Tisknout všechno budou vytištěny všechny reporty ke konfiguracím (Skupinové ústředně přiřazení adres, nastavení systému, přiřazení pagerů, přiřazení displejů a přiřazení pokojů).

V oblasti profilů můžete kliknutím na políčko výběru Vybrat všechno vytisknout všechny reporty konfigurace k profilům (přiřazení pagerů, přiřazení displejů, přiřazení pokojů). Po výběru klikněte na tlačítko **Spustit dokumentaci** a vybrané reports budou nastaveny.

1.Report: Přiřazení adres skupinové ústředně

Zuordnung der Adressen (Zimmer) zu den Gruppenzentralen 99999 Emil Mustermann								
ADR	Bezeichnung	Nummer	Aktiv	Profil	Pagertext	Disptext	LEV 08/40	
GRZ Nr. 1								
1	Besucher WC	101	Ja	WB1 Tagespflege	Besucher WC	101	101	101
2	Zimmer	102	Ja	WB1 Tagespflege		102	102	102
3	Zimmer	103	Ja	WB1 Tagespflege		103	103	103
4	Zimmer	104	Ja	WB1 Tagespflege		104	104	104
5	Zimmer	105	Ja	WB1 Tagespflege		105	105	105
6	Zimmer	106	Ja	WB1 Tagespflege		106	106	106
7	Zimmer	107	Ja	WB1 Tagespflege		107	107	107
8	Zimmer	108	Ja	WB1 Tagespflege		108	108	108
9	Zimmer	109	Ja	WB1 Tagespflege		109	109	109
10	Zimmer	110	Ja	WB1 Tagespflege		110	110	110
GRZ Nr. 2								
1	Zimmer	201	Ja	WB 2 Stationär		201	201	201

2. Report: Nastavení systému

Systemeinstellungen	
Kunden Nr.	99999
Projekt	Emil Mustermann
Zusatz	
Strasse	Musterstr. 10
PLZ Ort	3932 Musterstadt
Telefon	
Telefax	
Prog. Vers.	vRufmanager Ver. 4.1 Build 0012
Pfad der Anwendung	C:\Softwareentwicklung\VMENU WIN\Version 4.0\VRufmanager\
Name der Datenbank	VMenu
GRZ Einstellungen	COM3-> GRZ 1:9 Zi, GRZ 2:10 Zi, GRZ 3:10 Zi,
Displayeinstellungen	COM0-> 3 Stk. Adr: 10, 20, 30,

3. Report: Přřazení pagerů

Zuordnung der Pager		99999 Emil Mustermann													
Adresse	Schichtbezeichnung	Ruwi	Start	Ende	Ruf	Anw	Ruwi1	Ruwi2	Ruwi3	Alarm	Assis	WCRuf	WCASS	Di	
WB3 Demente															
12	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
12	Tagschicht	2	06:00:00	21:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
WB1 Tagespflege															
12	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
11	Tagschicht	2	06:00:00	21:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
WB 2 Stationär															
11	Tagschicht	2	06:00:00	21:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
11	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	


4. Report: Přřazení pokojů

Zimmerliste Zuordnung Wohnbereich		99999 Emil Mustermann						
Aktiv	Bezeichnung	Nummer	ADR	GRZ	Display	LEV 8 /40	Pagertext	
WB1 Tagespflege								
Ja	Besucher WC	101	1	1	101	101	Besucher WC 101	
Ja	Zimmer	102	2	1	102	102	102	
Ja	Zimmer	103	3	1	103	103	103	
Ja	Zimmer	104	4	1	104	104	104	
Ja	Zimmer	105	5	1	105	105	105	
Ja	Zimmer	106	6	1	106	106	106	
Ja	Zimmer	107	7	1	107	107	107	
Ja	Zimmer	108	8	1	108	108	108	
Ja	Zimmer	109	9	1	109	109	109	
Ja	Zimmer	110	10	1	110	110	110	
WB 2 Stationär								
Ja	Zimmer	201	1	2	201	201	201	
Ja	Zimmer	202	2	2	202	202	202	
Ja	Zimmer	203	3	2	203	203	203	
Ja	Zimmer	204	4	2	204	204	204	
Ja	Zimmer	205	5	2	205	205	205	


5. Report: Přřazení displejů

Adresse	Schichtbezeichnung	Ruwi	Start	Ende	Ruf	Anw	Ruwi1	Ruwi2	Ruwi3	Alarm	Assis	WCRuf	WCASS	Dis
WB3 Demente														
30	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
10	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
30	Tagschicht	2	06:00:00	21:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
WB1 Tagespflege														
30	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
10	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
10	Tagschicht	2	06:00:00	21:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
WB 2 Stationär														
30	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
10	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20	Tagschicht	2	06:00:00	21:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20	Nachtschicht	3	22:00:00	05:59:00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

33. Rozhraní

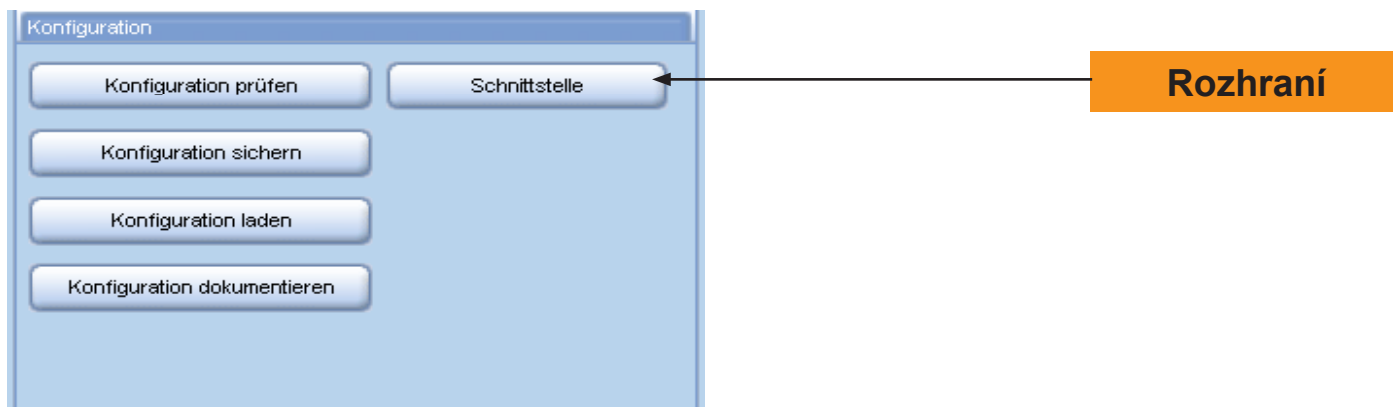

Klikněte na tlačítko **Rozhraní** a otevře se následující okno:

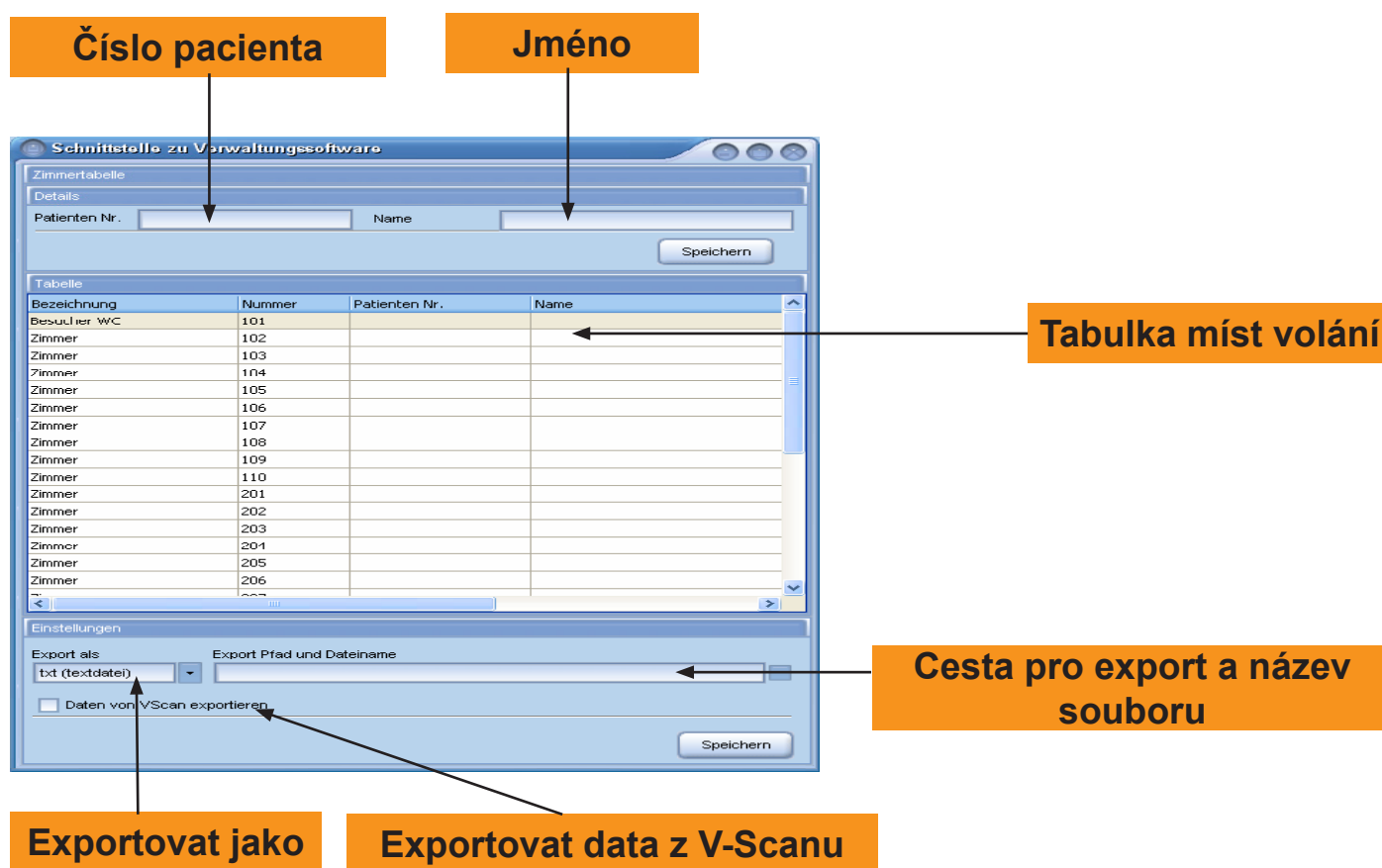

Číslo pacienta: K identifikaci obyvatelů. Pomocí čísel pacientů budou místa volání přiřazena pacientům.

Jméno: Jméno pacienta může být zapsáno.

Tabulka míst volání: Zobrazí se místa volání s příslušnými pacienty.

Cesta pro export a název souboru: Výběr místa uložení exportovaného souboru.

Exportovat data z V-Scanu: Při volbě této možnosti uloží V-Scan všechny protokolované události v exportovaném souboru. Data jsou zpracována tak, aby je software pro správu mohl číst.

Exportovat jako: Zvolte formát souboru pro export.

3. Návod k použití V-Scanu

The screenshot shows the VScan software interface. On the right side, four orange callout boxes with arrows point to specific elements:

- Status SÚ**: Points to the time display '07:58:17'.
- Status systému**: Points to the system status section containing several green status icons and labels like 'Gruppenzentralen', 'PSA / TK Anlage', and 'Display'.
- Status skupin volání**: Points to the 'Status der Rufgruppen' section, which shows 'Feiertag' and 'Sonntag'.
- Aktuální Scany**: Points to the 'Aktuelle Scans' table.

Datum	Uhrzeit	Ereignis	Ort	Status	Profil
08.04.2008	07:57:34	DEFEKT	Zimmer 101	Pollen nicht möglich	wB1
08.04.2008	07:57:35	RUF	Zimmer 107	Pollen nicht möglich	wB1
08.04.2008	07:57:35	ANW	Zimmer 105	ANW	wB1
08.04.2008	07:57:35	ANW	Zimmer 104	ANW	wB1
08.04.2008	07:57:39	RUF	Zimmer 207	Schicht inaktiv	wB 2
08.04.2008	07:57:39	ANW	Zimmer 205	Schicht inaktiv	wB 2
08.04.2008	07:57:39	ANW	Zimmer 204	Schicht inaktiv	wB 2
08.04.2008	07:57:39	ANW	Zimmer 203	Schicht inaktiv	wB 2
08.04.2008	07:57:40	RUF	Zimmer 307	Pollen nicht möglich	wB 3
08.04.2008	07:57:40	ANW	Zimmer 305	ANW	wB 3

This screenshot provides a detailed view of the top status bar of the VScan interface. Orange callout boxes with arrows explain the following elements:

- Status SÚ**: Points to the time '07:58:17'.
- Skenovat aktuální SÚ**: Points to the text 'Scane Gruppenzentrale 3'.
- zobrazení LED**: Points to the three status LEDs (green, yellow, green).
- Skupinové ústředny**: Points to the label 'Gruppenzentralen'.
- Displej**: Points to the label 'PSA / TK Anlage'.
- Paging / PBX**: Points to the label 'Display'.
- Čas**: Points to the time '07:58:17'.

Skenovat aktuální skupinové ústředny: Zobrazí, která skupinová ústředna se skenuje. Zobrazení zeleným písmem znamená, že neexistuje žádná chyba v komunikaci.


Zobrazení LED: Zobrazí aktuální status příslušných prvků, Zelené zobrazení znamená žádná akce a žluté zobrazení, že se koná akce.

Skupinové ústředny: Zelená LED znamená žádná akce, žlutá LED ukazuje skenování skupinových ústředen.

Paging / PBX: Zelená LED znamená žádná akce, žlutá LED znamená vyslání na paging / PBX.

Displej: Zelená LED znamená žádná akce, žlutá LED znamená vyslání na displej.

Čas: Aktuální čas bude zobrazen.

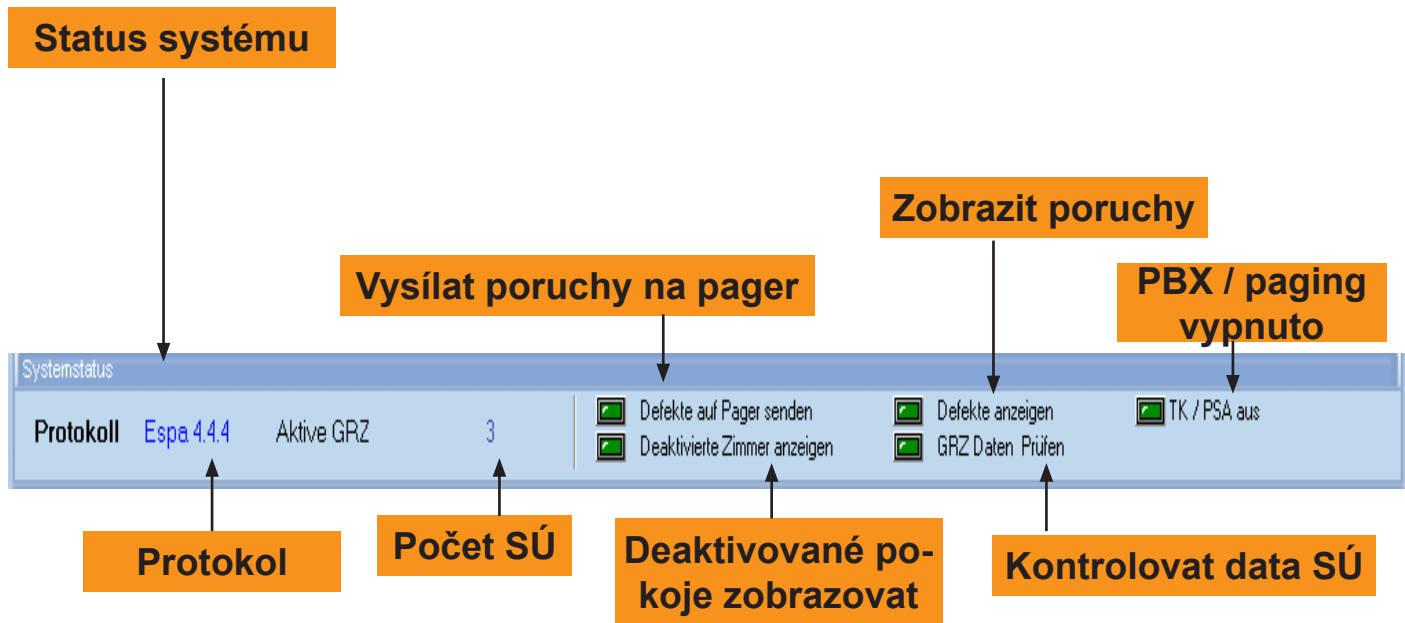

Kliknutím na LED můžete změnit status z aktivního na neaktivní nebo naopak.

Protokol: Zobrazí se druh protokolu mezi počítačem a pagingem. Je možné změnit druh protokolu ve VManageru volání, pod bodem nastavení systému.

Počet SÚ: Zobrazení počtu skupinových ústředěn.


Vysílat poruchu na pager: Červená LED znamená, že poruchy budou vysílány na pager. Zelená LED znamená, že na pager nebudou vysílány žádné poruchy.

Zobrazovat poruchy: Zelená LED znamená, že poruchy elektronických modulů budou zobrazeny. Červená LED - nezobrazeny žádné poruchy, protože funkce Zobrazovat poruchy byla deaktivována.

PBX / paging vypnuto: Zelená LED znamená, že události budou vydány na PBX / paging a Červená LED znamená, že žádné události nebudou vysílány na PBX / paging.

Deaktivované pokoje zobrazovat: Ve V-Manageru volání mohou být ve správě pokojů deaktivované pokoje, ty nebudou zohledněny při záznamu dat volacích procesů. Červená LED znamená, že deaktivované pokoje nebudou zobrazeny, Zelená LED znamená, že deaktivované pokoje budou zobrazeny.

SÚ kontrolovat Data: Ve V-Manageru volání může být aktivována funkce opakované kontroly dat SÚ. Zelená LED znamená, že data skupinových ústředěn nebudou ještě jednou kontrolována, tj. funkce je deaktivována. Červená LED znamená, že data SÚ budou ještě jednou kontrolována, tj. funkce je aktivována

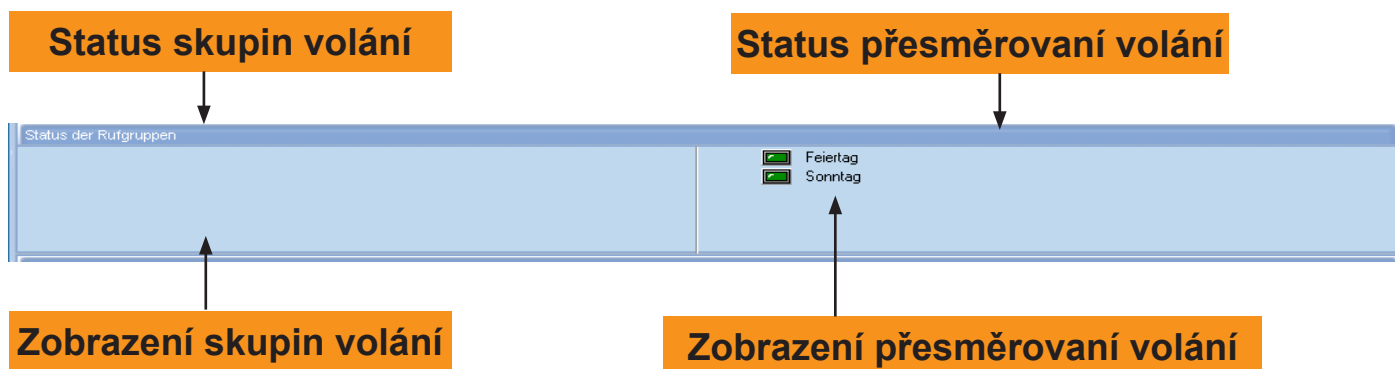

Zobrazení skupin volání: Tyto ve V-Manageru volání zřízené skupiny volání se zobrazí. Červená LED znamená, že skupina volání je aktivována. Zelená LED znamená, že skupina volání je deaktivována. Kliknutím LED můžete změnit status.

Zobrazení přesměrování volání: Tyto ve V-Manageru volání zřízené skupiny volání se zobrazí. Červená LED znamená, že přesměrování volání je aktivováno. Zelená LED znamená, že přesměrování volání je deaktivováno. Kliknutím na LED můžete změnit status.

Aktuální scany

Datum **Čas** **Místo** **Status** **Profily**

Kuelle: Scans
Schriftgröße

atum	Uhrzeit	Ereignis	Ort	Status	Profile
3.04.2008	07:57:34	DEFEKT	Zimmer 101	Pollen nicht möglich	WB1
3.04.2008	07:57:35	RUF	Zimmer 107	Pollen nicht möglich	WB1
3.04.2008	07:57:35	ANW	Zimmer 105	ANW	WB1
3.04.2008	07:57:35	ANW	Zimmer 104	ANW	WB1
3.04.2008	07:57:39	RUF	Zimmer 207	Schicht inaktiv	WB 2
3.04.2008	07:57:39	ANW	Zimmer 205	Schicht inaktiv	WB 2
3.04.2008	07:57:39	ANW	Zimmer 204	Schicht inaktiv	WB 2
3.04.2008	07:57:39	ANW	Zimmer 203	Schicht inaktiv	WB 2
3.04.2008	07:57:40	RUF	Zimmer 307	Pollen nicht möglich	WB 3
3.04.2008	07:57:40	ANW	Zimmer 305	ANW	WB 3

Velikost písma **Událost** **Tabulka**

Velikost písma: Můžete volit rozdílné velikosti písma.

Datum: Zobrazit datum události, která se konala.

Čas: Zobrazení času události, která se konala.

Událost: Zobrazení volací události a druhu události.

Místo: Místo volací události se zobrazí se svým názvem.

Status: Zobrazení statusu události, která se konala.

Profily: Zobrazení profilu události, která se konala.

4. V-Explorer Návod k použití

V-Explorer může být instalován na služebním pokoji na již existující počítač. Program využívá data volání z PC sester a zobrazuje je vizuálně i akusticky (při připojení reproduktorů na PC).

Zobrazení přesměrování volání

Aktuální volání

The screenshot shows the vExplorer application window with a table of call events. The table has columns for Rufereignis, Wohnbereich, Datum, Uhrzeit, Ort, and Status. The status column includes icons: a red 'X' for 'DEFEKT', green circles for 'ANW', and yellow circles with question marks for 'RUW11'. Below the table is a 'Ton an' button with a green square icon.

Rufereignis	Wohnbereich	Datum	Uhrzeit	Ort	Status
DEFEKT	WB1	15.04.2008	18:47:21	Zimmer 101	Senden abgeschaltet
ANW	WB1	15.04.2008	18:47:21	Zimmer 104	ANW
ANW	WB1	15.04.2008	18:47:21	Zimmer 105	ANW
ANW	WB2	15.04.2008	18:47:21	Zimmer 203	ANW
ANW	WB2	15.04.2008	18:47:21	Zimmer 204	ANW
ANW	WB2	15.04.2008	18:47:21	Zimmer 205	ANW
RUW11	WB2	15.04.2008	18:49:21	Zimmer 207	Senden abgeschaltet
ANW	WB3	15.04.2008	18:47:22	Zimmer 305	ANW
RUW11	WB3	15.04.2008	18:49:22	Zimmer 307	Senden abgeschaltet


Tón

Zobrazení přesměrování volání: Zobrazí se existující přesměrování volání.

Tabulka aktuálních volání: Zobrazí se aktuální volání s typem volání, obytnou zónou, datem, časem a statusem. Zobrazení statusu volacích událostí se podporuje opticky piktogramem.


Tón: Pro zapnutí nebo vypnutí klikněte na tlačítko **Tón** (tón pro signalizace volání).

System

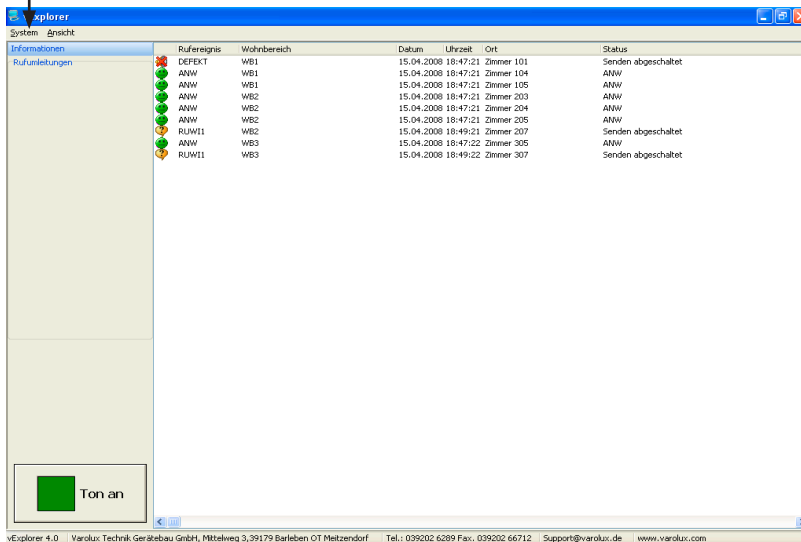

Klikněte na tlačítko **System** a otevře se následující okno:

Adresář pro Wave-soubor

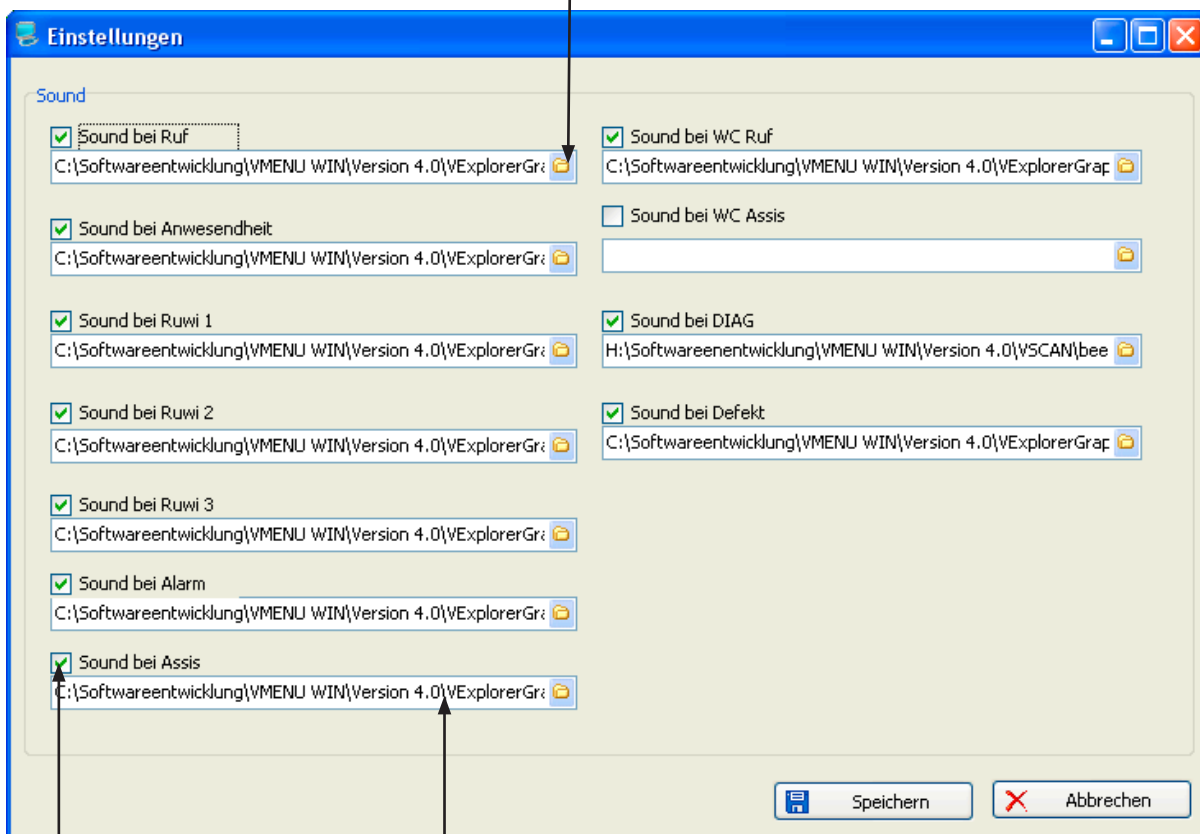

Instrukční blok
výběru

Umístění Wave-souboru

V tomto okně můžete určit zvuky pro události volání. Můžete otevřít adresář a zvolit příslušné zvuky jako wave-soubor. Pro vypnutí nebo zapnutí zvuku pro každý typ volání klikněte na plošku výběru

Impresum

VAROLUX - Technik Gerätebau GmbH
Mittelweg 3
39179 Barleben OT Meitzendorf
Tel.: 039202 - 6289
Fax: 039202 - 66712
Web: www.varolux.com
Email: info@varolux.com

Všechna práva vyhrazena, zvláště právo na rozmnožování, šíření a překlad. Žádná část této příručky nesmí reprodukována bez písemného povolení firmy VAROLUX – Technik Gerätebau GmbH a autorů nebo zpracována, rozmnožována či rozšířena použitím elektronických systémů.